

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
<b>A-POCT EGA (solo per interni)</b>	APEGA	AEGA	041		Sg	Sir.epar.				1	14,80	16,30	89.65.1	89.65.1_2	
<b>C-EPOC EGA (solo per interni)</b>	CEPOC	VEGA	042		Sg	Sir.epar.				1	20,1	22,15	89.66	89.66_3	
ACETILCOLINA Anticorpi anti recettore nicotinico acetilcolina (AChR)	ABRAC	ABRAC	427	BR lp	Sr	ruggine piccola	Centrifugare entro 30 minuti		Centrifugare, sierare, cong n° 5 a -20°	15	10,95	12,05	90.53.9	90.53.9_0	nmol/L
ACE	ACE	ACE	449	Synlab	Sr	bianca piccola			Campione frigorifero n°3	7	8,55	9,45	90.17.E	90.17.E_0	U/L
ACETONE/ KETONI urine								<b>non si esegue più</b>							
ACETAMIDE MONO METIL <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
ACETILSALICILICO ACIDO vedi SALICILATI	SALIC										12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_44	
ACETONE <i>(solo per esposizione lavorativa)</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
ACIDI BILIARI	ACB	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	8,10	8,95	90.01.5	90.01.5_0	µmol/L
ACIDO AMINOLEVULINICO (ALA) Vedi PORFIRINE urinarie (totali)	PORFU														
ACIDI GRASSI PLASMATICI <i>(Profilo di esami)</i>  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD				BR	PI	VIOLA grande	Prendere accordi con B.Roma tel.0458124266	Centrifugare, sierare, cong n° 5 a -20° (almeno 1 ml plasma).						
ACIDI ORGANICI urine N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD				PD	Ur	U-VERDE minimo 2 ml	A freddo  Clinica pediatrica, malattie metaboliche ereditarie, 3° piano di fronte entrata principale <b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 049 8212536 LURM. VR non esegue più</b>							
Acido METIL-IPPURICO (BASE) <i>(solo per Interni - base-Medico Competente)</i> N.B. SOLO PER INTERNI	MIPPU non si esegue più	MIPPU	612	Synlab	no 24h	U-ROSSO		<b>MIPPU non si esegue più</b>	Provetta frigorifero n. 3	23	5,15	5,70	90.02.4	90.02.4_0	
Acido METIL-IPPURICO (espos) <i>(solo per Interni - Medico Competente)</i> N.B. SOLO PER INTERNI	MIPPE non si esegue più	MIPPE	611	Synlab	no 24h	U-ROSSO		<b>MIPPE non si esegue più</b>	Provetta frigorifero n. 3	23	5,15	5,70	90.02.4	90.02.4_0	
ACTH ORE 8.00: ormone adrenocorticotropo NO Centri Prelievi periferici	ACTH	*ACTH	620	Legnago	PI	viola piccola	provetta prerrefrigerata, a freddo consegnata subito in laboratorio	Esame NON richiedibile da Centri prelievi periferici.	Centrifugare a freddo, aliquota in cong a -20° entro 1 ora dal prelievo	7	18,1	19,95	90.15.2	90.15.2_2	pg/mL
ACTH ORE 18.00 NO Centri Prelievi periferici	ACTHP	*ACTH	621	Legnago	PI	viola piccola	provetta prerrefrigerata, a freddo consegnata subito in laboratorio	Esame NON richiedibile da Centri prelievi periferici.	Centrifugare a freddo, aliquota in cong a -20° entro 1 ora dal prelievo	7	18,1	19,95	90.15.2	90.15.2_3	pg/mL
ACTH TEST: CORTISOLO								<b>Non si esegue più</b>							
ACTINA anticorpi <i>(anticorpi f-actina)</i>	FACT	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				15	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_21	UA
ADAMTS 13 attività proteasica	ADAM	ADAMT	945	BR 7:30	PI	azzurra piccola		<b>Contattare Laboratorio San Bonifacio</b>	<b>Previo accordo con Dott. Poli 0458124716</b>	15	77,85	85,65	90.53.3	90.53.3_3	%
ADDIS(conta di)								<b>Non si esegue più</b>							
ADENOVIRUS FECI <i>(antigeni)</i>	ADENO	VIRUS	392	SB	Feci	Vasetto sterile				3	5,55	6,15	91.12.8	91.12.8_0	
ADH <i>(Ormone Anti Diuretico - Vasopressina)</i> SOSTITUITO DA COPEPTINA)	COPEP														

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura		
<b>AGGLUTININE (a freddo e a caldo)</b> NO Centri Prelievi periferici TEST DI Coombs Diretto TEST DI Coombs Indiretto AGGLUTININE (a freddo) AGGLUTININE (a caldo)	<b>AGGLU</b>										6,30	6,95	90.46.3	90.46.3_0			
	TCD0	GRH	266	SBct	Sg	2 FUCSIA grande	3 provette a 37° C chiedere il contenitore per trasporto e provette in laboratorio	Provette e materiale di prelievo preriscaldati portati al Centro Trasfusionale di SB a 37°C sia a freddo che a caldo. <b>Firmare le provette</b>		4	6,10	6,75	90.58.2	90.58.2_0			
	TCI0										8,25	9,10	90.49.3	90.49.3_0			
	AGGL0	SIT	090								6,30	6,95	90.46.3	90.46.3_0			
	AGGL										37Å°C						
AGGREGAZIONE PIASTRINICA (vedi PFA 100)	<b>PFA</b>																
ALBUMINA	<b>ALB</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	2,30	2,55	90.05.1	90.05.1_2	g/L		
ALBUMINURIA 1°minzione (microalbuminuria)	<b>MALBE</b>	URI1	906	SB	Ur 1° minz.	U-VERDE	è possibile accettare anche <b>MICR</b>	<b>Si esegue anche creatininuria</b>		2	4,1	4,55	90.33.4	90.33.4_4	mg/L		
ALBUMINURIA TEMPORIZZATA (microalbuminuria 24H)	<b>MALBU</b>	MALBU	047	SB	Ur	2 U-ROSSO		Provetta con diuresi e tempo di raccolta		2	2,3	2,55	90.05.1	90.05.1_3	mg/L		
	UAL24	DIU	DIUcc													017	
ALCOOL ETILICO (siero)	<b>ALCOS</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola		Disinfettare con sostanze non alcoliche (firma su provetta per scopi medico legali).		2	5,10	5,65	90.20.1	90.20.1_2	mg/dL		
ALCOOL ETILICO (urine) Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	<b>ALCOU</b> ALCO3 CREA5	DAU_A	040	SB	Ur	U-ARANCIO		Richiedere CREA5 se viene richiesto singolarmente		2	5,1	5,65	90.20.1	90.20.1_3	mg/dL		
											1,35	1,5	90.16.3	90.16.3_9	mg/DI		
ALDOSTERONE + RENINA (screening)	<b>SARR</b> ALDO REN ARRC	ALDO	817	Legnago	PI	2 VIOLA grande			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°	7	12,9	14,2	90.05.3	90.05.3_2	ng/L		
		REN	483								22,75	25,05	90.40.2	90.40.2_3	mU/L		
ALDOSTERONE clinostatismo (vedi aldosterone screening-SARR)	<b>SARR(ALDOC)</b>	ALDOc	818	Legnago	PI	VIOLA grande		<b>sostituito da SARR</b>		5	12,9	14,2	90.05.3	90.05.3_2	ng/L		
ALDOSTERONE ortostatismo (vedi aldosterone screening-SARR)	<b>SARR(ALDOR)</b>	ALDOo	819	Legnago	PI	VIOLA grande		<b>sostituito da SARR</b>		5	12,9	14,9	90.05.3	90.05.3_3	ng/L		
ALDOSTERONE urinario	<b>ALDOU</b> ALDO DIU	ALDOU	910	Synlab	Ur 24h	2 U-ROSSO				7	12,9	14,2	90.05.3	90.05.3_4	µg/24h		
		DIU	DIUcc								017						
<b>ALFA GALATTOSIDASI</b> N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>				BRnp	Sg	3 provette VIOLA grande Servono 15 ml di sangue	Entro h 7.30 A freddo	Entro h 7.30 A freddo Previo accordo con neuropatologia tel 045 8124461								
ALFA 1 ANTITRIPSINA	<b>A1ATR</b>	NEFEL.	010	SB	Sr	TRASPARENTE grande				7	5,55	6,15	90.05.4	90.05.4_0	g/L		
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA								<b>Non richiedibile</b>									
ALFA 1 MICROGLOBULINA	<b>A1MIC</b>	A1MIC	406	Synlab	Urine mattino	U-ROSSO		Prima del mattino, raccolta con mitto intermedio	Campione frigorifero n°3	7	9,55	10,55	90.06.2	90.06.2_3	mg/L		
ALFA FETOPROTEINA (utilizzabile anche per pz oncologici o in gravidanza)	<b>AFP</b>	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande		In accettazione indicare se: 1: gravidanza o pz oncologico 0: non gravidanza	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	4	10,95	12,05	90.05.5	90.05_2	UI/mL – µg/L		
ALFA FETOPROTEINA IN GRAVIDANZA (solo per pazienti in gravidanza)	<b>AFPG</b>	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande		In accettazione indicare se: 1: gravidanza	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	4	10,95	12,05	90.05.5	90.05_5	UI/mL – µg/L		
<b>ALOTANO</b> I pazienti esterni devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro di BR N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>							I pazienti esterni devono rivolgersi personalmente alla Med. del Lavoro di BR 045 8124293									

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
ALLUMINIO sierico	ALLUS	AL_Sr	213	Synlab	Sr	PrAPP	Richiedibile solo x paz. DIALISI allegare fotocopia ricetta medica	Richiedibile solo x paz. DIALISI allegare fotocopia ricetta medica <b>Esame da prenotare Provetta dedicata, da richiedere in Laboratorio.</b>	Utilizzare provetta specifica Metal Free (Trace Elements) richiedibile al magazzino di Castenedolo. Subito dopo il prelievo la provetta non deve essere aperta, travasata o aliquotata, ma inviata tale quale al laboratorio	10	8,05	8,90	90.07.1	90.07.1_2	
ALT (GPT)	ALT	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	2,30	2,55	90.04.5	90.04.5_0	U/L
AMA (anticorpi anti mitocondri)	AMA	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				15	8,35	9,20	90.52.1	90.52.1_0	
AMANITINA su urine N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BT				Richiesta per sospetto di intossicazione da funghi	Laboratorio B.T. 0458122154 Sentire dott. Ricci dott. Zannoni tel. 366 5025004 responsabili di TOSSICOLOGIA pronto soccorso di B.T. tel. 045 8122120 /1 oppure dott. Cocco tel. 045 812254 laboratorio di B.T.						
AMEBA ricerca feci(non si esegue com.del 30/12/24)		PARA1	183	Legnago	feci	Vasetto sterile	Scrivere su etichetta : "AMEBA"	Non richiedibile		10	4,15	4,6	91.05.4	91.05.4_2	
AMEBA sangue (anticorpi)	AMEB	AMEB	341	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	12	22,90	25,20	90.92.7	90.92.7_0	titolo
AMFETAMINE Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	AMFE AMFE3 CREA5	DAU_A	040	SB	Ur	U-ARANCIO		Fa parte del profilo DRO ESTERNI :per uso clinico diagnostico (richiesto nell'impegnativa) Richiedere CREA5 se viene richiesto singolarmente		2	5,30 1,35	5,85 1,5	90.40.9 90.16.3	90.40.9_3 90.16.3_9	ng/mL mg/Dl
AMH (ormone antimulleriano)	AMH	AMH	422	BR	Sr	bianca piccola				20	28	30,8	90.17.G	90.17.G_0	µg/L
AMIKACINA (No centri prelievi Periferici)	AMIKA	AMIKA	504	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare entro 30 min in centrifuga refrigerata. Sierare, cong. n° 5 a -20°	7	12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_6	mg/L
AMIKACINA post dose (No centri prelievi Periferici)	AMIKP	AMIKP	573	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare entro 30 min in centrifuga refrigerata. Sierare, cong. n° 5 a -20°	7	12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_24	mg/L
AMILASI	AMI	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	2,30	2,55	90.06.4	90.06.4_2	U/L
AMILASI PANCREATICA	AMIP	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola		Sostituisce "amilasi isoenzimi"		2	4,55	5,05	90.06.5	90.06.5_0	U/L
AMILASI urine	AMIU UAM24 DIU	ChUrine DIUcc	902 017	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO				2	2,30	2,55	90.06.4	90.06.4_3	U/L mL/24h
AMILOIDE A si accetta solo con impegnative fino al 29.12.2024	SAA	SAA	941	Synlab	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	9	10,00	11,00	91.6R.F	91.6R.F_0	
AMINOACIDI PLASMATICI	AMINP	AMINP	470	PD	PI	VERDE grande	prenotare per il giovedì mattina alle 7.00	prenotare per il giovedì mattina alle 7.00 <b>Inviare congelato</b> al Lab Malattie Metaboliche (Campus Biomedico Pietro D'Abano - 0458212536 - Via Giuseppe Orus 2B Padova)	<b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>	30	3,05	3,40	90.07.2	90.07.2_2	
AMINOACIDI URINARI	AMINU	AMINU	476	PD	Ur 24h + 1 minzione	U-ROSSO	prenotare per il giovedì mattina alle 7.00	prenotare per il giovedì mattina alle 7.00 <b>Inviare congelato</b> al Lab Malattie Metaboliche (Campus Biomedico Pietro D'Abano - 0458212536 - Via Giuseppe Orus 2B Padova)	<b>NB Prima della raccolta contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>	30	3,05	3,4	90.07.2	90.07.2_3	
AML1/ETO Riarrangiamento genetico Oncoematologico	AML AML1	BIOLM	221	BR	PI	VIOLA grande	Entro h 7.30 + Modulo	<b>NON serve appuntamento prelievo h7.30 + Modulo</b>		40	395,00	434,5	G8.01	G8.01_12	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
AMMONIO	AMMON	*NH4	018	SB	Sg	viola piccola	A freddo	A freddo Spedire il più velocemente possibile in laboratorio		2	8,05	8,90	90.07.5	90.07.5_0	µg/dL
<i>AMP CICLICO</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	NO COD			BR	1°minzione + Ur 24h		SOLO per ricerca	SOLO per ricerca							
ANA Anticorpi anti nucleo)	ANA	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				12	8,50	9,35	90.52.4	90.52.4_0	
<b>ANCA</b> <b>(anticorpi anti citoplasma neutrofili)</b> AB CITOP.NEUT.CANCA AB CITOPL.neut PANCA *ANCA CIT.NEUT.MPO *ANCA CIT.NEUT.PR3	<b>ANCA</b> ANCA0 ANCA1 ANCA2 ANCA3	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande		<b>Richiedere con ANTI-MPO e ANTI-PR3</b>		8 8 7 8	10,10 10,10 9,70 9,70	11,15 11,15 10,70 10,70	90.48.2 90.48.2 90.51.6 90.53.8	90.48.2_3 90.48.2_2 90.51.6_0 90.53.8_0	CU CU
ANGIOTENSINA II	ANGIO	ANGIO	132	Synlab	PI	VIOLA grande				20	12,3	13,53	90.08.2	90.08.2_0	ng/L
Androstenediolo Glucoronide								<b>Non eseguibile</b>							
Androstenedione Delta 4 <b>(vedi DELTA 4 ANDROSTENEDIONE)</b>	<b>D4A</b>										8,5	9,35	90.17.3	90.17.3_0	
ANTI-PLA2R (Metodo IFI)	<b>PLA2R</b>	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				15	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_2	
ANTI-PLA2R (Metodo ELISA)	<b>PLA20</b>	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				10	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_2	UA
ANTITROMBOSPONDINA	<b>TROMB</b>	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				15	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_2	
Anticorpi anti Actina F (vedi Actina)	<b>FACT</b>	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				10	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_21	UA
Anticorpi anti Acetilcolina Recettori <b>(vedi ACETILCOLINA RECETTORI)</b>	<b>ABRAC</b>														
<b>Anticorpi anti ADENOVIRUS</b> ADENOVIRUS Anticorpi IgG ADENOVIRUS Anticorpi IgM	<b>ADEN</b> ADENG ADENM	APNEU	706	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n.3	5	4,65 4,65	5,15 5,15	91.13.1 91.13.1	91.13.1_35 91.13.1_36	
Anticorpi anti Ameba <b>(Vedi AMEBA sangue)</b>	<b>AMEB</b>														
<b>ANTICORPI ANTI CUTE</b> BP180 BP230 DESMOGLEINA G1 DESMOGLEINA G3	<b>CUTE</b> BP180 BP230 DESMO DESM3	CUTE	614	<b>BR Ip</b>	Sr	ruggine piccola		Il codice contiene Ab BP180-Ab + BP 230 + Ab Desmogleina G1 e Ab Desmogleina G3	Se prelievo di venerdì o sabato congelare siero cong. N° 5 a -20°	15	19,85 19,85 19,85 19,85	21,85 21,85 21,85 21,85	90.52.5 90.52.5 90.52.5 90.52.5	90.52.5_51 90.52.5_52 90.52.5_49 90.52.5_50	U/mL U/mL U/mL U/mL
Anticorpi anti Campylobacter								<b>Non richiedibile</b>							
Anticorpi anti Cellule parietali gastriche <b>(vedi APCA)</b>	<b>APCA</b>										7,35	8,1	90.48.1	90.48.1_0	
<i>Anticorpi anti Cervelletto</i> <b>(vedi GANGLI Ab)</b>	NO COD														
Anticorpi anti Citoplasma neutrofili <b>(vedi ANCA)</b>	<b>ANCA</b>														
<i>Anticorpi anti Eparina</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	NO COD			Ct BT			Modulo fornito da nostro C.T. <b>Eseguire il prelievo il Martedì</b>	<b>Sospendere Eparina almeno 48h prima. Solo su appuntamento al ct BT tel. 045 8122149 Allegare modulo dedicato</b>	<b>Stesse modalità esame APIAS Il prelievo deve arrivare a B Trento entro le ore 9,30 SOLO il GIOVEDI'</b>						
Anticorpi anti Eritrociti <b>(vedi COOMBS TEST)</b>	<b>TDC</b>														
Anticorpi anti IA2	<b>IA2</b>	DIAB	220	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	4	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_12	IU/mL
Anticorpi anti ICA <b>(Vedi INSULA PANCREATICA)</b>	<b>ICA</b>										7,55	8,35	90.50.5	90.50.5_0	
Anticorpi anti Microsomi epatici e renali <b>(vedi LKM)</b>	<b>LKM</b>										7,3	8,05	90.51.5	90.51.5_0	
Anticorpi anti Microsomi tiroidei <b>(vedi TIREOPERROSSIDAS)</b>	<b>ABTPO</b>										10,1	11,15	90.51.4	90.51.4_0	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
Anticorpi anti Mitocondrio (vedi AMA)	AMA										8,35	9,2	90.52.1	90.52.1_0	
Anticorpi anti Muscolo liscio (vedi ASMA)	ASMA										6,55	7,25	90.52.2	90.52.2_0	
Anticorpi anti Musk	MUSK	MUSK	959	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	20	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_46	U/mL
Anticorpi anti Muscolo scheletrico/ striato (vedi MUSCOLO STRIATO Ab)	CUORE										6,55	7,25	90.52.3	90.52.3_0	
Anticorpi anti Neuroni (vedi ONCONEURALI Ab)	ABNEU										19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_19	
Anticorpi anti NON Organo specifici (vedi ANA)	ANA										8,5	9,35	90.52.4	90.52.4_0	
Anticorpi anti Nucleo (vedi ANA)	ANA										8,5	9,35	90.52.4	90.52.4_0	
Anticorpi anti pro-trombina (IgG e IgM)								Non richiedibile							
Anticorpi anti pneumococco N.B. SOLO PER INTERNI	Richiedere UPNE o ARESP							Richiedere UPNE o ARESP							
Anticorpi anti Picorna virus (vedi PICORNA VIRUS)								Non richiedibile							
Anticorpi anti Polio virus (vedi POLIO VIRUS)	POLIO														
Anticorpi anti Psittaci (vedi CHLAMYDIA PSYTTACI Ab)	CHPS														
Anticorpi anti Reticolina								Non richiedibile							
Anticorpi anti Sacaromices (vedi ASCA)	ASCA														
Anticorpi anti Streptolisina (vedi TAS)	TAS														
Anticorpi anti 21 OH	NO COD														
Anticorpi anti Surrene	NO COD														
Anticorpi anti Tireotropina (vedi TSH recettore)	ACTBI														
Anticorpi anti Tiroide (vedi TIREOPERROSSIDASI Ab)	ABTPO														
Anticorpi anti Trypanosoma (vedi TRYPANOSOMA Ab)	NO COD														
Anticorpi anti Yersinia enterocolitica - IgA conferma	YERSA	YERS	886	BTm	Sr	bianca piccola				15	29,3	32,25	90.84.8	90.84.8_7	
Anticorpi anti Yersinia enterocolitica - IgG conferma	YERSG	YERS	886	BTm	Sr	bianca piccola				15	29,3	32,25	90.84.8	90.84.8_7	
Anticorpi MAG [vedi MAG Ab (Glicoproteina associata alla mielina)]	MAG														
ANTIDIURETICO ORMONE (Vasopressina o ADH)	COPEP														
Antigene Carcinoembrionale (vedi CEA)	CEA														
Antigene Epatico solubile (vedi SLA-compreso nel profilo LIVER)	SLA														
ANTI-FOSFOL.(ACCORP)	APS														
LAC (lupus anticoagulant) NO Centri Prelievi periferici	LAC01	COAG3	267	Legnago	PI	azzurra piccola		NON eseguibile in pazienti in Terapia Anticoagulante.	Centrifugare, anquotare, ricentrifugare e aliquotare nuovamente. Congelare a -20°	15	4,1	4,55	90.46.5	90.46.5_3	
	LAC02										4,1	4,55	90.46.5	90.46.5_2	
BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Anticorpi IgG	AB2GG	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande		Richiedere preferibilmente assieme a anticorpi anti cardioplipina e Lupus		15	10,10	11,15	90.49.6	90.49.6_4	CU
BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Anticorpi IgM	AB2GM										10,10	11,15	90.49.6	90.49.6_5	CU
CARDIOLIPINA Anticorpi IgG	ACL1	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				15	11,10	12,25	90.47.5	90.47.5_2	CU
CARDIOLIPINA Anticorpi IgM	ACL2										11,10	12,25	90.47.5	90.47.5_3	CU

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura	
Antigene Legionella su urine (vedi LEGIONELLA)	LEGU															
Antigene PP65 (vedi CITOMEGALOVIRUS Ricerca con metodo PCR (DNA))	SCMV							Per la diagnosi di infezione da CMV non si esegue la ricerca dell'antigene PP65 ma si ricerca il DNA virale con metodo PCR.								
ANTISTREPTOLISINA anticorpi (vedi TAS)	TAS															
ANTITROMBINA	A3	COAG	300	SB	PI	azzurra piccola				2	2,45	2,70	90.57.5	90.57.5_0	%	
APC RESISTANCE (resistenza alla proteina C attivata)	APCR	TROMB	002	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare aliquotare, congelare -20°C	10	8,00	8,9	90.77.2	90.77.2_0	ratio	
APCA (metodo IFA) (anticorpi anti cellule parietali gastriche)	APCA	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				15	7,35	8,1	90.48.1	90.48.1_0	titolo	
APCA (Metodo ELISA) (anticorpi anti cellule parietali gastriche)	GPA	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				10	7,35	8,1	90.48.1	90.48.1_0	UA/mL	
APOLIPOPROTEINA A	APOA	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	5,35	5,9	90.08.4	90.08.4_0	g/L	
APOLIPOPROTEINA B	APOB	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	5,25	5,8	90.08.5	90.08.5_0	g/L	
APTOGLOBINA	APTG	CHIMM	989	Legnago	Sr	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	4,1	4,55	90.09.1	90.09.1_0	g/L	
<b>ASCA Anticorpi</b>	<b>ASCA</b>							<b>Per diagnostica MICI (Malattia infiammatoria cronica intestinale) è preferibile che sia richiesto ANCA</b>		8						
ASCA Anticorpi IgG	ASCA0	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande					10,95	12,05	90.53.A	90.53.A_2	UA/mL	
ASCA Anticorpi IgA	ASCA2										10,95	12,05	90.53.A	90.53.A_3	UA/mL	
ASMA (anticorpi anti muscolo liscio)	ASMA	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				10	6,55	7,25	90.52.2	90.52.2_0	Titolo	
ASPERGILLUS anticorpi IgG	ASPER	ASPER	230	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°	15	32	35	91.13.2	91.13.2_6		
ASPERGILLUS Antigene <b>N.B. VEDI GALATTOMANNANO</b>	<b>GALAT</b>										22,3	24,55	90.97.6	90.97.6_3		
<b>ASSETTO EMOGLOBINICO impegnativa dal 30/12/2024</b> HbA2 HbF Concl. HB anomale	<b>HBFRA</b>	ASST	913	Legnago	Sg	viola piccola		<b>SI ACCETTA cod. ASSET CON IMPEGNATIVA FINO AL 29/12/2024</b>		10	7,75	8,55	90.66.7	90.66.7_2		
<b>ASSETTO EMOGLOBINICO fino al 29/12/2024</b>	<b>ASSET</b>	ASST	913	Legnago	Sg	viola piccola										
AST(GPT)	AST	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	2,30	2,55	90.04.5	90.04.5_0	U/L	
AVIDITA' IgG CITOMEGALOVIRUS	CITOA	VIDAS	672	Legnago	Sr	OCRA grande		<b>ESEGUIBILE SOLO IN PAZIENTI CON IgG POSITIVE</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	4	4,65	5,15	91.15.F	91.15.F_0	%	
AVIDITA' IgG ROSOLIA	ROSOA	VIDAS	672	Legnago	Sr	OCRA grande		<b>ESEGUIBILE SOLO IN PAZIENTI CON IgG POSITIVE</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	8	11,45	12,6	91.26.D	91.26.D_0	%	
AVIDITA' IgG TOXOPLASMA (compreso nel profilo TOXO)	TOXOA	VIDAS	672	Legnago	Sr	OCRA grande		<b>ESEGUIBILE SOLO IN PAZIENTI CON IgG POSITIVE</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	8	10,45	11,5	91.09.D	91.09.D_0	Index	
BAL (liquido di lavaggio broncoalveolare)	BAL	BAL	290	Legnago	Mb	Vasetto sterile		travasare in rapporto 1:1 in provetta dedicata	Campione frigorifero n. 3 supporto per Legnago	5	18,6	20,5	90.93.7	90.93.7_2		
Broncospirato	BASP	BASP	224	Legnago	Mb	Vasetto sterile				5	18,6	20,5	90.93.7	90.93.7_3		
BARBITURICI siero (vedi FENOBARBITAL)	FENOB										12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_42		
BARBITURICI urine <b>N.B. SOLO PER INTERNI</b>	<b>NO COD</b>							Solo come urgenza inviare a BR								
<b>BARTONELLA (Henselae) anticorpi</b>	<b>BARTO</b>									30						
BARTONELLA Anticorpi IgG	BARTG	BART	542	Legnago	Sr	ROSSO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3			17,1	18,85	90.87.R	90.87.R_0	Index
BARTONELLA Anticorpi IgM	BARTM											17,1	18,85	90.87.R	90.87.R_0	Index
BCL1/IgH2 Riarrangiamento genetico	BCL1 BCL1I	BIOLM	221	BR	PI	VIOLA grande	<b>Entro h 7.30 + Modulo</b>	<b>NON serve appuntamento per BR prelievo h7.30 + Modulo</b>		40	151,30	166,45	91.60.Q	91.60.Q_0		

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di referenziazione (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
BCL2/IgH2 Riarrangiamento genetico	BCL2 BCL2I	BIOLM	221	BR	PI	VIOLA grande	Entro h 7.30 + Modulo	NON serve appuntamento per BR prelievo h7.30 + Modulo		40	151,30	166,45	91.60.U	91.60.U_0	
BCR/ABL	BCRMA BCR0 BCRC	BCRMA	020	Legnago	PI	3 VIOLA grande	Entro h 7.30 + Modulo	Non si esegue venerdì e sabato e no prefestivi. Il paziente DEVE consegnare il modulo di richiesta da parte del reparto Oncologia di San Bonifacio o altra Oncologia		30	395	434,5	G8.01	G8.01_16	
BENZODIAZEPINE Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	BENZO BENZ3 CREA5	DAU_A	040	SB	Ur	U-ARANCIO		Fa parte del profilo DRO (per urgenza:vedi droghe urine) Richiedere CREA5 se viene richiesto singolarmente		2	12,05 1,35	13,3 1,5	90.17.C 90.16.3	90.17.C_28 90.16.3_9	ng/mL mg/Dl
BENZODIAZEPINE CONFERMA MEDICINA LEGALE solo per pz Pronto Soccorso	BENML	DROML	095	MEDLEG	Sr	ROSSO grande			Busta per Medicina Legale da PS	10	12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_28	
BENZENE I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD					provetta apposita fornita da medicina del lavoro		Accettiamo solo le ditte convenzionate con noi. Il paziente deve rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
Beta glucano	BGLUC	MICE	433	Legnago	Sr	ROSSO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	22,3	24,55	90.97.6	90.97.6_2	pg/mL
BETA 2 GLICOPROTEINA 1 anticorpi (vedi accorpamento APS ANTI-FOSFOL.) BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Anticorpi IgG BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Anticorpi IgM	AB2GP AB2GG AB2GM	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande		Richiedere preferibilmente assieme a anticorpi anti cardiopina e Lupus anticoagulant (LAC)		15	10,10 10,10	11,15 11,15	90.49.6 90.49.6	90.49.6_4 90.49.6_5	CU CU
BETA 2 MICROGLOBULINA	B2MIC	MAGLU	346	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)	7	9,50	140,45	90.10.1	90.10.1_2	mg/L
BILIRUBINA (tot. e fraz.)	BILI	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola		Si esegue la bilirubina diretta, se bilirubina tot >1,1 mg/dL		2	3,70	4,10	90.10.5	90.10.5_2	mg/dL
BILIRUBINA totale(UTILIZZARE SOLO CODICE BILI) ATTENZIONE!!!!NON USARE BTOT	BILI	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola	NON USARE BTOT	Si esegue la bilirubina diretta, se bilirubina tot >1,1 mg/dL		2	3,70	4,10	90.10.5	90.10.5_2	mg/dL
BK ASP.BRONCHIALE	BASBK BKAM1 BKAM2 BKAM3	BASBK	574		BTm	Mb	2 Vasetto sterile								
		BASBK	574						Campione frigorifero n°3	30	7,55	8,35	91.01.9	91.01.9_3	
BK ESCREATO (colturale e diretto)	EBK EBKM1 EBKM2 EBKM3	EBK	570		BTm	Mb	2 Vasetto sterile								
		EBK	570						Campione frigorifero n°3	30	7,55	8,35	91.01.9	91.01.9_2	
BK URINE(colturale e diretto)	UBK UBKM1 UBKM2 UBKM3	UBK	571		BTm	Mb	2 Vasetto sterile								
		UBK	571						Campione frigorifero n°3	30	7,55	8,35	91.01.9	91.01.9_5	
BK MATERIALI DIVERSI (colturale e diretto)	BK BKXM1 BKXM2 BKXM3	BK?__	572		BTm	Mb	2 Vasetto sterile		Specificare sempre il tipo di materiale (non eseguibile su Feci)						
		BK?__	572						Campione frigorifero n°3	30	7,55	8,35	91.01.9	91.01.9_17	
BK -DNA	TBC	BKDNA	552	SB	Mb	Vasetto sterile		Escreato	Metodica certificata su escreato.	0	78,9	86,8	90.99.2	90.99.2_1	
BKV Polyoma Virus DNA (plasma)	BKVP	BKVP	948	BRm	Sr	VIOLA grande	Entro h 7.30	Entro h 7.30 Biologia Molecolare (sette microbiologia) Dr.ssa Boaretti 045/8128289		10	51	56,1	91.12.B	91.12.B_29	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
BKV Polyoma Virus DNA (urine)	BKVU	BKVU	947	BRm	Ur	U-ROSSO	Entro h 7.30	Entro h 7.30 Biologia Molecolare (sette microbiologia) Dr.ssa Boaretti 045/8128289		10	51	56,1	91.12.B	91.12.B_29	
BNP (Peptide natriuretico B)	BNP	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				10	12,55	13,85	90.36.6	90.36.6_0	pg/mL
<b>BORRELIA BURGDORFERI anticorpi (malattia di Lyme)</b> BORRELIA B. Anticorpi IgG BORRELIA B. Anticorpi IgM	<b>BORRE</b> BORRG BORRM	BORRE	388	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	5	6,6	7,3	90.87.T	90.87.T_2	
<b>BORRELIA BURGDORFERI (metodo PCR)</b> N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>			BRm				<b>Consegna campione SOLO dal Lunedì al Giovedì</b>							
<b>BROMODEOSSURIDINA</b> N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>			BRpe	Sm			<b>h.7.30</b> 3 ml di sangue midollare in siringa eparinata	Spedire in Clinica Ematologica BR tel 045 8124559						
<b>BRUCELLA anticorpi</b> BRUCELLA Anticorpi IgG BRUCELLA Anticorpi IgM	<b>ABRUC</b> ABRUG ABRUM	ABRUC	538	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	2,90	3,20	90.88.2	90.88.2_0	
C1 ESTERASI INIBITORE ATTIVITA' No Centri prelievi periferici	<b>C1INB</b>	C1INB	882	Synlab	PI	azzurra piccola		Centrifugare entro 30 minuti dal prelievo a temp. Ambiente	Centrifugare entro 30 minuti dal prelievo a temp. ambiente, sierare, cong. n° 5 a -20°	10	5,45	6,00	90.60.1	90.60.1_0	%
C1 INATTIVATORE	<b>C1IN</b>	C1IN	872	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	5,45	6,00	90.60.1	90.60.1_0	mg/L
CA 125	<b>CA125</b>	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	2	16,35	18,00	90.55.1	90.55.1_0	KU/L
CA 15.3	<b>CA153</b>	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	2	15,95	17,55	90.55.2	90.55.2_0	KU/L
CA 19.9	<b>CA199</b>	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	4	14,5	15,95	90.55.3	90.55.3_2	KU/L
CA 50	<b>CA50</b>	CA50	827	Synlab	Sr	bianca piccola				7	14,5	15,95	90.55.3	90.55.3_3	UI/mL
CA 72-4	<b>CA724</b>	CA724	828	Synlab	Sr	bianca piccola				7	14,5	15,95	90.55.3	90.55.3_4	KU/L
CADMIO	<b>CADMP</b>	CADMP	834	Synlab	Sg	verde scuro piccola				30	8,05	8,9	90.11.3	90.11.3_2	µg/L
CALCIO	<b>CA</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	1,10	1,25	90.11.4	90.11.4_2	mg/dL
<b>CALCIO e FOSFORO su urine 2 minzione</b> CALCIO FOSFORO CREATININA RAPPORTO CA/CREATININA II°MINZ CREATININA II° MINZIONE ESCREZIONE FRAZIONALE DEL FOSFORO	<b>UCAP2</b> CA P CREA RCCU CREA2 EFFU	CHIMM	900	SB	PI + Ur 2 minz	verde piccola		Si esegue anche Ca, P e creatinina su sangue e Creatinina su urine		2	1,1	1,25	90.11.4	90.11.4_2	mg/dL
										2	1,4	1,55	90.24.3	90.24.3_2	mg/dL
										2	1,35	1,5	90.16.3	90.16.3_2	mg/dL
		URI2	905			U-VERDE				2	1,1	1,25	90.11.4	90.11.4_6	mg/DI
										2	1,35	1,5	90.16.3	90.16.3_8	mg/dL
										2	1,4	1,55	90.24.3	90.24.3_3	mg/DI
<b>CALCIO urine 2° minzione</b> Si esegue Calciuria e Creatinuria CALCIO CREATININA CREATININA II MINZIONE RAPPORTO CA/CREATININAI MINZ	<b>CAU2</b> CA CREA RCCU	CHIMM	900	SB	PI + Ur 2 minz	verde piccola		Si esegue anche creatinina su sangue e Creatinina su urine .		2	1,1	1,25	90.11.4	90.11.4_2	mg/dL
										2	1,35	1,5	90.16.3	90.16.3_2	mg/dL
		URI2	905			U-VERDE				2	1,35	1,5	90.16.3	90.16.3_8	mg/dL
										2	1,1	1,25	90.11.4	90.11.4_6	mg/DI
CALCIO IONIZZATO	<b>VLCAI</b>	CA++	103	SB	PI	verde scuro				1	4,2	4,65	90.11.7	90.11.7_0	mg/dL

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
CALCIO urine 24h	CAU	ACIDO	919	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO		Specificare quantità sull'etichetta		2	1,10	1,25	90.11.4	90.11.4_3	mg/24h
	UCA24														
CALCIO urine 20-8 (CLINO)	CA208	ACIDO	594	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO		Specificare quantità sull'etichetta		2	1,10	1,25	90.11.4	90.11.4_8	mg/12h
		DIUAC	848												mmol/12h
CALCIO urine 8-20 (ORTO)	CA820	ACIDO	593	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO		Specificare quantità sull'etichetta		2	1,10	1,25	90.11.4	90.11.4_7	mg/12h
		DIUAC	848												mmol/12h
Calcio e Fosforo I MINZIONE urine u-calcio I minzione u-Fosforo I minzione	URI1	URI1	906	SB	Ur	U-ROSSO				2	1,1	1,25	90.11.4	90.11.4_10	mg/Dl
	CASPO										1,4	1,55	90.24.3	90.24.3_5	mg/Dl
CALCITONINA	CAH	MAGLU	346	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)	10	12,85	14,15	90.11.5	90.11.5_2	pg/mL
CALCITONINA DRENAGGIO	CAHL	CAHL	595	Synlab	Sr	bianca piccola				7	12,85	14,15	90.11.5	90.11.5_3	pg/mL
CALCOLI URINARI	CALC	CALC	313	Synlab	Mb	Vasetto sterile			Eeguire esame macroscopico nel settore urine e successivamente spedire al SYNLAB	4	8,9	9,8	90.12.1	90.12.1_0	
CALPROTECTINA (feci)	CALP	CALPR	800	Bussolengo	Feci	Vasetto sterile			Trasferire una piccola quantità di feci in provetta apposita, vortexare e conservare in frigorifero n°3	8	12,05	13,30	90.12.A	90.12.A_0	µg/g
CANALI DEL CALCIO (Anticorpi)								Non eseguibile							
CANNABINOIDI Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	CANNA	DAU_A	040	SB	Ur	U-ARANCIO		Fa parte del profilo DRO ESTERNI :per uso clinico diagnostico (richiesto nell'impegnativa) Richiedere CREA5 se viene richiesto singolarmente		2	5,3	5,85	90.40.9	90.40.9_7	ng/mL
	CANN3										1,35	1,5	90.16.3	90.16.3_9	mg/Dl
CANNABINOIDI CONFERMA MEDICINA LEGALE solo per pz Pronto Soccorso Capacità ferrogante (vedi TIBC)	CANML	DROML	095	MEDLG	Sr	ROSSO grande			Busta per Medicina Legale da PS		12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_87	
CARBAMAZEPINA	CARBA	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				6	12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_29	mg/L
CARBOSSIEMOGLOBINA NO Centri Prelievi periferici	VLCHB	*VEGA	042	SB	Sg	*Sir.eparinata	A freddo	NO Centri Prelievi periferici Consegnare campione subito in Laboratorio a FREDDO			3,55	3,95	90.58.4	92.58.4_3	%
CARDIOLIPINA anticorpi (VEDI APS accorpamento ANTI-FOSFOL) CARDIOLIPINA Anticorpi IgG CARDIOLIPINA Anticorpi IgM	ACLS	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				15	11,10	12,25	90.47.5	90.47.5_2	CU
	ACL1										11,10	12,25	90.47.5	90.47.5_3	CU
CARIOTIPO LINFOCITI E BANDE NON per ESTERNI COLTURA LINFOCITI BANDEGGIO	CARPE	CARPE	270	BR	Sg	PrAPP	Entro h 7.30 + Modulo CON litio eparina			60	210	231	G2.01	G2.01_2	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura	
<b>CARIOTIPO oncologico NON per ESTERNI</b> CARIOTIPO METAFASI COLTURA CELLULARE COLTURA da Midollo COLTURA da Midollo 2 COLTURA LINFOCITI SONDE COSMIDICHE SONDE ALFOIDI	<b>CARIO</b>							<b>SOLO per DH ONCOLOGIA e MEDICINA Su APPUNTAMENTO tel 045 8128266</b>		40	350	385	G2.02	G2.02_4		
	CAR01															
	CAR03	CARIO	918	BR	Mb Sg	PrAPP	Entro h 7.30 + Modulo NO litio eparina									
	CAR04															
<b>CARIOTIPO fetale</b> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			Br gen				Arriva dalla ginecologia barattolino con cute fetale sospesa in soluzione fisiologica. Inviare presso Genetica BR								
<b>CARIOTIPO per X FRAGILE</b> <i>Il paziente deve rivolgersi personalmente a BR</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD(XFRA)</b>			Br gen				BR con appuntamento Tel. 045 8124512 oppure 045 8121212								
<b>CATECOLAMINE PLASMATICHE (adrenalina-noradrenalina-dopamina)</b> <b>NO Centri Prelievi periferici</b> ADRENALINA plasmatica NORADRENALINA plasmatica DOPAMINA plasmatica	<b>CATEP</b>							*VIOLA grande Centrifugare a freddo entro 30' dal prelievo	<b>Centrifugare a freddo entro 30 minuti, separare, cong. n° 5 a -20°</b>	25						
	ADREP	CATEP	414	BR	PI						20,2	22,25	90.03.6	90.03.6_4	pmol/L	
	NORAP										20,2	22,25	90.03.6	90.03.6_5	pmol/L	
	DOPAP										20,2	22,25	90.03.6	90.03.6_8	pmol/L	
<b>CATECOLAMINE URINE (adrenalina -noradrenalina)</b> ADRENALINA urinaria NORADRENALINA urinaria DOPAMINA urinaria	<b>CATEU</b>							2 U-ROSSO Campione frigorifero n°3		25						
	ADREU	CATEU	493	BR	Ur 24h						20,2	22,25	90.03.6	90.03.6_6	nmol/24h	
	NORAU										20,2	22,25	90.03.6	90.03.6_7	nmol/24h	
	DOPAU										20,2	22,25	90.03.6	90.03.6_9	µg/24h	
	DIUAC		848												µg/24h	
<b>CATENE LEGGERE LIBERE SU SIERO</b> KAPPA LIBERE siero LAMBDA LIBERE siero RAPPORTO KAPPA/LAMBDA	<b>FLC(gruppo)</b>							TRASPARENTE grande								
	FLCK	NEFEL.	010	SB	Sr						12	8,25	9,1	90.28.7	90.28.7_2	mg/L
	FLCL										12	8,25	9,1	90.28.7	90.28.7_3	mg/L
	RFLC															
CDT (Transferrina desialata) + CDT97	<b>CDT</b>	CDT	540	SB	Sr	ruggine piccola		Segnare n° carta identità su apposito modulo, firmare la provetta sia paziente che prelevatore		10	20,90	23,00	90.42.6	90.42.6_0	%	
	<b>CDT97</b>	CDT2	541	SB	Sr	ruggine piccola		Segnare n° carta identità su apposito modulo, firmare la provetta sia paziente che prelevatore		10	20,90	23,00	90.42.6	90.42.6_0		
CEA (antigene Carcinoembrionario)	<b>CEA</b>	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	4	10,95	12,05	90.56.3	90.56.3_2	µg/L	
CERULOPLASMINA	<b>CERUL</b>	CERUL	007	Synlab	Sr	bianca piccola			Campione frigorifero n°3	10	5,05	5,60	90.12.5	90.12.5_0	g/L	
CFTR Mutazione gene fibrosicistica Indirizzare paziente a genetica B.R. <b>solo su prenotazione in Agenda Specifica di Legnago</b>	<b>FIBRO</b>	FIBRO	751	BR (Patologia Molecolare Lab. Analisi)	Sg	VIOLA grande	<b>Modulo di accompagnamento PRENDERE APPUNTAMENTO</b>	La richiesta deve essere fatta solo dopo consulenza genetica. Il paziente deve andare direttamente a B. T. Dott. Bonizzato 045 8123492		30	450	495	G1.01	G1.01_7		
<b>CICLOESANO</b> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Il paziente deve rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295								
CISTATINA URINARIA								<b>Non richiedibile</b>								
<b>CISTICERCOSI (metodo W blot)</b> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			Negrar	Sr	OCRA grande		<b>Tel. a Negrar per conferma modalità di conservazione prima di procedere.</b>	Negrar Malattie Tropicali tel. 045 6013311 Centrifugare, sierare. E' possibile conservare a +4° per alcuni giorni. Poi congelatore -20° con etichetta sopra al tappo							
<b>CISTICERCOSI Anticorpi</b> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3							

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura						
CHARCOT-MARIE ricerca gene	CHAR CHARC	*CHARCOT	615	BRnp	PI	*VIOLA grande	Entro h 7.30 A freddo	Dal lunedì al giovedì. Richiedibile SOLO da Neurologia S.Bonifacio. Consenso informato del paziente.		90	300	330	90.02.2	90.02.2_3							
CHETONI URINE								Non richiedibile													
<b>CHIKUNGUNYA</b> CHIKUNGUNYA anticorpi IgG CHIKUNGUNYA anticorpi IgM U-CHIKUNGUNYA RNA P-CHIKUNGUNYA RNA	<b>CHIC</b> CHIKU CHIM UCHIK CHIK	ARBPD U-ARB ARBPD	749 854 888	Padova	Sr Urine Sg	BLU grande U-ROSSO 2 lilla piccola	Compilare allegato per le ARBOVIROSI (Modulo) NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914	Inviare a Padova con allegato il modulo dedicato per le arbovirosi	Eseguire un duplicato delle etichette. Centrifugare, aliquotare e congelare se spedito oltre le 72 ore	10	4,65	5,15	91.13.1	91.13.1_31	UR/mL						
<b>CHILOMICRONI</b> N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>			BR	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3												
<b>CHLAMYDIA PNEUMONIAE (Anticorpi)</b> CHLAM. PNEUMONIAE. anticorpi IgM CHLAM. PNEUMONIAE. anticorpi IgG CHLAM. PNEUMONIAE. anticorpi IgA	<b>CHPN</b> CHPNM CHPNG CHPNA	APNEU	703	Legnago	Sr	ROSSO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	30	10,20	11,25	90.88.G	90.88.G_0							
<b>CHLAMYDIA PSITTACI (Anticorpi)</b> CHLAM. PSITTACI anticorpi IgM CHLAM. PSITTACI anticorpi IgG	<b>CHPS</b> CHPSM CHPSG	APNEU	706	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	9	10,20	11,25	90.88.H	90.88.H_0							
<b>CHLAMYDIA TRACHOMATIS (Anticorpi)</b> CHLAM.TRACH. Anticorpi IgG CHLAM.TRACH. Anticorpi IgM CHLAM.TRACH. Anticorpi IgA	<b>CHTR</b> CHTRG CHTRM CHTRA	ACHLA	534	Legnago	Sr	ROSSO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	30	29,3	32,25	90.84.8	90.84.8_7	index						
CHLAMYDIA TRACHOMATIS Ricerca DNA	MST CER URIN URE FART ANOR OCLAT							Tampone cervicale e/o vaginale/tamp. rettale/tamp. faringeo/liquido seminale/urine (VEDI SINGOLI MATERIALI)													
CICLOSPORINA (determinazione quantitativa)	<b>CICLO</b>	CICLO	451	SB	Sg	viola piccola			<b>NON CENTRIFUGARE</b>	5	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_5	ng/mL						
CICLOSPORINA DOPO 2 ORE (determinazione quantitativa)	<b>CICL2</b>	CICL2	463	SB	Sg	viola piccola			<b>NON CENTRIFUGARE</b>	5	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_6	ng/mL						
CISTATINA C	<b>CISTA</b>	NEFEL.	010	SB	Sr	TRASPARENTE grande				10	15,2	16,75	90.13.A	90.13.A_0	mg/L						
CITOGENETICA (vedi CARIOTIPO oncologico)	<b>CARIO</b>																				
CITOMEGALOVIRUS su urine Metodo PCR (DNA)	<b>UCMV</b>	UCMV	510	Legnago	Ur	Vasetto sterile			Campione frigorifero n°3	8	49,35	54,3	91.15.B	91.15.B_3	IU/mL						
<b>CITOMEGALOVIRUS (anticorpi)</b> CITOMEGALOVIRUS Anticorpi IgM CITOMEGALOVIRUS Anticorpi IgG	<b>CITO</b> CITOM CITOG	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	4	4,65	5,15	91.15.F	91.15.F_0	U/mL						
CITOMEGALOVIRUS (avidità IgG)	<b>CITOA</b>	VIDAS	672	Legnago	Sr	OCRA grande		Esame di 2° livello - Test aggiunto dal laboratorio se IgM positive e IgG presenti.		4	4,65	5,15	91.15.F	91.15.F_0							
CITOMEGALOVIRUS ricerca con metodo PCR (DNA)	<b>SCMV</b>	SCMV	527	Legnago	Sg	VIOLA grande			Campione frigorifero n°3	15	44,3	48,75	91.15.C	91.15.C_2	IU/mL						

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
CITOMEGALOVIRUS ricerca con metodo PCR (DNA)	SCMV UCMV MENCE						Vedi singoli materiali		Non viene eseguito su saliva.						
CITOPLASMA NEUTROFILI anticorpi (vedi anticorpi ANCA)	ANCA														
CITRATO URINE	CITRU CITRO DIU	CITRU DIUcc	960 017	Synlab	Ur 24h	2 U-ROSSO			Campione frigorifero n°3	6	3,70	4,10	90.02.2	90.02.2_3	mmol/24h
CITRULLINA Anticorpi	AACIT	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				7	10,40	11,45	90.47.D	90.47.D_0	UA/mL
CK (creatina fosfochinasi)	CK	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	2,30	2,55	90.15.4	90.15.4_2	U/L
COLORO	CL	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	1,10	1,25	90.13.3	90.13.3_2	mmol/L
CLORO urine 24h	CLU UCL24 DIU	ChUrine	902	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO				2					
		DIUcc	017									1,10	1,25	90.13.3	90.13.3_4
CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TACD) (feci)	TACD														
CLOSTRIDIUM DIFFICILE Ricerca della tossina	B193	TACD	537	SB	Feci	Vasetto sterile		Il campione deve arrivare in laboratorio entro 24 ore		3	5,15	5,7	90.90.6	90.90.6_0	
CLOSTRIDIUM DIFFICILE Ricerca antigene GDH	B194										5,15	5,7	90.90.6	90.90.6_0	
CITRATO URINE mattino	CITRM	CITRM	823	Synlab	Ur	U-VERDE			Campione frigorifero n°3	6	3,70	4,10	90.02.2	90.02.2_2	mmol/L
CLOZAPINA	CLOZA	CLOZA	701	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	5	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_43	ng/mL
RICERCA CLONE ENP  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD				BR	Sr	2 provette VIOLA grande	Entro h 7.30	Per emoglobinuria parossistica notturna su sangue periferico						
COBALTO I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD				BRml				Il paziente deve rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295						
COCAINA Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	COCA								Fa parte del profilo DRO ESTERNI :per uso clinico diagnostico (richiesto nell'impegnativa) Richiedere CREA5 se viene richiesto singolarmente	2					
	COCA3 CREA5	DAU_A	040	SB	Ur	U-ARANCIO					5,30	5,85	90.40.9	90.40.9_9	ng/mL
											1,35	1,5	90.16.3	90.16.3_9	mg/DI
COFATTORE RISTOCETINICO (vedi F. Von Willebrand)	FVWIL								Automaticamente viene richiesto anche il fattore Von Willebrand e fattore VIII						
COLLAGENE 7°								Non richiedibile							
COLESTEROLO TOTALE	COL	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	1,20	1,35	90.14.3	90.14.3_0	mg/dL
COLINESTERASI	CHE	CHIMM	003	Legnago	Sr	VERDE grande			Campione frigorifero n°3	2	2,30	2,55	90.14.4	90.14.4_0	U/L
COMPLEMENTEMIA C3 E C4 (richiedibili separatamente)	C34														
COMPLEMENTEMIA C3	C3	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Campione frigorifero n°3	5	5,85	6,45	90.60.2	90.60.2_4	g/L
COMPLEMENTEMIA C4	C4	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Campione frigorifero n°3	5	5,85	6,45	90.60.2	90.60.2_5	g/L
COLTURA ASPIRATO CISTI	CISTI	CISTI	189	Legnago	Mb	Vasetto sterile				3	33,55	36,95	90.93.J	90.93.J_4	
COLTURA .ASPITATO .GASTRICO	LGAST	LGAST	181	Legnago	Mb	Vasetto sterile				3	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_2	
COLTURA BILE	BILE	BILE	921	Legnago	Mb	Vasetto sterile				3	33,65	37,05	90.93.L	90.93.L_9	
COLTURA BIOPSIA	BIOP	BIOPS	374	Legnago	Mb	Vasetto sterile				4	33,55	36,95	90.93.J	90.93.J_6	
COLTURA CATETERE ARTERIOSO	CART	CART	922	Legnago	Mb	Brodo		Sentire Laboratorio per Provetta		3	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_4	
COLTURA CATETERE VENOSO	CVEN	CATVE	923	Legnago	Mb	Brodo		Sentire Laboratorio per Provetta		3	25,95	28,55	90.94.1	90.94.1_7	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
COLTURA CATETERE VENOSO CENTRALE	CVC	CVC	360	Legnago	Mb	Brodo	BRODO	Sentire Laboratorio per Provetta		3	25,95	28,55	90.94.1	90.94.1_6	
COLTURALE CATETERE OMBELICO	OMBE	OMBE	188	Legnago	MB	Brodo		Sentire Laboratorio per Provetta		3	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_4	
COLTURALE CORNEA	CORNE	CORNE	370	Legnago	MB	Vasetto Sterile				3	10,1	11,15	90.93.A	90.93.A_4	
COLTURALIQUIDO DI DRENAGGIO	DRENA	DRENA	371	Legnago	Mb	Vasetto sterile				3	33,65	37,05	90.93.L	90.93.L_7	
COLTURA ESCREATO	ESCR	ESCR	222	Legnago	Mb	Vasetto sterile				3	17,25	19,00	90.93.6	90.93.6_0	
COLTURA FRAM.FEMORE(testa del femore)	TFEM	TFEM	219	legnago	Mb	Vasetto sterile				3	33,55	36,95	90.93.J	90.93.J_5	
COLTURA FRAMMENTO OSSEO	OSSO	OSSO	373	Legnago	Mb	Vasetto sterile				3	33,55	36,95	90.93.J	90.93.J_5	
COLTURA LAVAGGI	REFLU	REFLU	187	Legnago	Mb	Vasetto Sterile				3	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_13	
COLTURA LESIONE USTIONE	USTI	USTI	246	legnago	Mb	Tampone rosa				4	19,25	21,2	90.93.K	90.93.K_4	
COLTURA LINFONODO	LIN	LINF	086	legnago	Mb	Vasetto sterile				4	33,55	36,95	90.93.J	90.93.J_9	
COLTURA LIQ.PERITONEALE	LPER	PERIT	965	Legnago	Mb	Vasetto sterile				3	33,65	37,05	90.93.L	90.93.L_3	
COLTURA LIQUIDO PERICARDICO	LCAR	LCAR	207	Legnago	Mb	Vasetto Sterile				3	33,65	37,05	90.93.L	90.93.L_5	
COLTURA LIQUIDO PLEURICO (vedi Liquido Pleurico)	LPLE	PERIT	965	Legnago	Mb	Vasetto sterile			Tenere il campione in frigorifero	5	33,65	37,05	90.93.L	90.93.L_2	
COLTURA LIQUIDO SEMINALE (vedi spermiocoltura)	LSEM	LSEM	927	Legnago	Mb	Vasetto sterile			Tenere il campione in frigorifero	5	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_19	
COLTURA LIQUIDO SINOVIALE	LART	LART	926	Legnago	MB	Vasetto sterile				3	33,65	37,05	90.93.L	90.93.L_6	
COLTURA MATERIALE ABORTIVO	ABORT	ABORT	180	Legnago	MB	Vasetto sterile				3	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_6	
COLTURA MATERIALE VARIO	MATMI (MATER)	MATER	528	Legnago	Mb	Vasetto sterile				3	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_13	
COLTURA PUS	PUS	PUS	973	Legnago	MB	Vasetto sterile				3	33,55	36,95	90.93.J	90.93.J_10	
COLTURA PUS FISTOLA	FIST	FIST	372	Legnago	Mb	Tampone rosa				4	33,55	36,95	90.93.J	90.93.J_2	
COLTURA SECREZIONE MAMMARIA	MAM	MAM	085	Legnago	Mb	Vasetto sterile				4	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_7	
COLTURA VASCA PARTO	VASCA	VASCA	186	Legnago	Mb	Vasetto sterile				3	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_13	
COLTURALE SACCA	SACCA	SSAN	357	Legnago	MB	SACCA				7	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_13	
COLTURA ULCERA PIEDE DIABETICO	DIAB	DIAB	245	Legnago	Mb	Tampone rosa				4	19,25	21,2	90.93.K	90.93.K_8	
COOMBS DIRETTO (test)	TCD	GRH	266	SBct	Sg	FUCSIA grande	Modulo	Firmare la provetta	Frigorifero n. 3 su apposito supporto se il campione arriva quando il Trasfusionale è chiuso	3	6,10	6,75	90.58.2	90.58.2_0	
COOMBS INDIRETTO (test)	TCI	GRH	266	SBct	Sg	FUCSIA grande	Modulo	Firmare la provetta	Frigorifero n. 3 su apposito supporto se il campione arriva quando il Trasfusionale è chiuso	4	8,25	9,10	90.49.3	90.49.3_0	
COPEPTINA	COPEP	COPEP	323	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare, cong. a -20°.	4	8,10	8,95	90.04.1	90.04.1_3	pmol/L
COPROCOLTURA (feci) (Salmonella - Shighella e Campylobacter)	COPRO	COPRO	211	Legnago	Feci	TVERD				3	18,35	20,2	90.94.3	90.94.3_0	
COPROLEUCOCITI	CALP														
COPROPORFIRINE URINARIE (Vedi Porfirine Urinarie Totali - UPORF)	UPORF														
CORTISOLO mattino	CORTM	CORT	710	Legnago	PI	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)	8	11,50	12,65	90.15.3	90.15.3_2	µg/L
CORTISOLO POMERIGGIO ore 18,00	CORTP	CORTP	622	Legnago	PI	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)	3	11,50	12,65	90.15.3	90.15.3_3	µg/L
Cortisolo urinario libero	CORTU	CORTU	613	Legnago	Ur 24h	2 U-BLU		Acidificare con acido borico.	Provetta frigorifero n°3	3	11,50	12,65	90.15.3	90.15.3_4	µg/24h
	UCO24														
	DIUBO	DIUBO	850												
COXIELLA BURNETII (anticorpi)	COXBU														
COXIELLA BURNETII anticorpi IgG	COXBG	COXBU	707	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	12	13,2	90.90.G	90.90.G_0	
COXIELLA BURNETII anticorpi IgM	COXBM										12	13,2	90.90.G	90.90.G_0	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di referenziazion e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
<b>COXSACKIE VIRUS</b> Anticorpi COXSACKIE VIRUS B anticorpi IgG COXSACKIE VIRUS B anticorpi IgM	<b>COXSA</b>														
	COXG	AACOX	394	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	8	98	107,8	91.16.D	91.16.D_3	
	COXM										98	107,8	91.16.D	91.16.D_3	
<i>COXSACKIE VIRUS A anticorpi IgG</i>	<b>COXAG</b>	AACOX	394	BTM	SR	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	8	98	107,8	91.16.D	91.16.D_2	
<i>COXSACKIE VIRUS A anticorpi IgM</i>	<b>COXAM</b>	AACOX	394	BTM	SR	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	8	98	107,8	91.16.D	91.16.D_2	
C-PEPTIDE	<b>CPEP</b>	MAGLU	346	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 <b>(CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)</b>	5	10,20	11,25	90.11.1	90.11.1_2	ng/mL
C-PEPTIDE CURVA dopo GLUCAGONE								Non richiedibile							
C-PEPTIDE post prandiale	<b>CPOST</b>	CPOST	284	Legnago	Sr	ruggine piccola		<b>Prelievo 2 ore dopo il pasto</b>	Centrifugare, cong. n° 5 a -20°	5	10,20	11,25	90.11.1	90.11.1_3	ng/mL
CREATININA	<b>CREA</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	1,35	1,50	90.16.3	90.16.3_2	mg/dL
CREATININA Su liquido peritoneale	<b>CRELP</b>	LqSI	917	SB		U_ROSSO				2	1,35	1,50	90.16.3	90.16.3_11	mg/dL
CREATININA urine 24h	<b>CREAU</b>														
	UCR24	ChUrine	902	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO				2	1,35	1,50	90.16.3	90.16.3_3	g/24h
	DIU	DIUcc	017				mL/24h								
CREATININA-CLEARANCE	<b>CLCR</b>	CHIMM	900	SB	PI + Ur 24h	verde piccola				2	1,60	1,80	90.16.4	90.16.4_0	ml/min
	CRCL	ChUrine	902			2 U-ROSSO									
	DIU	DIUcc	017												
<b>CRIOGLOBULINE</b> <b>NO Centri Prelievi periferici</b>	<b>CRIO</b>	37Â°C	048	SB	Sr	3 BLU grande	3 provette a 37° C chiedere il contenitore per trasporto e provette in laboratorio	<b>NO sabato e giorni prefestivi</b>	<b>NO sabato e giorni prefestivi</b>	7	1,5	1,65	90.61.1	90.61.1_0	%
<b>CRIOGLOBULINE</b> tipizzazione <b>NO Centri Prelievi periferici</b>	<b>CRIO</b>	37Â°C	048	SB	Sr	3 BLU grande	3 provette a 37° C chiedere il contenitore per trasporto e provette in laboratorio	<b>NO sabato e giorni prefestivi</b>	<b>NO sabato e giorni prefestivi</b>	20	10,3	11,35	90.61.2	90.61.2_0	
CRIPTOCOCCO (Antigene)	<b>CRIPT</b>	CRIPT	487	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°	10	4,5	4,95	90.90.B	90.90.B_0	
<i>CROMO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>								Solo per Ditte gestite direttamente dal Laboratorio Analisi. Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295						
CROMOGRANINA	<b>CROMO</b>	CROMO	333	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°	3	15,20	16,75	90.16.6	90.16.6_0	ng/mL
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM ANTIGENE(FECI)	<b>CRYP</b>	CRYP	311	legnago	Feci	Vasetto sterile				2	4,5	4,95	90.90.B	90.90.B_0	
CTX SIERICO	<b>CTX</b>	CTXTG	425	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 <b>(CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)</b>	7	14,75	16,25	90.41.6	90.41.6_2	ng/mL
CYFRA 21-1	<b>CYFRA</b>	CYFRA	325	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	18,65	20,55	90.61.3	90.61.3_0	ng/mL
<b>CURVA GLUSIO</b> dopo carico di <b>GLUCOSIO (OGTT)</b>	<b>OGTT</b>			SB	PI		BASE 120'	Adulti 75 g di glucosio Bambini 1,75 g gluc/Kg di peso (max.dos. 75 g.)		2	4,2	4,65	90.26.5	90.26.5_0	mg/dl
glucosio base	GLU00	GLU00	028			griglia piccola									
Glucosio 120'	GL120	GL120	033			griglia piccola									
<b>CURVA GLUCOSIO</b> dopo carico in gravidanza	<b>OGTTG</b>			SB	PI		BASE 60' 120'	75 g di glucosio		2	4,2	4,65	90.26.5	90.26.5_0	mg/dl
glucosio base	GL00G	GL00G	928			griglia piccola									
Glucosio 60'	GL60G	GL60G	931			griglia piccola									
Glucosio 120'	G120G	G120G	933			griglia piccola									

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura								
<b>CURVA GLUCOSIO</b> (da abbinare SEMPRE a INSULINA CURVA)  glucosio base Glucosio 30' Glucosio 60' Glucosio 90' Glucosio 120' Glucosio 180'	<b>OGTT6</b>  <b>INSUC</b> GLU00 GLU30 GLU60 GLU90 GL120 GL180			SB	PI		BASE 30' 60' 90' 120'	75 g di glucosio comprende anche curva insulinemica.		2	4,2	4,65	90.26.5	90.26.5_0	mg/dl								
		26,95	29,65			90.28.5					90.28.5_3	µU/mL											
						GLU00					028	grigia piccola											
						GLU30					029	grigia piccola											
						GLU60					931	grigia piccola											
						GLU90					134	grigia piccola											
						GL120					033	grigia piccola											
		GL180	036	grigia piccola																			
<b>CURVA INSULINA</b> (da abbinare SEMPRE a GLUCOSIO CURVA)  Insulina base Insulina 30' Insulina 60' Insulina 90' Insulina 120' Insulina 180'	<b>INSUC</b>  <b>OGTT6</b>  INS00 INS30 INS60 INS90 IN120 IN180			Legnago	Sr		BASE (provetta 003 da congelare) 30' 60' 90' 120' 1180	<b>DA RICHIEDERE CON CURVA DI GLUCOSIO (OGTT6)</b>	Centrifugare , provetta frigorifero n. 3 Congelare a -20° se non viene spedita in giornata	2	26,95	29,65	90.28.5	90.28.5_3	µU/mL								
		2	4,2			4,65				90.26.5	90.26.5_0	mg/dl											
						INS00				951	ruggine piccola												
						INS30				952	ruggine piccola												
						INS60				953	ruggine piccola												
						INS90				939	ruggine piccola												
						IN120				940	ruggine piccola												
		IN180	956	ruggine piccola																			
<b>CUTE</b> (Vedi <b>ANTICORPI ANTICUTE</b> )	<b>CUTE</b>																						
D-DIMERO	<b>DD</b>	COAG	008	SB	PI	azzurra piccola				2	7,50	8,25	90.61.4	90.61.4_0	mg/L								
DECARBOSSILASI DELL'ACIDO GLUTAMMICO (vedi <b>GADA</b> )	<b>GADA</b>										9,6	10,6	90.49.7	90.49.7_0									
DELTA AMINOLEVULINICO ACIDO (vedi <b>ALA</b> )	<b>ALA</b>										8,5	9,35	90.02.3	90.02.3_0									
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	<b>D4A</b>	MAGLU	346	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 ( <b>CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata</b> )	10	8,50	9,35	90.17.3	90.17.3_0	µg/L								
<b>DENGUE</b> (Screening anticorpi) DENGUE anticorpi IgG DENGUE anticorpi IgM DENGUE Antigene NS1	<b>DENG</b>  DEN  DEM  DENAG	SCDEN	780	Legnago	Sr	ROSSO grande	Indirizzare il pz in segreteria del Laboratorio San Bonifacio. Compilare allegato per le ARBOVIROSI (Modulo)		Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3													
										2	4,65	5,15	91.13.1	91.13.1_27									
										2	4,65	5,15	91.13.1	91.13.1_28									
										3	5,55	6,15	91.13.6	91.13.6_3									
<b>DENGUE</b> (Profilo intero anticorpi) <b>NO centri periferici</b> DENGUE IgG DENGUE IgM DENGUE Antigene NS1 DENGUE IgG – Conferma DENGUE IgM – Conferma DENGUE RNA (sangue) DENGUE RNA (urina)	<b>DENGE</b>  DEN DEM DENAG DENC DEMC DENP DENU	SCDEN	780	Legnago	Sr	ROSSO grande	Indirizzare il pz in segreteria del Laboratorio San Bonifacio. Compilare allegato per le ARBOVIROSI (Modulo) NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914		Centrifugare, aliquotare e congelare se spedito oltre le 72 ore	7													
												4,65	5,15	91.13.1	91.13.1_27								
												4,65	5,15	91.13.1	91.13.1_28								
												5,55	6,15	91.13.6	91.13.6_3								
				ARBPD	749	Padova	Sr	BLU grande					4,65	5,15	91.13.1	91.13.1_27							
				ARBPD	888		PI	2 lilla piccola					4,65	5,15	91.13.1	91.13.1_28							
				U-ARB	854		Ur	U-ROSSO					51	56,1	91.12.B	91.12.B_13							
											51	56,1	91.12.B	91.12.B_14									
Depakin (vedi <b>VALPROICO acido</b> )	<b>VALPR</b>										12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_2	mg/L								
DESMOGLEINA (vedi <b>CUTE</b> )	<b>CUTE</b>																						
DHEA-S: deidroepiandrosterone solfato	<b>DHEAS</b>	MAGLU	346	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 ( <b>CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata</b> )	7	13,60	15,00	90.17.2	90.17.2_0	µg/dL								

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
<i>DICLOROMETANO</i> Il paziente <b>ESTERNO</b> deve rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Il paziente deve rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
DIFTERITE (anticorpi)	<b>ABDIF</b>	ABDIF	875	Legnago	Sr	ROSSO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	30	10,50	11,55	91.08.A	91.08.A_0	UI/mL
DIGOSSINA	<b>DIG</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola		Prelievo consigliato dopo 6 ore dall'ultima dose di farmaco		5	12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_31	µg/L
Diidrotestosterone (vedi <b>TESTOSTERONE TOTALE</b> )	<b>TESTO</b>														
DISTROFIA MUSCOLARE (ricerca mutaz. in Biol.Molec.)	<b>DISTR</b>	BIOLM	221	BR	Sg	VIOLA grande	<b>Modulo</b>	<b>Compilare Modulo</b>		40	50,10	55,15	91.29.3	91.29.3_0	
ANTICORPI ANTI DNA	<b>ABDNA</b>	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				7	10,50	11,55	90.48.3	90.48.3_2	
<b>DPYD MUTAZIONE</b> Richiedibile <b>SOLO</b> da Oncologia SB <b>INDIRIZZARE IL PAZIENTE IN SEGRETERIA</b> MUTAZ. DPYD 1 RICERCA MUTAZ. DPYD RICERCA MUTAZ. DPYD MUTAZ. DPYD ESTRAZ.	<b>DPYD</b>														
	DPYD0	DPYD	617	Padova		VIOLA grande	<b>Nel buono mettere Timbro per la spedizione risposta all'ONCOLOGIA</b>	<b>INDIRIZZARE IL PAZIENTE IN SEGRETERIA. Richiesto SOLO da oncologia SB Parte il Giovedì</b>	Frigorifero n. 3 in sacchetto con buono di spedizione <b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>	7	250	275	G3.03	G3.03_5	
	DPYD1														
	DPYD2														
	DPYD3														
DROGHE profilo completo	<b>DROG</b>														
	OPPI3	DAU	040	SB	Ur	U-ARANCIO		Comprende i metaboliti di: cocaina, amfetamine, cannabinoidi, oppiacei, metadone. MDMA Richieder sempre creatinuria							
	COCA3														
	AMFE3														
	MDMA3														
	CANN3														
	META3														
	CREA5														
DSG1 DSG3 (vedi <b>CUTE</b> )	<b>CUTE</b>														
DUO TEST <b>Esame inserito SOLO da Segreteria</b>	<b>DUO</b>	DUOT.	768	Legnago	Sr	OCRA grande			2 Provette per ogni paziente (una da spedire , una da conservare a -20°)	7	20,80	22,90	90.17.6	90.17.6_2	
EBV DNA SANGUE (vedi EPSTEIN BARR VIRUS)	<b>SEBV</b>							<b>no di sabato</b>							
ECHINOCOCCO anticorpi Western Blot	<b>ECHAB</b>	ECHIN	472	BTm	Sr	bianca piccola		<b>Borgo Trento esegue SOLO il BLOT</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	32,05	35,3	91.13.2	91.13.2_4	NTU
ECHOVIRUS anticorpi (vedi <b>ENTEROVIRUS anticorpi</b> )	<b>ENTER</b>														
ECP (PROT.CATIONICA EOSIN)		ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		<b>Non Richiedibile</b>		10	14,45	15,9	90.68.5	90.68.5_2	ng/mL
<i>EGFR gene mutazione</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>								Richiesta per Anatomia Patologica						
ELASTASI FECALE (feci)	<b>ELA</b>	ELA	439	Synlab	Feci	Vasetto sterile		Basta una noce di feci	Campione frigorifero n°3 MASSIMO PER 7 GIORNI	10	7,60	8,40	90.17.D	90.17.D_0	µg/g di feci
ELETTROFORESI PROTEICA	<b>ETF</b>	ETF CHIMM	043 064	SB	Sr	2 rosa piccola		vengono eseguite anche proteine totali		10	6,85	7,55	90.38.4	90.38.4_0	
ELETTROFORESI URINARIA	<b>UETF</b>	U-BJ	044	SB	Ur	U-VERDE		Un campione urine 1a minzione	1 goccia di Na azide nelle urine	10	4,10	4,55	90.39.1	90.39.1_0	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
ELETTROLITI plasmatici (Na,K,Cl)	ELENAKCL	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola									
ELETTROLITI urine (Na, K, Cl)	ELEU	ChUrine	902	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO					1,10	1,25	90.40.4	90.40.4_4	
	UNA24														
	UK24														
	UCL24												mmol/24h		
DIU	DIUcc	017													
<b>EMOCOLTURA X 1 (solo per interni)</b>	<b>SMI1</b>			SB	Mb	2 Flacone emocoltura		NELLA STESSA RICHIESTA NON RICHIEDERE EMOCOLTURA DA CATETERE		7					
EMOCOLTURA AEROBI 1° campione	SMIA1	AER1°	523									25,95	28,55	90.94.1	90.94.1_3
EMOCOLTURA ANAEROBI 1° campione	SMIN1	ANA1°	553												
<b>EMOCOLTURA X 2 (solo per interni)</b>	<b>SMI2</b>			SB	Mb	4 Flacone emocoltura		NELLA STESSA RICHIESTA NON RICHIEDERE EMOCOLTURA DA CATETERE		7					
EMOCOLTURA AEROBI 1° campione	SMIA1	AER1°	523									25,95	28,55	90.94.1	90.94.1_3
EMOCOLTURA ANAEROBI 1° campione	SMIN1	ANA1°	553												
EMOCOLTURA AEROBI 2° campione	SMIA2	AER2°	524									25,95	28,55	90.94.1	90.94.1_4
EMOCOLTURA ANAEROBI 2° campione	SMIN2	ANA2°	554												
<b>EMOCOLTURA X 3 (solo per interni)</b>	<b>SMI3</b>			SB	Mb	6 Flacone emocoltura		NELLA STESSA RICHIESTA NON RICHIEDERE EMOCOLTURA DA CATETERE		7					
EMOCOLTURA AEROBI 1° campione	SMIA1	AER1°	523									25,95	28,55	90.94.1	90.94.1_3
EMOCOLTURA ANAEROBI 1° campione	SMIN1	ANA1°	553												
EMOCOLTURA AEROBI 2° campione	SMIA2	AER2°	524									25,95	28,55	90.94.1	90.94.1_4
EMOCOLTURA ANAEROBI 2° campione	SMIN2	ANA2°	554												
EMOCOLTURA AEROBI 3° campione	SMIA3	AER3°	525									25,95	28,55	90.94.1	90.94.1_5
EMOCOLTURA ANAEROBI 3° campione	SMIN3	ANA3°	555												
<b>EMOCOLTURA DA CATETERE (solo per interni)</b>	<b>SMIC</b>			SB	Mb	2 Flacone emocoltura		SE RICHIESTA EMOCOLTURA DA CATETERE INSIEME AD ALTRE EMOCOLTURE FARE DUE ACCETTAZIONI DIVERSE!!!!!!		7					
EMOCOLTURA DA CATETERE AEROBIO	SMICA	AER1°	523									25,95	28,55	90.94.1	90.94.1_6
EMOCOLTURA DA CATETERE ANAEROBIO	SMICN	ANA1°	553												
<b>EMOCOLTURA PEDIATRICA 1° campione (solo per interni)</b>	<b>SMIPE</b>	SMIPE	970	Legnago	Mb	Flacone emocoltura				3	25,95	28,55	90.94.1	90.94.1_8	
EMOCROMATOSI (ricerca mutazioni genetiche in biologia molecolare)	<b>EMOCR</b>			Legnago	Sg	VIOLA grande	+ Modulo	+ Modulo		20					
MUTAZIONE EMOCROMATOSI C282Y	EMOC1	MUTAZ	750									150	165	G1.91	G1.91_8
MUTAZIONE EMOCROMATOSI H63D	EMOC2														
MUTAZIONE EMOCROMATOSI S65C	EMOC3														
EMOCROMO SENZA FORMULA	<b>EU</b>	<b>EFVES</b>	001	SB	Sg	lilla piccola				2	4,1	4,55	90.62.2	90.62.2_2	
EMOCROMO a caldo (37 °C) NO Centri Prelievo periferici	<b>EF</b>	<b>EFVES</b>	001	SB	Sg	lilla piccola		Eseguibile solamente nella sede di San Bonifacio	Consegnare il prima possibile in settore Ematologia	2	4,10	4,55	90.62.2	90.62.2_2	
EMOCROMO CON FORMULA	<b>EF</b>	<b>EFVES</b>	001	SB	Sg	lilla piccola				2	4,10	4,55	90.62.2	90.62.2_2	
EMOCROMO in Sodio Citrato (tappo azzurro) (comprende sempre l'emocromo in EDTA, cod EF)	<b>EFC</b>	<b>EFC EFVES</b>	110 001	SB	Sg	azzurra piccola lilla piccola		mettere in un sacchettino le 2 provette , scrivere ATTENZIONE Emocromo in Sodio Citrato		2	4,10	4,55	90.62.2	90.62.2_3	
											4,10	4,55	90.62.2	90.62.2_2	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
EMOGASANALISI ARTERIOSA NO Centri Prelievi periferici	ALEGA	*AEGA	041	SB	Sg	*Sir.eparinata	A freddo	Consegnare campione in Laboratorio entro 20 minuti NON ESEGUIBILE DA ADI		1	14,8	16,3	89.65.1	89.65.1_2	
EMOGASANALISI VENOSA NO Centri Prelievi periferici	VLEGA	*VEGA	042	SB	Sg	*Sir.eparinata	A freddo	Consegnare campione in Laboratorio entro 20 minuti ESEGUIBILE DA ADI		1	20,1	22,15	89.66	89.66_2	
EMOGLOBINA GLICATA (HbA1C)	HBG	HBG	920	Legnago	Sg	viola piccola				3	9,35	10,30	90.28.1	90.28.1_0	mmol/mol
EMORRAGIA (Tempo di) (vedi PFA100)	PFA							(comprende anche EF)							
ENA (Anticorpi anti nucleo estraibili)	EN	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				7	10,95	12,05	90.47.3	90.47.3_0	
ENA CENP-B(Anti Centromero)	EN10	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				8	19,85	21,85	90.47.F	90.47.F_0	
ENDOMISIO (Esame di 2° Livello - vedi TTG + IMM52)	AENDO- AEND2	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande		Esame di 2° livello - Si esegue se TTGA positiva		8	6,4	7,05	90.47.E	90.47.E_0	
ENOLASI NEURONE SPECIFICA (vedi NSE)	NSE														
ENTAMOEBIA HISTOLYTICA antigeni (FECI)	HIST	VIRUS	392	Legnago	Feci	Vasetto sterile			Campione frigorifero n°3	2	22,9	25,2	90.92.7	90.92.7_0	
ENTAMOEBIA HISTOLYTICA anticorpi (Vedi Ameba Anticorpi)	AMEB														
ENTEROVIRUS anticorpi	ENTER														
ECHOVIRUS anticorpi IgG	ECHO	ENTEV	705	BTm	Sr	2 bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	98	108,8	91.16.D	91.16.D_4	
ECHOVIRUS anticorpi IgM	ECHO														
COXSACKIE VIRUS anticorpi IgG	COXG	AACOX	394								98	107,8	91.16.D	91.16.D_3	
COXSACKIE VIRUS anticorpi IgM	COXM										98	107,8	91.16.D	91.16.D_2	
ENTEROVIRUS ricerca in PCR	NOCOD														
N.B. SOLO PER INTERNI															
EOSINOFILI Proteina cationica (vedi ECP)	ECP	ALLERG	265					Non Richiedibile							
EPATITE A	HAV														
Anticorpi totali	HAVAB	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande		Si eseguono anticorpi totali Altrimenti con codici CVP appositi si possono richiedere separatamente IgG e IgM se si sospetta una infezione acuta (secondo circolare ministeriale n°224903 del 28/05/2013)	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	9,70	10,70	91.17.6	91.17.6_2	
Anticorpi IgM	HAVM									3	9,70	10,70	91.17.6	91.17.6_3	
EPATITE B: determinazione qualitativa degli anticorpi contro l'antigene di superficie	HBSAB	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	9,7	10,7	91.18.3	91.18.3_0	mU/mL
EPATITE B (HBV REFLEX) comprende HBSAG-HBSAB-HBCAB con impegnativa dal 30/12/2024	HBVR	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	26,20	28,85	91.18.6	91.18.6_0	
EPATITE B: determinazione qualitativa degli anticorpi anti envelope E del virus	HBEAB	VIROL	420	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	9,7	10,7	91.18.2	91.18.2_0	
EPATITE B: determinazione qualitativa degli anticorpi IgM verso l'antigene core - con impegnativa fino al 29/12/2024	HBCM	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande		IMP.VE DAL 30/12/24 UTILIZZARE SOLO HBVR	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	26,2	28,85	91.18.6	91.18.6_0	
EPATITE B: determinazione qualitativa degli anticorpi IgM verso l'antigene core - con impegnativa dal 30/12/2024 - HBCM(HBCAB) SOLO COMPRESO IN HBVR	HBVR	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	26,2	28,85	91.18.6	91.18.6_0	
EPATITE B: determinazione qualitativa degli anticorpi verso l'antigene core totali - con impegnativa fino al 29/12/2024	HBCAB	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande		IMP.VE DAL 30/12/24 UTILIZZARE SOLO HBVR	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	9,70	10,70	91.17.5	91.17.5_0	
EPATITE B: determinazione qualitativa degli anticorpi verso l'antigene core totali - HBCAB con impegnativa dal 30/12/2024 HBCAB SOLO COMPRESO IN HBVR	HBVR	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	9,70	10,70	91.17.5	91.17.5_0	
EPATITE B: determinazione qualitativa dell'antigene di superficie dell'epatite B	HBSAG	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	9,7	10,7	91.18.5	91.18.5_0	
EPATITE B: determinazione qualitativa dell'antigene di superficie dell'epatite B URGENTE SOLO PER INTERNI	HBVU	VIROL	803	SB	Sr	rossa piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	9,7	10,7	91.18.5	91.18.5_0	
EPATITE B: determinazione qualitativa dell'antigene E del virus	HBEAG	VIROL	420	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	9,7	10,7	91.18.4	91.18.4_0	index
EPATITE C: determinazione qualitativa degli anticorpi totali	HCV HCVAB	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	9,70	10,70	91.19.5	91.19.5_0	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di referenziazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
<b>EPATITE C: determinazione qualitativa degli anticorpi totali URGENTE SOLO PER INTERNI</b>	<b>HCVU</b>	VIROL	803	SB	Sr	rossa piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	9,70	10,70	91.19.5	91.19.5_0	
ERITROPOIETINA	ERPOI	CHIMM	989	Legnago	Sr	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	9	15,55	17,11	90.18.5	90.18.5_0	mU/mL
<b>EPSTEIN BARR VIRUS (anticorpi anti-monucleosi)</b>	<b>EBV</b>							<b>Se viene richiesto solo uno dei test, avvisare il paziente della necessità di completare il profilo e che in questo caso gli esami aggiuntivi potrebbero essere a pagamento. Eventualmente contattare la Segreteria di San Bonifacio</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7					
EBV anticorpi IgG	EBVG	SIERL	294	Legnago	Sr	ROSSO grande					11,9	13,1	91.21.6	91.21.6_0	
EBV anticorpi IgM	EBVM										11,9	13,1	91.21.6	91.21.6_0	
EBV EBNA anticorpi IgG	EBNAG										11,9	13,1	91.21.6	91.21.6_0	
EPSTEIN BARR VIRUS (Metodo PCR)	SEBV	SEBV	408	Legnago	Sg	VIOLA grande		<b>no sabato</b>	Provetta frigorifero n°3	15	46,1	50,75	91.21.D	91.21.D_2	IU/mL
<b>EMOSIDERINA urine</b> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BR	Ur 1minz	U-VERDE			Chiamare BR per info						
<b>ESANEDIONE 2-5</b> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
<b>ESANO</b> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
EPARINA anticorpi	PF4	APIAS	430	BTct	Sr			<b>Sospendere Eparina almeno 48h prima. Solo su appuntamento al ct BT tel. 045 8122149 Allegare modulo dedicato</b>	<b>Stesse modalità esame APIAS Il prelievo deve arrivare a B.Trento entro le ore 9,30 SOLO il GIOVEDI'</b>	20	37,50	41,50	90.53.7	90.53.7_3	
<b>EPARINA dosaggio</b> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>EPAR</b>	EPAR	568	BR	PI	azzurra piccola		<b>Accordo con laboratorio BR tel. 045 8124516</b>		9	9,70	10,70	90.63.1	90.63.1_2	
ESTERASI INIBITORE (vedi C1 inibitore)	C1INB										5,45	6	90.60.1	90.60.1_0	
ESTRADIOLO (17 beta OH) (E2)	ESTR	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	11,5	12,65	90.19.2	90.19.2_2	ng/L
ETOSUCCIMIDE	ETOS	ETOS	122	Br	Sr	verde piccola (LiEpG)			Centrifugare, aliquotare, congelare a -20°	7	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_7	mg/L
EVEROLIMUS (Certican)	EVERO	EVERO	962	BT	Sg	viola piccola			Se non si può inviare in giornata conservare nel frigorifero n°3 B T 045 8123207 <b>(non centrifugare)</b>	7	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_28	µg/L
FALCIZZAZIONE test Esame di 2° Livello - Inserito direttamente dal Laboratorio	FALC	ASST	913	Legnago	Sg	viola piccola		Viene eseguito in base ai valori dell'esame ASSET		7	7,75	8,55	90.66.7	90.66.7_3	
FARLEY test di <b>No centri prelievi Periferici</b>	FAR	FAR	077	SB	Ur	U-VERDE		<b>Deve arrivare in laboratorio entro 30' dalla minzione (Secondo campione del mattino, a vescica vuota da 3-4 ore, raccolto da mitto intermedio dopo accurata pulizia dei genitali)</b>		2	2,65	2,95	90.43.8	90.43.8_2	%
FATTORE II <b>Diverso da ricerca MUTAZIONE FATTORE II</b>	FII	FATT	268	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. 20°	15	12,65	13,95	90.64.3	90.64.3_2	%
FATTORE V <b>Diverso da ricerca MUTAZIONE FATTORE V</b>	FV	FATT	268	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. 20°	15	12,65	13,95	90.64.3	90.64.3_3	%
FATTORE VII	FVII	FATT	268	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. 20°	15	12,65	13,95	90.64.3	90.64.3_4	%

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
FATTORE VIII	FVIII	FATT	268	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. 20°	15	12,65	13,95	90.64.3	90.64.3_5	%
FATTORE IX	FIX	FATT	268	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. 20°	15	12,65	13,95	90.64.3	90.64.3_6	%
FATTORE X	FX	FATT	268	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. 20°	15	12,65	13,95	90.64.3	90.64.3_7	%
FATTORE XI	FXI	FATT	268	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. 20°	15	12,65	13,95	90.64.3	90.64.3_8	%
FATTORE XII	FXII	FATT	268	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. 20°	15	12,65	13,95	90.64.3	90.64.3_9	%
FATTORE XIII	FXIII	FATT	268	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. 20°	15	12,65	13,95	90.64.3	90.64.3_10	%
<b>FATTORE VON WILLEBRAND</b>	<b>FVWIL</b>														
FATTORE vWILLEBRAND (antigene)	VWANT	FATT	268	Legnago	PI	azzurra piccola		Automaticamente viene richiesto anche il Cofattore Ristocetinico e fattore VIII	Centrifugare, separare subito il plasma e congelare cong. 20°				90.64.1		
COFATTORE RISTOCETINICO	RICO									6	10,35	11,4	90.59.5	90.59.5_0	%
FVIII	FVIII									15	12,65	13,95	90.64.3	90.64.3_5	%
FATTORE INTRINSECO (anticorpi)	AFI	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				10	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_9	UA/mL
FATTORE NATRIURETICO ATRIALE (vedi BNP)	<b>BNP</b>										12,55	13,85	90.36.6	90.36.6_0	
FATTORE REUMATOIDE	RF	CHIMM	989	Legnago	Sr	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	4,2	4,65	90.64.2	90.64.2_0	UI/mL
FATTORE V di LEIDEN (vedi MUTAZIONE FATTORE V)	<b>LEID</b>										150	165	G1.91	G1.91_3	
<b>FENILALANINA</b> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>								Si esegue a PD: malattie metaboliche TELEFONARE PER INFO						
<b>FENILGLIOSSILICO ACIDO</b> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>								Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295						
FENITOINA (dintoina)	FENIT	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				6	12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_32	mg/L
FENOBARBITAL (gardenale)	FENOB	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				6	12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_42	mg/L
Fenotipo RH <b>RICHIEDERE GRUPPO COMPLETO</b>	<b>GRH/GRHC</b>	GRH	266	SBct	PI	FUCSIA grande		<b>Firmare la provetta</b>		3	5,9	6,5	90.63.2	90.63.2_0	
Fenotipo RH <b>FUNICOLO RICHIEDERE GRUPPO COMPLETO</b>	<b>GRHF</b>	GRH	266	SBct	PI	FUCSIA grande		<b>Firmare la provetta</b>		3	5,9	6,5	90.63.2	90.63.2_0	
FERRITINA	FERRI	CHIMM	989	Legnago	Sr	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	2	11,5	12,65	90.22.3	90.22.3_0	µg/L
FERRO	FE	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	2,3	2,55	90.22.5	90.22.5_2	µg/dL
FIBRINOGENO	FIBR	COAG	300	SB	PI	azzurra piccola				2	1,75	1,95	90.64.6	90.64.6_0	mg/dL
FIBROSI CISTICA (vedi CFTR Mutazione gene fibrosicistica) a Borgo Roma solo con Cariotipo <b>solo su prenotazione in Agenda Specifica di Legnago</b>	<b>FIBRO</b>	FIBRO	751	Br	Sg	VIOLA grande		<b>ESAME SU APPUNTAMENTO VEDI MUTAZIONE CFTR</b>	<b>NON CENTRIFUGARE</b> , si può spedire il giorno successivo Provetta frigorifero n°3	30	450	495	G1.01	G1.01_7	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
<i>FLUORO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
FK-506 ( TRACOLIMUS)	<b>FK506</b>	FK	121	SB	Sg	viola piccola			NON CENTRIFUGARE	5	12,05	13,30	90.17.B	90.17.B_26	µg/L
<i>FORMAMMIDE MONOMETIL</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
FOLATI (acido folico)	<b>FOLAT</b>	CHIMM	989	Legnago	Sr	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	2	8,05	8,90	90.23.2	90.23.2_2	µg/L
FOSFATASI ALCALINA (ALP)	<b>ALP</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	2,30	2,55	90.23.5	90.23.5_0	U/L
FOSFATASI ALCALINA OSSEA	<b>FAO</b>	CHIMM	989	Legnago	Sr	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	5	9,30	10,25	90.24.1	90.24.1_0	µg/L
FOSFOLIPIDI Anticorpi (sostituito con APS Anticorpi anti-fosfolipidi ACCORPAMENTO)	<b>APS</b>														
FOSFORO	<b>P</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	1,4	1,55	90.24.3	90.24.3_2	mg/dL
FOSFORO 2° minzione (Vedi CALCIO e FOSFORO su urine 2 minzione)	<b>UCAP2</b>														
FOSFORO urine	<b>PU</b> UP24 DIUAC	<b>ACIDO</b> DIUAC	919 848	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO				2	1,40	1,55	90.24.3.4	90.24.3_4	mg/24h
FRANCISELLA TULARENSIS								<b>Non richiedibile</b>							
FSH	<b>FSH</b>	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	11,50	12,65	90.23.3	90.23.3_2	
FT3 (triiodotironina libera)	<b>FT3</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	11,50	12,65	90.43.3	90.43.3_0	pmol/L
FT4 (tiroxina libera)	<b>FT4</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	11,50	12,65	90.42.3	90.42.3_0	pmol/L
G6PD (glucosio 6 fosfato deidrogenasi) <b>NO venerdì NO Sabato NO i gg precedenti le festività</b>	<b>G6PD</b>	G6PD	587	BR	Sg	verde scuro piccola (no gel)		<b>NO venerdì NO Sabato NO i gg precedenti le festività</b> <b>PREFERIBILMENTE entro h7.30</b> <b>*Eseguire il prelievo a distanza dalla crisi emolitica*</b>	<b>Preferibilmente sangue fresco.</b> Provetta frigorifero n°3 (non centrifugare) Se campione arriva in ritardo tenere provetta senza centrifugare in frigorifero ed inviarla il gg successivo	7	8,25	9,10	90.27.2	90.27.2_0	U/gr Hb
GADA Anticorpi anti Decarbossilasi acido glutammico	<b>GADA</b>	DIAB	220	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare, cong n° 5 -20°	10	9,60	10,60	90.49.7	90.49.7_0	U/mL
GALATTOMANNANO su siero (aspergillus)	<b>GALAT</b>	MICE	433	Legnago	Sr	ROSSO grande			Provetta frigorifero n°3	10	22,3	24,55	90.97.6	90.97.6_3	index
GALATTOMANNANOsu bronco aspirato	<b>GALAB</b>	GALAB	471	Legnago	Mb	Vasetto sterile			Provetta frigorifero n°3	0	22,3	24,55	90.85.3	90.85.3_8	
GASTRINA	<b>GA</b>	MAGLU	346	Legnago	Sr	ruggine piccola		<b>Evitare l'alcol nelle 24 ore precedenti. Richiesta anche la sospensione dell'assunzione di alcuni farmaci per alcuni giorni prima del prelievo. Tra questi, i farmaci antiacidi, in grado di aumentare i livelli di gastrina, gli antagonisti del recettore H2 (come la cimetidina) e gli inibitori di pompa protonica (come l'omeprazolo).</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 ( <b>CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata</b> )	7	10,25	11,30	90.26.1	90.26.1_2	pmol/L
GANGLIOSIDI o anticorpi GANGLI su siero Ab Anti Gangliosidi Ab Anti Gangliosidi	<b>SGAN</b>  SGAN1 SGAN2	SGAN  MAG	511  419	BRnp	Sr	ruggine piccola  ruggine piccola		<b>Screening comprende: Ab anti- GM1; Ab anti- GM2; Ab anti-GD1a; Ab anti-GD1b; Ab anti-GQ1b; Ab anti-MAG</b>	Centrifugare, sierare e congelare -20° Neuropatologia BR tel.0458124461-4286	8	19,85 19,85	21,8 21,8	90.52.5 90.52.5	MULTIPLI _47 E _48	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura	
GANGLIOSIDI o anticorpi GANGLI su Liquor L-Ab AntiGangliosidi L-Ab AntiGangliosidi	<b>LGAN</b>	SGAN	511	BRnp	Sr	ruggine piccola		Screening comprende: Ab anti- GM1; Ab anti- GM2; Ab anti-GD1a; Ab anti-GD1b; Ab anti-GQ1b		8						
	LGAN1															
	LGAN2	LGAN	544	Liquor	BIANCA dedicata											
<b>GASTROENTERITI DNA (SOLO PER INTERNI)</b>	<b>GASTR</b>	GASTR	858	MB Legnago	Feci	Tappo Verde				7						
<b>GENETICA CARDIOVASCOLARE DEL PROBANDO</b> ANALISI GENETICA PER MALATTIE GENETICHE RIARRANG.GENTICA MLPA	<b>GCPRO</b>							si esegue di Mercoledì previa prenotazione in segreteria del Laboratorio di San Bonifacio <b>SOLO CON IMPEGNATIVE DI CARDIOLOGIA</b>	Si invia il Giovedì. Conservare a +4° e inviato entro 48h dal prelievo.	90			G1.3190	G1.3190_2		
	GECA1	GECAR	715	Pdgen	sg	lilla piccola						1550	----	G2.08	G2.08_3	
	GECA2											300				
<b>GENETICA CARDIOVASCOLARE DEL FAMILIARE</b> RIARRANG.GENTICA MLPA	<b>GCFAM</b>							si esegue di Mercoledì previa prenotazione in segreteria del Laboratorio di San Bonifacio <b>SOLO CON IMPEGNATIVE DI CARDIOLOGIA</b>	Si invia il Giovedì. Conservare a +4° e inviato entro 48h dal prelievo.	90			G1.91	G1.91_2		
	GECA3	GECAR	715	Pdgen	sg	lilla piccola	150									
GENTAMICINA	<b>GENTA</b>	GENTA	591	BR	Sr	ruggine piccola		<b>NB</b> Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Borgo Roma	Centrifugare, sierare provetta frigorifero n°3 fino a 4 gg altrimenti congelare	5	12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_25		
GENTAMICINA POST DOSE								<b>Non eseguibile</b>								
GGT (gamma glutamil transpeptidasi)	<b>GGT</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				4	2,30	2,55	90.25.5	90.25.5_2	U/L	
GH (VEDI Somatotropina ormone)	<b>GH</b>															
GIARDIA (FECI)	<b>GIARD</b>	GIARD	311	Legnago	Feci	Vasetto sterile			Campione frigorifero n°3	3	19,75	21,75	90.94.7	90.94.7_0		
GLIADINA deamidata anticorpi	<b>AGA</b>	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande		<b>ESAME SECONDO LIVELLO</b>		7	10,1	11,15	90.49.5	90.49.5_0	CU	
GLUCOSIO urine	<b>GLUU</b> UGL24 DIU	ChUrine DIUcc	902 017	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO				2	1,35	1,50	90.27.1	90.27.1_3	g/24h	
GLUCOSIO	<b>GLU</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	1,35	1,50	90.27.1	90.27.1_2	mg/dL	
<b>GLUCAGONE</b> Indirizzare i pazienti <b>ESTERNI</b> a PD N.B. <b>SOLO PER INTERNI</b>	<b>NO COD</b>							B. Trento non lo esegue più	Viene fatto in laboratorio centrale a PD <b>NB</b> Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914							
GLUCOSIO in L-L acetato (SOLO PER DOMICILIARI E CDR)	<b>GLUGG</b>	GLGG	908	SB	PI	grigia piccola			L' anticoagulante L-L acetato mantiene il valore del glucosio nel campione stabile per 3 giorni	2	1,35	1,50	90.27.1	90.27.1_2	mg/dL	
<b>GRANULOCITI anticorpi</b> I pazienti <b>ESTERNI</b> devono rivolgersi personalmente a BTct N.B. <b>SOLO PER INTERNI</b>	<b>NO COD</b>							Previo appuntamento a BT ct Tel. 045 8122149								
<b>GRUPPO SANGUIGNO + FATTORE RH</b> GRUPPO ABO FATTORE RH	<b>GRH</b> GRH0 GRRH	GRH	266	SBct	Sg	2 FUCSIA grande		<b>Firmare la provetta</b>		3	6,85	7,55	90.65.3	90.65.3_2		
<b>GRUPPO SANGUIGNO + FATTORE RH + FENOTIPO RH + Kell + COOMBS indiretto</b> GRUPPO ABO FATTORE RH FENOTIPO RH KELL COOMBS INDIRETTO	<b>GRHC</b> GRH0 GRRH GRH3 KELL TCIO	GRH	266	SBct	Sg	2 FUCSIA grande		<b>Firmare le provette</b>		3	6,85	7,55	90.65.3	90.65.3_2		
										4	9,35	10,3	90.64.4	90.64.4_0		
											5,9	6,5	90.63.2	90.63.2_0		
											8,25	9,1	90.49.3	90.49.3_0		
<b>GRUPPO SANGUIGNO FUNICOLO + FATTORE RH + FENOTIPO RH funicolo + COOMBS diretto</b> gruppo funicolo fattore Rh funicolo Coombs diretto funicolo	<b>GRHF</b> GRH0F GRRHF TCDOF	GRH	266	SBct	Sg	2 FUCSIA grande		<b>Firmare la provetta</b>		3	6,85	7,55	90.65.3	90.65.3_3		
											6,1	6,75	90.58.2	90.58.2_0		
<b>H1N1 virus influenza suina</b>	<b>TH1N1</b>							<b>non richiedibile</b>		15						

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
H63D (vedi EMOCROMATOSI)	<b>EMOCR</b>														
HBV DNA QUANTITATIVO (carica virale) <b>NON SI ESEGUE QUALITATIVO</b>	<b>QHBV</b>	Q-HBV	363	Legnago	PI	BIANCA grande		<b>ATTENZIONE! La provetta BIANCA grande non può essere sostituita con la provetta bianca piccola!</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° IL SABATO)	15	41,85	46,05	91.16.B	91.16.B_0	UI/mL
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B (anticorpi)	<b>HAEMO</b>	HAEMO	616	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_2	mg/L
HCG (totale + beta)	<b>HCG</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola		In accettazione indicare se in gravidanza (1) o non in gravidanza. (0)	Se donna in età fertile indicare mese di gravidanza 1 se non si conosce. Se uomo o donna NON in età fertili indicare come mese di gravidanza 0 (zero). Importante perché cambiano i valori di riferimento	2	12,60	13,90	90.27.5	90.27.5_2	UI/L
HCV GENOTIPO (tipizzazione genomica)	<b>GHCV</b>	Q-HCV	364	Legnago	PI	BIANCA grande		<b>ATTENZIONE! La provetta BIANCA grande non può essere sostituita con la provetta bianca piccola!</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° IL SABATO)	15	68,35	75,20	91.20.2	91.20.2_0	
HCV RNA quantitativo (carica virale)	<b>QHCV</b>	Q-HCV	364	Legnago	PI	BIANCA grande		<b>ATTENZIONE! La provetta BIANCA grande non può essere sostituita con la provetta bianca piccola!</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° IL SABATO)	15	68,35	75,20	91.19.4	91.19.4_0	UI/mL
HDL-COLESTEROLO	<b>HDL</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	2,75	3,05	90.14.1	90.14.1_0	mg/dL
HDV Antigene (Epatite Delta - HDVAg)	<b>HDVAG</b>	HDVAG	105	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	6	15,85	17,45	91.20.5	91.20.5_0	
HDVT+HDVP(anticorpi totali e RNA)	<b>HDV</b>														
HDV anticorpi totali(epatite delta anticorpi)	<b>HDVT</b>	HDVAB	473	BTm	Sr	bianca piccola		Se HBSAg non reattivo inserire commento " Non si esegue data la non reattività del test HBSAg"		10	10,65	11,80	91.20.7	91.20.7_2	
HDV delta RNA (epatite delta antigene) attivo da Gennaio 2024	<b>HDVP</b>	HDVRN	452	BTm	Sg	VIOLA grande		Se HBSAg non reattivo inserire commento " Non si esegue data la non reattività del test HBSAg"	Provetta frigorifero n°3	15	51	56,1	91.12.B	91.12.B_2	
HE4	<b>HE4</b>	HE4	861	BR	Sr	ruggine piccola				10	20,6	22,7	90.56.A	90.56.A_0	picoM/L
HELICOBACTER PYLORI (anticorpi)	<b>AHP</b>	SIERL	294	Legnago	Sr	ROSSO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	29,3	32,25	90.84.8	90.84.8_4	
HELICOBACTER PYLORI antigene (feci)	<b>HELIC</b>	HELIC	386	Legnago	Feci	Vasetto sterile			Campione frigorifero n°3	3	4,6	5,1	90.94.C	90.94.C_0	Gli anticorpi si mandano dunque a BTm
HERPES ZOSTER vedi VARICELLA ZOSTER Ab	<b>VZV</b>														
HERPES VIRUS (anticorpi) HERPES SIMPLEX: ricerca anticorpi IgG 1 ricerca anticorpi IgG 2 ricerca anticorpi IgM 1+2	<b>HSV</b>	HSV1G HSV2G HSVM	SIER2 874	Legnago	Sr	ROSSO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7 7 7	9,70 9,70 9,70	10,67 10,67 10,67	91.21.B 91.21.B 91.21.B	91.21.B_2 91.21.B_4 91.21.B_3	index index index
HERPES SIMPLEX coltura								<b>Non richiedibile</b>							
HERPES SIMPLEX ricerca nel sangue con metodo PCR  N.B. SOLO PER INTERNI (vedi MENCE)	<b>NO COD</b>			BRm	Sg K2EDTA/ Liquor/ Vescicole			Esame di 2° livello contattare il laboratorio BRm tel. 0458124720	La ricerca può essere effettuata su sangue intero oppure su liquor o sul liquido delle vescicole.						

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
HEV IgG/IgM (EpatiteE)	HEV	HEV	545	BTm	Sr	OCRA grande		Inserire numero telefonico del medico richiedente( verrà contattato per fornire dati anamnestici del paziente). Tel. Az. Osp. 045-8122394 / 3305	Stabile fino a 72h in frigo , poi congelare.	20	12,25	13,5	91.20.6	91.20.6_2	
HEV RNA (Epatite E RNA)	HEVRN	HEVRN	958	PDm	PI	VIOLA grande			Centrifugare e aliquotare. Spedizione il Giovedì, congelare se inviato dopo le 72 ore	10	51,00	56,10	91.12.B	91.12.B_42	
HFE c282y/ h63d vedi EMOCROMATOSI	EMOCR														
HMGCR anticorpi	HMGCR	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				7	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_2	UA/mL
HIV: determinazione qualitativa di antigeni e anticorpi	HIVAB	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	5	19,2	21,15	91.23.F	91.23.F_0	
HIV: determinazione qualitativa di antigeni e anticorpi <b>URGENTE SOLO PER INTERNI</b>	HIVU	VIROL	803	Sb	Sr	rossa piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	5	19,2	21,15	91.23.F	91.23.F_0	
HIV RNA quantitativo (carica virale) <b>NON SI ESEGUE QUALITATIVO</b>	QHIV	Q-HIV	365	Legnago	PI	BIANCA grande		<b>ATTENZIONE! La provetta BIANCA grande non può essere sostituita, se sprovvisti, con la provetta bianca piccola!</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° IL SABATO)	14	68,35	75,2	91.22.3	91.22.3_0	copie/mL
HIV: anticorpi con metodo Western Blot Esame di 2° Livello - Inserito direttamente dal Laboratorio	WBHIV	WBLOT	282	Legnago	Sr	CEDRO grande		<b>Viene eseguito in base ai valori dell'esame HIV</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	2	32,00	35,2	91.132.2	91.13.2_2	
<b>HLA - RICERCA DQ2/DQ8 CELIACHIA -biologia molecolare NO CENTRI PERIFERICI</b> DQ2 DQ8 AD ALTA RISOLUZIONE HLADQB1 ALTA RISOLUZIONE HLADRB BASSA RISOLUZIONE	DQ2Q8 HLA16 HLA23 HLA31	DQ2Q8	383	btSIT	Sg	VIOLA grande		<b>Allegare Modulo n.1 Solo su APPUNTAMENTO tel.045 8123281 ENTRO LE H 7.30</b>	Campione frigorifero n°3						
										30	157,45	173,20	90.80.2	90.80.2_0	
										30	157,45	173,20	90.80.4	90.80.4_0	
HLA B27 <b>NO CENTRI PERIFERICI</b> Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	HL27	HLB27	391	BTct	Sg	VIOLA grande per i Bambini 1 viola piccola	Entro h 7.30	<b>Allegare Modulo n.1 Solo su APPUNTAMENTO tel.045 8123281 ENTRO LE H 7.30</b>	NON CENTRIFUGARE (conservare eventualmente a T.Ambiente e inviare entro 24h)	8	89,60	98,60	90.78.4	90.78.4_0	
HLA B57 <b>NO CENTRI PERIFERICI</b> Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	HLB57	HLB57	131	BTct	Sg	VIOLA grande	Entro h 7.30	<b>Allegare Modulo n.1 Solo su APPUNTAMENTO tel.045 8123281 ENTRO LE H 7.30</b>	NON CENTRIFUGARE (conservare eventualmente a T.Ambiente e inviare entro 24h)	10	198,65	218,55	90.78.B	90.78.B_0	
HLA - A BASSA RISOLUZIONE <b>NO CENTRI PERIFERICI</b> Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	HLA	HLA	336	BTct	Sg	VIOLA grande	Entro h 7.30	<b>Allegare Modulo n.1 Solo su APPUNTAMENTO tel.045 8123281 ENTRO LE H 7.30</b>	NON CENTRIFUGARE (conservare eventualmente a T.Ambiente e inviare entro 24h)	20	89,60	98,60	90.78.2	90.78.2_0	
HLA - B BASSA RISOLUZIONE <b>NO CENTRI PERIFERICI</b> Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	HLB	HLA	336	BTct	Sg	VIOLA grande	Entro h 7.30	<b>Allegare Modulo n.1 Solo su APPUNTAMENTO tel.045 8123281 ENTRO LE H 7.30</b>	NON CENTRIFUGARE (conservare eventualmente a T.Ambiente e inviare entro 24h)	20	89,60	98,60	90.78.4	90.78.4_0	
HLA - C BASSA RISOLUZIONE <b>NO CENTRI PERIFERICI</b> Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	HLC	HLA	336	BTct	Sg	VIOLA grande	Entro h 7.30	<b>Allegare Modulo n.1 Solo su APPUNTAMENTO tel.045 8123281 ENTRO LE H 7.30</b>	NON CENTRIFUGARE (conservare eventualmente a T.Ambiente e inviare entro 24h)	20	89,60	98,60	90.79.1	90.79.1_0	
HLA DRB1 BASSA RISOLUZIONE <b>NO CENTRI PERIFERICI</b> Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	HLDR	HLA	336	BTct	Sg	VIOLA grande	Entro h 7.30	<b>Allegare Modulo n.1 Solo su APPUNTAMENTO tel.045 8123281 ENTRO LE H 7.30</b>	NON CENTRIFUGARE (conservare eventualmente a T.Ambiente e inviare entro 24h)	20	188,30	207,15	90.81.1	90.81.1_0	
HLA DQB1 BASSA RISOLUZIONE <b>NO CENTRI PERIFERICI</b> Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	HLDQ	HLA	336	BTct	Sg	VIOLA grande	Entro h 7.30	<b>Allegare Modulo n.1 Solo su APPUNTAMENTO tel.045 8123281 ENTRO LE H 7.30</b>	NON CENTRIFUGARE (conservare eventualmente a T.Ambiente e inviare entro 24h)	20	96,35	106	90.80.3	90.80.3_0	
<b>HLA classe I° NO CENTRI PERIFERICI</b> Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	HLCL1								NON CENTRIFUGARE (conservare eventualmente a T.Ambiente e inviare entro 24h)						
HLA - A BASSA RISOLUZIONE	HLA	HLA	336	BTct	Sg	VIOLA grande	Entro h 7,30	<b>Allegare Modulo n.1 Solo su APPUNTAMENTO tel.045 8123281 ENTRO LE H 7.30</b>	NON CENTRIFUGARE (conservare eventualmente a T.Ambiente e inviare entro 24h)	20	89,60	98,60	90.78.2	90.78.2_0	
HLA - B BASSA RISOLUZIONE	HLB										89,60	98,60	90.78.4	90.78.4_0	
HLA - C BASSA RISOLUZIONE	HLC										89,60	98,60	90.79.1	90.79.1_0	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
<b>HLA classe II° NO CENTRI PERIFERICI</b> Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	<b>HLCL2</b>	HLA	336	BTct	Sg	VIOLA grande	Entro h 7,30	<b>Allegare Modulo n.1 Solo su APPUNTAMENTO tel.045 8123281 ENTRO LE H 7.30</b>	NON CENTRIFUGARE (conservare eventualmente a T.Ambiente e inviare entro 24h)	20					
HLA DRB1 BASSA RISOLUZIONE	HLDR										188,30	207,15	90.81.1	90.81.1_0	
HLA DQB1 BASSA RISOLUZIONE	HLDQ										96,35	106	90.80.3	90.80.3_0	
<b>HLA COMPLETO NO CENTRI PERIFERICI</b> Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	<b>HLCL1</b>	HLA	336	BTct	Sg	VIOLA grande	Entro h 7,30	<b>Allegare Modulo n.1 Solo su APPUNTAMENTO tel.045 8123281 ENTRO LE H 7.30</b>	NON CENTRIFUGARE (conservare eventualmente a T.Ambiente e inviare entro 24h)	20					
HLA - A BASSA RISOLUZIONE	HLA										89,60	98,60	90.78.2	90.78.2_0	
HLA - B BASSA RISOLUZIONE	HLB										89,60	98,60	90.78.4	90.78.4_0	
HLA - C BASSA RISOLUZIONE	HLC										89,60	98,60	90.79.1	90.79.1_0	
HLA DRB1 BASSA RISOLUZIONE	HLDR										188,30	207,15	90.81.1	90.81.1_0	
HLA DQB1 BASSA RISOLUZIONE	HLDQ										96,35	106	90.80.3	90.80.3_0	
<b>HNPP fenotipo /CMM</b> N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>			Brnp	Sg		Entro h 7.30 Allegare fotocopia impegnativa	Indicare il sospetto clinico	Trasporto dei campione <b>NON</b> a freddo						
<b>HOMA test</b> *insulina *glucosio	<b>HOMA</b> INSUL GLU	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande		Calcolo Glucosio ed Insulina	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	5	8,5	9,35	90.29.1	90.29.1_2	mlU/L
		CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	1,35	1,50	90.27.1	90.27.1_2	mg/dL
HPV alto richio (ricerca HR-HPV)	<b>HPV40</b>	BIOLM	078	Legnago	MB	ORANGE Tampone				5	72,2	79,45	91.24.9	91.24.9_0	
ICA vedi <b>Insula Pancreatica</b>	<b>ICA</b>										7,55	8,35	90.50.5	90.50.5_0	
<b>IDROSSIPIRENE</b> I pazienti <b>ESTERNI</b> devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
IDROSSI TRIPTAMINA 5 vedi SEROTONINA	<b>SEROT</b>														
IDROSSICOLECALCIFEROLO 25 vedi VITAMINA D	<b>VD</b>														
IDROSSIINDOLACETICO ACIDO (ACIDO 5-OH INDOLACETICO)	<b>SIDRO</b> SIDRO DIUAC	<b>SIDRO</b> DIUAC	393 848	Synlab	Ur 24h	2 U-ROSSO			Campione frigorifero n°3	8	14,10	15,55	90.02.1	90.02.1_0	mg/24 h
IgE SPECIFICHE Alimenti (12 Allergeni)	<b>ALIM</b>	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		<b>Fotocopia impegnativa</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	54,05	59,5	90.68.B	90.68.B_0	KU/L
IgE SPECIFICHE Alimenti (12 Allergeni) - da utilizzare se richieste in 2 quantità(ALIM+ALIM2) <b>con impegnativa dal 30/12/2024</b>	<b>ALIM2</b>	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		<b>Fotocopia impegnativa</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	54,05	59,5	90.68.B	90.68.B_0	KU/L
IgE SPECIFICHE Alimenti (8 Allergeni) <b>con impegnativa dal 30/12/2024</b>	<b>ALIM8</b>	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		<b>Fotocopia impegnativa</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	36,05	40	90.68.7	90.68.7_0	KU/L
IgE SPECIFICHE Alimenti (8 Allergeni) - da utilizzare se richieste in 2 quantità(ALIM+ALIM2) <b>con impegnativa dal 30/12/2024</b>	<b>ALIM8B</b>	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		<b>Fotocopia impegnativa</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	36,05	40	90.68.7	90.68.7_0	KU/L
IgE SPECIFICHE Inalanti (12 Allergeni)	<b>INAL</b>	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		<b>Fotocopia impegnativa</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	54,05	59,45	90.68.B	90.68.B_0	KU/L
IgE SPECIFICHE Inalanti (12 Allergeni) - da utilizzare se richieste in 2 quantità(INAL+INAL2) <b>impegnativa dal 30/12/2024</b>	<b>INAL2</b>	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		<b>Fotocopia impegnativa</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	54,05	59,45	90.68.B	90.68.B_0	KU/L
IgE SPECIFICHE Inalanti (8 Allergeni) <b>con impegnativa dal 30/12/2024</b>	<b>INAL8</b>	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		<b>Fotocopia impegnativa</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	36,05	40	90.68.8	90.68.8_0	KU/L
IgE SPECIFICHE Inalanti (8 Allergeni) - da utilizzare se richieste in 2 quantità(ALIM+ALIM2) <b>con impegnativa dal 30/12/2024</b>	<b>INA8B</b>	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		<b>Fotocopia impegnativa</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	36,05	40	90.68.8	90.68.8_0	KU/L
IgE SPECIFICHE Veleno di imenotteri	<b>IMEN</b>	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		<b>Fotocopia impegnativa</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	54,05	59,45	90.68.C	90.68.C_0	KU/L
IgE SPECIFICHE Farmaci	<b>FARM</b>	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		<b>Fotocopia impegnativa</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	54,05	59,45	90.68.C	90.68.C_0	KU/L

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
IgE SPECIFICHE PEDIATRICHE con impegnativa fino al 29/12/2024 - dal 30/12/2024 verificare lista IGE SPECIFICHE	PEDI	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		Fotocopia impegnativa	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	25	10,95	12,05	90.68.2	90.68.2_2	KU/L
IgE SPECIFICHE Età >2 ANNI SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO per profili allergeni con impegnativa dal 30/12/2024	PHAD	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		Fotocopia impegnativa	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	25	10,95	12,05	90.68.2	90.68.2_2	KU/L
IgE SPECIFICHE Età <2 ANNI SCREENING MULTIALLERGENICO QUALITATIVO per profili allergeni	PHADI	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		Fotocopia impegnativa	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	25	10,95	12,05	90.68.2	90.68.2_2	KU/L
IgE SPECIFICHE Professionali con impegnativa fino al 29/12/2024 - dal 30/12/2024 verificare lista IGE SPECIFICHE	PROF	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		Fotocopia impegnativa	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	7,15	7,90	90.68.1	90.68.1_6	KU/L
IgE SPECIFICHE pannello aperto (12 allergeni)	ALTRI	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		Fotocopia impegnativa + fotocopia di eventuale richiesta dello specialista (vedi lista per inserimento del pannello desiderato)	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	54,05	59,5	90.68.B	90.68.B_0	KU/L
IgE SPECIFICHE pannello aperto (12 allergeni) da utilizzare per un secondo pannello richiesto utilizzabile dal 30/12/2024	ALT2	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		Fotocopia impegnativa + fotocopia di eventuale richiesta dello specialista (vedi lista per inserimento del pannello desiderato)	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	54,05	59,5	90.68.B	90.68.B_0	KU/L
IgE SPECIFICHE pannello aperto (8 allergeni) utilizzabile dal 30/12/2024	RICO1	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		Fotocopia impegnativa + fotocopia di eventuale richiesta dello specialista (vedi lista per inserimento del pannello desiderato)	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	8,5	9,4	90.68.A	90.68.A_0	KU/L
IgE SPECIFICHE pannello aperto (8 allergeni) da utilizzare per un secondo pannello richiesto utilizzabile dal 30/12/2024	RICO2	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande		Fotocopia impegnativa + fotocopia di eventuale richiesta dello specialista (vedi lista per inserimento del pannello desiderato)	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	8,5	9,4	90.68.A	90.68.A_0	KU/L
IgE Totali	IGE	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	5	10,95	12,05	90.68.3	90.68.3_0	KU/L
<b>IGG SOTTOCLASSI</b>	<b>SIGG</b>														
SOTTOCLASSI IGG (1)	SIGG1	SIgG	317	SYNLAB	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare e congelare -20°	5					
SOTTOCLASSI IGG (2)	SIGG2										90.68.4	90.68.4_2	13,7	15,1	g/L
SOTTOCLASSI IGG (3)	SIGG3										90.68.4	90.68.4_3	13,7	15,1	g/L
SOTTOCLASSI IGG (4)	SIGG4										90.68.4	90.68.4_4	13,7	15,1	g/L
S-IgG	IMM51	NEFEL	10	SB		TRASPARENTE grande				3	90.69.4	90.69.4_6	5,15	5,7	g/L
IMMBLOT SCL RP155 (vedi SCLERODERMIA)	<b>ABSCL</b>										19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_26	
IMMUNOFENOTIPO leucocitario su sangue periferico o midollare <b>NO per esterni</b>	<b>MLFBG</b> MLFBG SLIN1 SLIN2 SLIN3 SLIN4 SLIN5 SLIN6 SLIN7	MLFBG	337	BRem	Sg o Mb	2 VIOLA grande	Entro h 7.30 + Modulo	Solo su APPUNTAMENTO tel .045 8128412 Solo per DH ONCOLOGIA	Dati anagrafici completi compreso LUOGO di nascita	20	190,30	209,35	91.47.C	91.47.C_5	
<b>IMMUNOFISSAZIONE (NO IFX singolo)</b> proteine sieriche + elettroforesi tipizzazione componente monoclonale	<b>SBJ</b> ETF IFX	ETF CHIMM	043 064	SB	Sr	2 rosa piccola		comprende immunofissazione, tipizzazione e quantificazione	Centrifugare, provetta frigorifero n°3		10	6,85	7,55	90.38.4	90.38.4_0
proteine Bence-Jones su urine	UBJ	U-BJ	044		Ur	U-VERDE				10	26,20	28,85	90.69.2	90.69.2_2	
IgG sieriche	IMM51	NEFEL.	010		Sr	TRASPARENTE grande				3	5,15	5,70	90.69.4	90.69.4_6	g/L
IgA sieriche	IMM52				3	5,15	5,70			90.69.4	90.69.4_7	g/L			
IgM sieriche	IMM53			3	5,15	5,70	90.69.4	90.69.4_5	g/L						
proteine Bence-Jones su urine	UBJ63									10					
IMMUNOGLOBULINE D (IgD)	<b>IGD</b>	IgD	856	Synlab		TRASPARENTE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	5	5,15	5,70	90.69.4	90.69.4_5	mg/L

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura	
IMMUNOGLOBULINE IgA-IgG-IgM IgG sieriche IgA sieriche IgM sieriche	IMM IMM51 IMM52 IMM53	NEFEL.	010	SB	Sr	TRASPARENTE grande				1	5,15	5,70	90.69.4	90.69.4_6	g/L	
											5,15	5,70	90.69.4	90.69.4_7	g/L	
											5,15	5,70	90.69.4	90.69.4_5	g/L	
INIBINA B	INIB	INIB	894	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, congelatore n° 5 a -20°	15	16,85	18,55	90.28.C	90.28.C_2	pg/mL	
INFLUENZA A (biologia molecolare) <b>no prelievo</b>	INA	COR10	893	SB	Mb	Tampone rosso				7	51	56,1	91.12.B	91.12.B_2		
INFLUENZA B (biologia molecolare) <b>no prelievo</b>	INB	COR10	893	SB	Mb	Tampone rosso				7	51	56,1	91.12.B	91.12.B_2		
INSULA PANCREATICA (anticorpi)	ICA	DIAB	220	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	5	7,55	8,35	90.50.5	90.50.5_0	titolo	
INSULINA	INSUL	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n. 3 Congelare a -20° se non viene spedita in giornata	5	8,50	9,35	90.29.1	90.29.1_2	mIU/L	
INSULINA (Anticorpi)	AAINS	AAINS	389	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare e congelare a -20°.	6	10,75	11,85	90.51.1	90.51.1_0	UA/mL	
INTRADERMO REAZIONE alla tubercolina <b>vedi MANTOUX</b>	INTRA															
IODIURIA (IODIO 24H)	IODU	IODU	895	Synlab	Urine 24H	2 U-ROSSO				15	2,55	2,90	90.27.6	90.27.6_0	µg/g creatin	
	DIU	DIUcc	017													
IPPURICO ACIDO <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295								
ISAC <i>IgE specifiche metodica immunoarray</i> N.B. NON SI EFFETTUA PER PAZIENTI INTERNI	NO COD			Brip	Sr	OCRA grande	Si effettua SOLO per pazienti esterni, con impegnativa con dicitura "IgE specifiche pannello aperto quantità 6" e quesito diagnostico "ISAC"	Mandare paziente esterno in Immunopatologia B.R. 0458124256								
ISOFLURANO su siero o urine <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295								
ISTAMINA sangue  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			PD	Sg	VIOLA grande		Osped.Giustiniano 2° piano tel.049 8212781 deve arrivare entro le ore 16.00 <b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>	In giornata in contenitore refrigerato a +4° <b>Altrimenti</b> centrifugare, sierare, cong a -20° spedire congelato							
ISTAMINA urine  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			PD	Ur	Provetta U-VERDE	Urine estemporanee	<b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>								
ISTOPLASMA anticorpi  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°							

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
<i>ITRAPONAZOLO</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>								Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°						
JAK2 (no venerdì - no sabato)	<b>JAK2</b>	JAK2	019	Legnago	Sg	VIOLA grande	<b>Entro h 7.30 + Modulo</b>	<b>+ Modulo firmato</b>		30	150	165	G1.91	G1.91_15	
KAPPA URINE	<b>UKAPP</b>	U-BJ	044	SB	Ur	U-VERDE	1° minzione	<b>Esame di 2° livello se BJ positiva</b>		6	8,25	9,1	90.28.4	90.28.4_5	mg/L
LAMBDA URINE	<b>ULAMB</b>	U-BJ	044	SB	Ur	U-VERDE	1° minzione	<b>Esame di 2° livello se BJ positiva</b>		6	8,25	9,1	90.28.4	90.28.4_5	mg/L
KEPPRA vedi LEVETIRACETAM	<b>LEVET</b>										12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_40	
KETONI urine vedi ACETONE								<b>Non richiedibile</b>							
<i>KLEIHAUER - BERTKE test</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BR	PI	verde scuro piccola +VIOLA grande	Entro h 7.30	Prendere accordi con BR tel. 045 8124584 / 4516	Il Laboratorio di Borgo Roma deve essere sempre avvisato dell'arrivo del test.						
LAC (lupus anticoagulant) <b>NO Centri Prelievi periferici</b>	<b>LAC</b> LAC01 LAC02	COAG3	267	Legnago	PI	azzurra piccola		NON eseguibile in pazienti in Terapia Anticoagulante.	Centrifugare, aliquotare, ricentrifugare e aliquotare nuovamente. Congelare a -20°	15	4,1 4,1	4,55 4,55	90.46.5 90.46.5	90.46.5_3 90.46.5_2	
LACOSAMIDE	<b>LACO</b>	LACOSAMIDE	840	BRcs	PI	verde piccola (LiEpG)			Centrifugare, aliquotare e congelare a -20°	7	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_93	mg/L
LAMOTRIGINA	<b>LAMOT</b>	LAMOT	140	BRcs	Sr	verde piccola (LiEpG)			Centrifugare, aliquotare e congelare a -20°	5	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_33	mg/L
LATTATO (acido lattico) <b>NO Centri Prelievi periferici</b>	<b>VLLA</b>	*VEGA	042	SB	Sg	*Sir.eparinata	A freddo	<b>Consegnare campione in Laboratorio entro 20 minuti</b>		1	4,65	5,15	90.02.5	90.02.5_2	mg/dL
LATTATO (acido lattico) <b>NO Centri Prelievi periferici</b>	<b>LATT</b>	CHIM	005	SB	Sg	grigia piccola	A freddo	<b>Consegnare campione in Laboratorio entro 20 minuti</b>		2	4,65	5,15	90.02.5	90.02.5_2	mg/dL
LDH (lattato deidrogenasi)	<b>LDH</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	2,30	2,55	90.29.2	90.29.2_2	U/L
<b>LDL COLESTEROLO non utilizzare con dema</b>	<b>cancellare esame calcolo (LDLC) con imp.va DEMA. viene eseguito in automatico se presente COL-HDL-TRIG</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola		<b>ATTENZIONE!!!! CANCELLARE LDLC SU DEMA SE PRESENTE</b>		0	0,6	0,7	90.13.C	90.13.C_0	mg/dL
<b>LDL COLESTEROLO CALCOLATO (Comprende colesterolo tot, HDL, LDL, trigliceridi)</b>	<b>LDL NON UTILIZZARE</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				0					
LEGIONELLA PNEUMOPHILA (Anticorpi) LEGIONELLA IgG LEGIONELLA IgM	<b>ALEGI</b> ALEGG ALEGM	LEGIO	208	Legnago	Sr	ROSSO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	30	29,3 29,3	32,25 32,25	90.84.8 90.84.8	90.84.8_3 90.84.8_3	INDEX INDEX
LEGIONELLA antigene su urine	<b>LEGU</b>	URLEG	387	SB	Ur	Vasetto sterile				3	12,3	13,55	90.95.5	90.95.5_6	
LEISHMANIA anticorpi IgG	<b>ALEIS</b>	ALEIS	209	BTm	Sr	bianca piccola		L. Infantum	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	9,35	10,30	90.96.1	90.96.1_0	UA
LEPTOSPIRA (Anticorpi) LEPTOSPIRA IgG LEPTOSPIRA IgM	<b>LEPTO</b> LEPG LEPM	ALEP	464	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	12,30 12,30	13,55 13,55	90.96.6 90.96.6	90.96.6_0 90.96.6_0	
LEVETIRACETAM (KEPPRA)	<b>LEVET</b>	LEVET	335	BRcs	Sr	verde piccola (LiEpG)			Centrifugare, aliquotare e congelare a -20°	6	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_40	mg/L

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
LEVODOPA	LEVOD	LEVOD	812	Synlab	Sr	viola piccola			Centrifugare rapidamente (entro 30 minuti) a temperatura ambiente,	15	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_24	mg/L
LIPASI	LIPA	CHIMM	900	SB	Sg	verde piccola				2	2,85	3,15	90.30.2	90.30.2_2	U/l
LIPOPROTEINA (a)	LPA	Lp(a)	384	SB	Sr	ruggine piccola				7	12,05	13,30	90.30.3	90.30.3_0	mg/dL
Liquido PERITONEALE COLTURA (VEDI coltura LIQUIDO PERITONEALE)	LPER										33,65	37,05	90.93.L	90.93.L_3	
Liquidi/VERSAMENTI ES CHIMICO-FISICO (eccetto sinoviale)	VER	VER	305	SB	Mb	Vasetto sterile		Specificare il tipo di materiale		2	3,5	3,85	90.30.4	90.30.4_2	
Liquido SINOVALE esame chimico fisico	VERSI	SINOV	306	SB	Mb	Vasetto sterile		Consegnare entro 30 minuti per ricerca cristalli	Si esegue come gli altri versamenti e si esegue test della Mucina ATTENZIONE ALLA VISCOSITA'	4	2,30	2,55	90.32.1	90.32.1_0	
Liquido PLEURICO (VEDI coltura)	LPLE										33,65	37,05	90.93.L	90.93.L_2	
LIQUIDO SEMINALE esame colturale vedi SPERMIOCOLTURA	LSEM										21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_19	
LIQUIDO SEMINALE spermioγραμμα								Non richiedibile SB e Legnago							
<b>LIQUIDO PERITONEALE SOLO PZ DIALISI</b>	<b>LQPR</b>														
PROTEINE DIAL.PERIT	PRTLTP	LqUR	916	SB	Liquor	ROSSO grande				2	90.38.5	90.38.5_6	1,1	1,25	g/L
LQ.DIA.PER CREATININ	CRELP	LqSI	917		Liquor	ROSSO grande	90.16.3	90.16.3_11	1,35		1,5	mg/dL			
LQ.DIA.PER UREA	URELP						90.44.1	90.44.1_8	1,35		1,5	mg/dL			
LQ.DIA.PER GLUCOSIO	GLULP						90.27.1	90.27.1_8	1,35		1,5	mg/dL			
LQ.DIA.PER SODIO	NALP						90.40.4	90.40.4_6	1,1		1,25	mmol/L			
<b>LIQUOR</b> <b>Esame Chimico fisico su liquor + prelievo sangue (solo per interni)</b>	<b>LIQUO</b>	NEFEL.	010	SB	Sr	TRASPARENTE grande	comprende dosaggio di IgG e albumina su liquor, Indice di LINK e danno di barriera. La ricerca del virus con metodo PCR viene eseguita in mBT tel 8122947 su campione sterile conservato in frigorifero e su richiesta specifica.	Provette liquor e istruzioni in settore accettazione	1	5,15	5,70	90.69.4	90.69.4_6	g/L	
IgG sieriche	IMM51	LIQUO	307		Liquor	BIANCA dedicata			1	5,15	5,70	90.69.4	90.69.4_7	g/L	
IgA sieriche	IMM52								1	5,15	5,70	90.69.4	90.69.4_5	g/L	
IgM sieriche	IMM53								4	3,5	3,85	90.30.4	90.30.4_4	mg/dL	
Liquor: esame chimico, fisico e microscopico	LQSTD								2	1,35	1,5	90.27.1	90.27.1_10	mg/dL	
Liquor glucosio	LIQGL	2	1,1	1,25	90.38.5	90.38.5_3	g/L								
Liquor proteine	LIQPR														
Link + barriera															
Albumina (plasma)	LIQ14	CHIMM	900		PI	verde piccola			2	2,30	2,55	90.05.1	90.05.1_2	g/L	
Glucosio (plasma)	ALB						2	1,35	1,50	90.27.1	90.27.1_2	mg/dL			
LIQUOR microbiologico (solo per interni)	CFS	LIQUO	324	SB	Liquor	BIANCA dedicata			Provette liquor e istruzioni in settore accettazione	5	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_6	
<b>LIQUOR virus\batteri (solo per interni)</b>	<b>MENCE</b>	MENCE	366	SB	Liquor	BIANCA dedicata			Provette liquor e istruzioni in settore accettazione	20					
<i>LIQUOR</i> <i>Antigeni onconeurali</i>	<b>NO COD</b>			BRnp	Sr	1 ruggine piccola (sangue)			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato. Neuropatologia 7° piano tel. 045 8124461						
<i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>															
<i>LIQUOR</i> <i>Beta AMILOIDE A</i>	<b>NO COD</b>			BRnp	Liquor	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato. Neuropatologia 7° piano tel. 045 8124461						
<i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>															

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
LIQUOR bande oligoclonali  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRnp	Liquor + Sr	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente + 1 ruggine piccola (sangue)			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato. Neuropatologia 7° piano tel. 045 8124461						
LIQUOR ricerca BK(TBC)  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BTm	Liquor	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato. Neuropatologia 7° piano tel. 045 8124461						
LIQUOR ricerca proteina 14.33  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRnp	Liquor	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato. Neuropatologia 7° piano tel. 045 8124461						
LIQUOR biologia molecolare per BK(virus)  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRm	Liquor	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato. Neuropatologia 7° piano tel. 045 8124461						
LIQUOR ricerca virale(HSV;VZV;CMV;EBV;BK virus,ENTEROVIRUS)  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BRm	Liquor	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato. Neuropatologia 7° piano tel. 045 8124461						
LIQUOR ricerca anticorpi anti Borrelia  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BTm	Liquor + Sr	1 provetta dedicata sterile tappo trasparente + 1 ruggine piccola (sangue)			In giornata inviare a +4° altrimenti congelare in cong. n° 5 Liquor e Siero (no provetta madre, fare aliquota) e inviare congelato. Neuropatologia 7° piano tel. 045 8124461						
LISOZIMA MURAMIDASI	LISOM	LISO	326	BR	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, sierare, cong n°5 a -20°	15	2,05	2,30	90.32.6	90.32.6_0	mg/L
LISOZIMA urine  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BR	Ur 24h	provetta U_ROSSO Raccolta bidone con diuresi	Entro h 7.30		Telefonare per INFO						
LISTERIA	LISTE	LISTE	465	Synlab	Sr	bianca piccola		Non richiedibile	Campione frigorifero n°3	10	0	0	0		INDEX
LINEZOLID  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BR	PI	verde scuro piccola									
LITIO	LI	CHIMM	064	SB	Sr	rosa				6	3,70	4,10	90.32.2	90.32.2_0	mEq/L
LKM (anticorpi anti microsomi epatici e renali)	LKM	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				11	7,30	8,05	90.51.5	90.51.5_0	
LUPUS ANTICOAGULANT vedi LAC	LAC														
LUTEINIZZANTE ORMONE vedi LH	LH										11,5	12,65	90.32.3	90.32.3_2	
LYME TEST vedi BORRELIA Ab	BORRE														

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
<b>MACROPROLATTINA</b>	<b>MACRO</b>														
PROLATTINA	PRL	CHIMM	003	Legnago	S	OCRA grande				7	11,5	12,65	90.38.2	90.38.2_2	mUI/L
PROLATTINA DOPO PEG	PRL03										6,35	7	90.38.8	90.38.8_0	%
MAG Ab	<b>MAG</b>	MAG	419	BRnp	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, sierare, cong n°5 a -20° Compresi anche nel Pannello GANGLIOSIDI	30	10,10	11,15	90.51.3	90.51.3_0	BTU
MAGNESIO	<b>MG</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	1,50	1,65	90.32.5	90.32.5_2	mg/dL
<b>MAGNESIO urine</b>	<b>MGU</b> UMG24 DIUAC	ChUri DIUAC	919 848	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO				2	1,50	1,65	90.32.5	90.32.5_5	mg/24h
MALARIA (e parassiti ematici) ricerca microscopica	<b>MALAR</b>	MALAR	312	SB	Sg	viola piccola		Contattare il laboratorio		5	10,1	11,15	91.05.C	91.05.C_0	
	<b>MALAG</b>									5	10,1	11,15	91.05.C	91.05.C_0	
	<b>MALADN</b>									5	52,90	58,20	90.83.4	90.83.4_7	
<i>MALARIA anticorpi</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			Negrar	Sr	OCRA grande		Almeno 15 gg per la risposta	Inviare siero NON congelato						
MANTOUX No centri periferici <b>*NON SI ESEGUE IL GIOVEDÌ*</b>	<b>INTRA</b>	INTRA	203	SB		INTRA				5	4,90	5,40	90.70.3	90.70.3_2	
<i>MANDELICO ACIDO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
<i>MANGANESE</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
<i>MERCURIO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
<i>METANOLO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
MDMA (Ecstasy) Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	<b>MDMA</b> MDMA3 CREA5	DAU_A	040	SB	Ur	U-ARANCIO		Fa parte del profilo DRO ESTERNI :per uso clinico diagnostico (richiesto nell'impegnativa) Richiedere CREA5 se viene richiesto singolarmente		2	5,30 1,35	5,85 1,5	90.18.3 90.16.3	90.18.3_26 90.16.3_9	ng/mL mg/DI
MEMBRANA BASALE GLOMERULO ANTICORPI	<b>GBM</b>	GBM	011	SYNLab	Sr	bianca piccola				10	19,85	21,85	90.48.9	90.48.9_0	
METADONE Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	<b>META</b> META3 CREA5	DAU_A	040	SB	Ur	U-ARANCIO		Fa parte del profilo DRO ESTERNI :per uso clinico diagnostico (richiesto nell'impegnativa) Richiedere CREA5 se viene richiesto singolarmente		2	5,30 1,35	5,85 1,5	90.18.3 90.16.3	90.18.3_25 90.16.3_9	ng/mL mg/DI
METAEMOGLOBINA <b>NO Centri Prelievi periferici</b>	VLMHB	*VEGA	042	SB	Sg	*Sir.ep	A freddo	Consegnare campione subito in Laboratorio a FREDDO		1	2,45	2,7	90.71.1	90.71.1_3	%

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura		
<b>METANEFRINE plasma (metanefrina+normetanefrina)</b>	<b>METPL</b>																
METANEFRINE	PMETA	pMETA	429	Br	PI	*VIOLA grande		<b>Preparazione pz: Pz in posizione supina da almeno 20 minuti prima del prelievo. CONSEGNARE A FREDDO</b>	Centrifugare a freddo, separare, cong. n° 5 a -20°	15	6,75	7,45	90.33.6	90.33.6_2	pmol/L		
NORMETANEFRINE	PMETN						6,75				7,45	90.33.6	90.33.6_3	pmol/L			
<b>METANEFRINE urine (metanefrina+normetanefrina)</b>	<b>METAU</b>	<b>DIUAC</b>	848														
METANEFRINE totali urine	UMETA	uMETA	432	Br	Ur 24h	2 U-ROSSO			Campione frigorifero n°3	25	6,75	7,45	90.33.6	90.33.6_2	nmol/24h		
NORMETANEFRINE urine	UMETN										6,75	7,45	90.33.6	90.33.6_3	nmol/24h		
<b>METILTETRAIDROFOLATO REDUTTASI vedi MTHFR</b>	<b>MTHFR</b>																
<b>METHOTREXATE</b> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i> <i>Chiamare Borgo Trento per avvisare che verranno inviati campioni per il dosaggio del farmaco.</i>	<b>NO COD</b> <i>prima di procedere con i prelievi prendere accordi con BT</i> <b>1° prelievo h7.30 + Modulo</b>						BT	Sr	BLU grande al buio (avvolgere in carta stagnola)	Prelievo eseguito a freddo e al buio. Su ogni prelievo indicare data e ora. Sul Modulo di accompagnamento indicare quando è stata fatta la somministrazione del farmaco.	Possono essere inviati fino a 10 campioni. Prima della somministrazione fare un prelievo e indicare "tempo 0". La cadenza oraria dei successivi campioni è stabilita secondo indicazioni del medico richiedente. Il test viene effettuato per verificare in quanto tempo il paziente smaltisce il farmaco.						
<b>METILETILCHETONE</b> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>																
<b>MICOBATTERI vedi BK</b>	<b>BK</b>																
MICOFENOLATO	MICOF	MICOF	214	Synlab	Sg	VIOLA grande			NON centrifugare	13	12,05	13,30	90.17.B	90.17.B_29	mg/L		
<b>MICOPLASMA IGM sentire Segreteria del Laboratorio</b>	<b>MICOM</b>	<b>MICOM</b>	901	SB	Sr	ruggine piccola			<b>sentire Segreteria del Laboratorio</b>	<b>3</b>	<b>9,85</b>	<b>10,84</b>	<b>91.02.D</b>	<b>91.02.D_0</b>			
MIELOGRAMMA (midollo esame microscopico) sospeso?	MID	MIDOLLO	014	SB	Mb	vetrino				5	18,40	20,25	90.63.3	90.63.3_0			
MIELOPEROSSIDASI Ab fa parte del gruppo ANCA	<b>ANCA</b>																
MIOGLOBINA	MIO	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande		<b>non richiedibile</b>		2	6,7	7,4	90.33.5	90.33.5_2			
MIOSITE anticorpi	ABMIO	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				15	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_26	µg/L		
MITOCONDRIO anticorpi <b>vedi AMA</b>	<b>AMA</b>										8,35	9,2	90.52.1	90.52.1_0			
<b>MORBILLO (anticorpi)</b>	<b>AMORB</b>																
IgG sieriche	MORG	SIERL	294	Legnago	Sr	ROSSO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	6,85	7,55	91.24.F	91.24.F_3	mU/mL		
IgM sieriche	MORM									10	6,85	7,55	91.24.F	91.24.F_4	U/mL		
<b>MORBILLO RNA conferma PADOVA(secondo livello)</b>	<b>MORB</b>																
MORBILLO RNA (sangue)	MORBP	MORBP	964	MB PADOVA	Sg	VIOLA grande			Spedizione il Giovedì, congelare se inviato dopo le 72 ore	10	51	56,1	91.12.B	91.12.B_2			
MORBILLO RNA (tampone)	MORBT	MORBT	950		tamp	Tampone Rosso				10	51	56,1	91.12.B	91.12.B_2			
MORBILLO RNA (urine)	MORBU	MORBU	963		Ur	U-ROSSO				10	51	56,1	91.12.B	91.12.B_2			
MPO mieloperossidasi fa parte del gruppo ANCA	<b>ANCA</b>																
MTHFR	<b>MTHFR</b>	MUTAZ	750	Br	Sg	VIOLA grande	<b>+ Modulo</b>	<b>+ Modulo</b>	NON CENTRIFUGARE campione frigo n°3 Eseguire solo se Omocisteina elevata	15	150	165	G1.91	G1.91_5			

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di referenziazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
MUCONICO ACIDO TRANS <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
MUCOPOLISSACCARIDI								Non più richiedibile.							
MUSCOLO LISCIO Ab vedi ASMA	ASMA										6,55	7,25	90.52.2	90.52.2_0	
MUSCOLO STRIATO anticorpi	CUORE	CUORE	494	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	15	6,55	7,25	90.52.3	90.52.3_0	titolo
MUTAZIONE FATTORE II	FIIM	MUTAZ	293	Legnago	Sg	VIOLA grande			Non centrifugare	20	150	165	G1.91	G1.91_4	
MUTAZIONE C677T vedi MTHFR	MTHFR														
Mutazione Fatt. PROTROMBINA vedi MUTAZIONE FATTORE II	FIIM										150	165	G1.91	G1.91_4	
MUTAZIONE FATTORE V DI LEIDEN mutazione fattore V (LEIDEN – G1691A) mutazione fattore V (genotipo)	LEID	MUTAZ	293	Legnago	Sg	VIOLA grande		con Modulo	Non centrifugare	20 15	150 106,00	165 116,60	G1.91 91.29.4	G1.91_3 91.29.4_0	
MUTAZIONE G20210 A della Protrombina vedi MUTAZIONE FATTORE II	FIIM										150	165	G1.91	G1.91_4	
MYCOPLASMA PNEUMONIAE (anticorpi) MYCOPLASMI IgG MYCOPLASMI IgM	AMICO AMICG AMICM	APNEU	703	Legnago	Sr	ROSSO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	30 30	9,85 9,85	10,85 10,85	91.02.D 91.02.D	91.02.D_0 91.02.D_0	index index
NERVO anticorpi (vedi Gangliosidi)  N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD														
NICHEL <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
NOROVIRUS FECI antigeni	NOROV	VIRUS	392	SB	Feci	Vasetto sterile				1	5	5,5	91.24.8	91.24.8_0	
NOTCH3 ricerca mutazione gene (malattia C.A.D.A.S.I.L.) Analisi RNA-DNA reazione/sequenza	NOTC NOTCH	NOTCH NULLA	992 999	BRnp	PI	VIOLA grande NULLA	Entro h 7.30 + Modulo	Non inviare il venerdì, inviare CONSENSO INFORMATO e breve anamnesi clinica familiare		20 20	395 137,6	434,5 151,4	G8.01 91.30.3	G8.01_20 91.30.3_2	
NSE	NSE	MAGLU	346	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, aliquota frigorifero n°3, tenere provetta madre. (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)	10	16,30	17,95	90.18.4	90.18.4_0	ng/mL
NUGENT test cortisolo accettare CORTISOLO mattino (Desametasone)	CORTM	CORT	710	Legnago	PI	VERDE grande		due imp.ve e due accettazioni - 1° giorno eseguire prelievo BASE ore 23:00 somministrare il farmaco -2°giorno eseguire 2° prelievo (SEGNALARE SU ETICHETTA IL FARMACO)	Centrifugare e frigo n. 3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)	8	11,5	12,65	90.15.3	90.15.3_2	µg/dL
NUCLEO anticorpi (vedi ANA)	ANA										8,5	9,35	90.52.4	90.52.4_0	
NUCLEO-ESTRAIBILI anticorpi (vedi ENA)	EN														
OLIGOCLONALI bande su liquor (solo per interni vedi LIQUOR)	LIQUO														
OMOCISTEINA	OMO	OMO	478	Legnago	PI	KABE			NO campioni emolizzati	4	10,05	11,10	90.34.6	90.34.6_0	umol/L

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di referenziazione (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura	
ACIDO OMOVANILICO (HVA) Urine 24h	HVAB HVA DIUAC	VAMA DIUAC	316 848	BR	Urine 24h	2 U-ROSSO			Campione frigorifero n°3	8	9,95	10,95	90.38.G	90.38.G_2	mg/24 h	
<i>OMOVANILICO ACIDO</i> <i>Richiesto per motivi di lavoro</i> <i>paziente esterno deve rivolgersi personalmente alla Medicina del</i> <i>Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295								
ONCONEURALI anticorpi (solo per interni anticorpi)	ABNEU	ABNEU	454	BRnp	Sr	ruggine piccola		<b>Solo x NEUROLOGIA</b> <b>S.Bonifacio</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 Se il campione arriva il venerdì : sierare e congelare	25	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_19		
OPPIACEI Per prenotazione e accettazioni indirizzare il paziente in Segreteria	OPPI OPPI3 CREA5	DAU_A	040	SB	Ur	U-ARANCIO		ESTERNI :per uso clinico diagnostico (richiesto nell'impegnativa) richiedere sempre anche CREA5		2	5,30 1,35	5,85 1,5	90.18.3 90.16.3	90.18.3_21 90.16.3_9	mg/dL mg/DI	
ORMONE ADRENOCORTICOTROPO (vedi ACTH)	ACTH										18,1	19,95	90.15.2	90.15.2_2		
ORMONE LUTEINIZZANTE vedi LH	LH	CHIMM	003	Legnago	S					2	11,5	12,65	90.32.3	90.32.3_2	IU/L	
OSMOLALITA' PLASMATICA	OSP	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	3,05	3,40	90.34.7	90.34.7_2	mOsm/kg H2O	
OSMOLALITA' URINARIA	OSU	U-OSM	362	Legnago	Ur	U_BLU			Campione frigorifero n°3	5	3,05	3,40	90.34.7	90.34.7_3	mOsm/Kg H2O	
OSSALATO URINARIO	OSSAL OSSLO DIUAC	OSSAL DIUAC	477 848	Synlab	Ur 24h	2 U-ROSSO			Campione frigorifero n°3	10	7,90	8,70	90.35.3	90.35.3_0	mg/24h	
OSTEOCALCINA (BGP)	OSTEO	OSTEO	497	Synlab	Sr	*bianca piccola		<b>in ghiaccio</b>	Centrifugare,sierare, cong.n°5 a -20°	20	22,45	24,70	90.35.4	90.35.4_2	ng/mL	
OXCARBAZEPINA (MONOIDROSSICARBAZEPINA)	OXCA	OXCA	498	BRcs	Sr	verde piccola (LiEpG)			Centrifugare, aliquotare e congelare a -20°	6	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_39	mg/L	
P1NP (propeptide del collagene tipo 1)	P1NP	MAGLU	346	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, aliquotare. (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)	9	12,55	13,85	90.37.7	90.37.7_0	ng/mL	
PARAMIXOVIRUS (anticorpi) Guardare i singoli test	I Paramixovirus sono: virus morbillo, parotite, RSV e parainfluenzale (quest'ultimo non si esegue)							I Paramixovirus sono: virus morbillo, parotite, RSV e parainfluenzale (quest'ultimo non si esegue)								
PARACETAMOLO	PARAC	PARAC	216	BT	PI	verde scuro piccola		<b>Esame eseguibile in regime d'urgenza</b>	Centrifugare, sierare, conservare in frigo n. 3 a +4 ° fino a 48h, passate le 48h congelare.	13	12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_38	mg/L	
PARASSITI ricerca feci	PARA1 - (PARI1) PARA2(PARI1+PARI2) PARA3 (PARI1+PARI2+PARI3)							<b>Se sono più campioni, devono essere di evacuazioni diverse (almeno 12h tra una raccolta e l'altra). ATTENZIONE!!!! E' possibile raccogliere nello stesso momento più campioni(anche di giorni diversi)</b>	Trasferire una noce di feci in barattolino apposito fornito da Legnago							
Parassiti feci I campione	PARI1	PARA1	183	Legnago	feci	Vasetto sterile	N.B. Ogni campione deve essere prescritto con impegnativa singola				10	2,4	2,65	91.04.6	91.04.6_2	
Parassiti feci II campione	PARI2	PARA2	184								10	2,4	2,65	91.04.6	91.04.6_3	
Parassiti feci III campione	PARI3	PARA3	185								10	2,4	2,65	91.04.6	91.04.6_4	
PAROTITI (anticorpi) PAROTITE anticorpi IgG PAROTITE anticorpi IgM	APAR PARG PARM	SIERL	294	Legnago	Sr	ROSSO Grande					10 10	8,1 8,1	8,95 8,95	91.24.G 91.24.G	91.24.G_2 91.24.G_3	U/mL U/mL
PARVOVIRUS B19 (anticorpi) PARVOVIRUS anticorpi IgG PARVOVIRUS anticorpi IgM	PARVO PVG PVM	APARV	539	Legnago	Sr	ROSSO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	8 8	6,85 6,85	7,55 7,55	91.25.8 91.25.8	91.25.8_3 91.25.8_4	UI/mL Indice	
PARVOVIRUS B19 DNA	PVDNA	PVDNA	855	BTm	Sg	VIOLA grande			Provetta frigorifero n° 3	10	51	56,1	91.12.B	91.12.B_34		
PATOGENI ALTE VIE (ARESP) (solo per interni)	ARESP					Tampone rosso									ARESP	
PATOGENI BASSE VIE (BRESP) (solo per interni)	BRESP	BRESP	871	MB Legnago		Tampone rosso									BRESP	
PCR (proteina C reattiva)	PCR	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	4,20	4,65	90.72.3	90.72.3_2	mg/L	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura	
PEPTIDE CITRULLINATO CICLICO (vedi CITRULLINA anticorpi)	AACIT										10,4	11,45	90.47.D	90.47.D_0		
PEPSINOGENO I / II Pepsinogeno I Pepsinogeno II Pepsinogeno I / Pepsinogeno II	PEPSI PEP1 PEP2 PEP12	PEPSI	914	Synlab	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, sierare e congelare a -20°	10	4,55	5,05	90.38.M	90.38.M_0	ng/mL	
											4,55	5,05	90.38.N	90.38.N_0	ng/mL	
															ratio	
PERCLOROETILENE sangue e urine I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295								
PERTOSSE - Bordetella pertussis (anticorpi) B. PERTUSSIS anticorpi IgG B.PERTUSSIS anticorpi IgA	APERT APERG APERA	APERT	202	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	8,05	8,90	90.87.S	90.87.S_0	UI/ml	
											8,05	8,90	90.87.S	90.87.S_0	UI/ml	
PICORNA VIRUS (anticorpi)								Non più eseguibile								
PFA 100 (PFA+EF) NO Centri Prelievi periferici	PFA	PFA EFVES	026 001	SB	Sg	azzurra piccola + lilla piccola		Consegnare le provette direttamete in Laboratorio in un sacchetto	NON CENFRIFUGARE Portare il prelievo subito nel settore COAGULAZIONE	2	3,50	3,85	90.76.2	90.76.2_0		
* PFA INTESTAZIONE PFA EPINEFRINA PFA ADP PFA CONCLUSIONI	PFA00 PFA01 PFA02 PFA03							ATTENZIONE!!!!:nel mese di Marzo, PFA subirà un aumento di prezzo								
PIASTRINE anticorpi (TEST INDIRECTO)	APIAS	APIAS	430	BTct	Sr	TRASPARENTE grande	Eeguire il prelievo il Martedì	Solo su appuntamento al ct BT tel. 045 8127017 Allegare modulo dedicato Si esegue solo il Martedì	NON CENTRIFUGARE Viene eseguito SOLO il GIOVEDÌ. Il prelievo deve arrivare a B Trento il giorno precedente.	20	77,85	85,65	90.53.3	90.53.3_2		
PIASTRINE anticorpi + ANTICORPI ANTI-COMPLESSO EPARINA/PF4 PIASTRINE anticorpi (TEST INDIRECTO) ANTICORPI ANTI-COMPLESSO EPARINA/PF4	ABPLT	APIAS	430	BTct	Sr	TRASPARENTE grande	Eeguire il prelievo il Martedì	Solo su appuntamento al ct BT tel. 045 8127017 Allegare modulo dedicato Si esegue solo il Martedì	NON CENTRIFUGARE Viene eseguito SOLO il GIOVEDÌ. Il prelievo deve arrivare a B Trento il giorno precedente.	20						
	APIAS										77,85	85,65	90.53.3	90.53.3_2		
	PF4										37,50	41,50	90.53.7	90.53.7_3		
PIOMBO	PIOMB	PIOMB	480	Synlab	Sg	verde scuro			NON CENTRIFUGARE Provetta frigorifero n°3 Spedire il sangue intero.	15	17,90	19,70	90.36.3	90.36.3_2	µg/100 mL	
PIOMBO urine	PBU	U-PB	116	BR	Ur	U-ROSSO	No urine 24h	Specificare se urine di inizio o fine turno.	Campione frigorifero n°3	20	17,90	19,70	90.36.3	90.36.3_3	ug/L	
PIRUVATO KINASI (PK)	PK	PK	588	BR	Sg	verde scuro (no gel)			Campione frigorifero n°3	7	6,90	7,60	90.36.4	90.36.4_0	UI/gHb	
PLASMINOGENO	PLASM	PLASM	428	BR	PI	azzurra piccola			Centrifugare a 1500 g.per 15'.Fare 2 aliquote in provette opache.congelare entro 4h dal prelievo.	40	10,30	11,35	90.71.5	90.71.5_0	%	
PML/RAR alfa1 Riarrangiamento genetico malattie oncologiche	PML	BIOLM	221	BR	PI	VIOLA grande	Entro h 7.30 + Modulo	prelievo h7.30 + Modulo		40	395,00	434,5	G8.01	G8.01_10		
PNEUMOCOCCO antigene urinario	UPNE	URLEG	387	SB	Ur	Vasetto sterile				3	26,2	5,7	91.08.6	91.08.6_0		

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
<b>PNEUMOTROPI (AGENTI) anticorpi</b> Richiedibili anche separatamente. (vedi singoli test)	<b>APNEU</b>														
<b>Anticorpi anti ADENOVIRUS</b> ADENOVIRUS Anticorpi IgG ADENOVIRUS Anticorpi IgM	<b>ADEN</b> ADENG ADENM	APNEU	706	BTm	Sr	bianca piccola		Comprende:Adenovirus, Mycoplasma pneumoniae, virus respiratorio sinciziale, Chlamydia pneumoniae/psittaci. Non si esegue Parainfluenzae 3.	Centrifugare, provetta frigorifero n.3	5 5	4,65 4,65	5,15 5,15	91.13.1 91.13.1	91.13.1_35 91.13.1_36	UA
<b>VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE anticorpi IgA+IgG</b> VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE anticorpi IgA VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE anticorpi IgG	<b>RSVAB</b> RSVA RSVG			BTm	Sr					Centrifugare, provetta frigorifero n°3	5 5	4,65 4,65	5,05 5,05	91.13.1 91.13.1	91.13.1_17 91.13.1_17
<b>MYCOPLASMA PNEUMONIAE(anticorpi)</b> MYCOPLASMI IgG MYCOPLASMI IgM	<b>AMICO</b> AMICG AMICM	APNEU	703	Legnago	Sr	ROSSO Grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	30 30	9,85 9,85	10,85 10,85	91.02.D 91.02.D	91.02.D_0 91.02.D_0	index
<b>CHLAMYDIA PNEUMONIAE (Anticorpi)</b> CHLAM. PNEUMONIAE. anticorpi IgM CHLAM. PNEUMONIAE. anticorpi IgG	<b>CHPN</b> CHPNM CHPNG			Legnago	Sr					Centrifugare, provetta frigorifero n°3	6 6	10,2 10,2	11,25 11,25	90.88.G 90.88.G	90.88.G_0 90.88.G_0
<i>PNEUMOCISTI CARINII</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BTm	Mb	Broncolavaggio	Entro h 7.30	<b>Volume minimo 1 ml</b>	Se spedito il giorno stesso, inviare refrigerato, altrimenti congelare						
<i>PNEUMOCOCCO anticorpi (PCP)</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 <b>spedire a + 4°</b>						
PCR Polimerasi HBV DNA (vedi HBVDNA)	<b>HBVDNA</b>														
POLYPEPTIDE TESSUTALE ANTIGENE (TPA)	<b>TPA</b>	TPA	825	Synlab	Sg	bianca piccola			Centrifugare, aliquotare e mantenere a +4°. <b>Non inviare di Sabato a Synlab</b>	7	14,5	15,95	90.55.3	90.55.3_5	U/L
POLYPEPTIDE VASOATTIVO INTESTINALE (vedi VIP)	<b>VIP</b>														
<b>PORFIRINE urinarie TOTALI</b>	<b>PORFU</b> PORF0 DIU	*PORFU DIUcc	315 017	BR	Ur 24h	2 U-ROSSO	<b>Al Buio</b>	<b>Durante la raccolta le urine vengono conservate al buio e al freddo</b>		40	11,70	12,90	90.37.1	90.37.1_2	µg/24h
<b>PORFIRINE urinarie (PROFILO COMPLETO)</b> COPROPORFIRINE PORFOBILINOGENO UROPORFIRINE U-PORFIRINE TOTALI ACIDO AMINOLEVULINICO	<b>UPORF</b> COPRP PORFO URPOR PORF0 DIU ALA	*COPRP *PORFU DIUcc U-ALA	340 315 017 606	BR	Ur 24h	4 U-ROSSO	<b>Al Buio</b>	<b>Durante la raccolta le urine vengono conservate al buio e al freddo.Comprende acido aminolevul.</b>	Campione congelato , cong n°5 -20°	40 30 30 40 30	11,7 5,25 11,7 11,7 8,5	12,9 5,8 12,9 12,9 9,35	90.37.1 90.37.2 90.37.1 90.37.1	90.37.1_3 90.37.2_0 90.37.1_3 90.37.1_2	µg/24h µmol/24h µg/24h µg/24h µmol/24h
<i>POSACONAZOLO</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>			BR	PI				Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°						
<b>POLIO VIRUS anticorpi</b> anticorpi POLIOVIRUS 1 anticorpi POLIOVIRUS 2 anticorpi POLIOVIRUS 3	<b>POLIO</b> POLI1 POLI2 POLI3	POLIO	489	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	98 98 98	107,8 107,8 107,8	91.16.D 91.16.D 91.16.D	91.16.D_5 91.16.D_5 91.16.D_5	
POTASSIO	<b>K</b>	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	1,10	1,25	90.37.4	90.37.4_2	mmol/L
POTASSIO urine	<b>KU</b> UK24 DIU	ChUrine DIUcc	902 017	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO				2	1,10	1,25	90.37.4	90.37.4_3	mmol/24h
PR3 Ab proteinasi 3 fa parte del gruppo ANCA	<b>ANCA</b>														
PREALBUMINA	<b>PRALB</b>	PRALB	442	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	8	5,05	5,60	90.37.6	90.37.6_2	mg/dL
PRECIPITINE								<b>Non richiedibile</b>							

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
PRIMIDONE	PRIM	PRIM	124	Br	Sr	verde piccola (LiEpG)			Centrifugare, sierare, congelare a -20°	7	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_25	µg/mL
PROCALCITONINA (PCT)	PROCA	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	14,40	15,85	90.38.Z	90.38.Z_0	µg/L
PROCOLLAGENE tipo III								Non richiedibile							
PROGESTERONE	PROG	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	11,50	12,65	90.38.1	90.38.1_0	µg/L
PROGESTERONE 17 OH	17OHP	MAGLU	346	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)	7	9,40	10,35	90.01.2	90.01.2_0	ng/mL
PROLATTINA	PRL	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	11,5	12,65	90.38.2	90.38.2_2	mUI/L
<b>PROLATTINA 3 prelievi temporizzati</b> PROLATTINA PROLATTINA 2 campione (dopo 20 min) PROLATTINA 3 campione (dopo 40 min)	<b>PRLC</b> PRL HPRL2 HPRL3	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande		Segnare l'ora di prelievo	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	11,50	12,65	90.38.2	90.38.2_2	mUI/L
	PRL20	067	3							11,50	12,65	90.38.2	90.38.2_3	mUI/L	
	PRL40	159	3							11,50	12,65	90.38.2	90.38.2_4	mUI/L	
PROTEINA C (coagulazione)	PROTC	TROMB	002	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°	10	8,05	8,90	90.72.2	90.72.2_0	%
PROTEINA CATIONICA degli EOSINOFILI (vedi ECP)								Non richiedibile							
<b>PROTEINA DI BENCE-JONES</b> *proteine Bence-Jones su urine *dosaggio proteinuria *proteine sieriche + elettroforesi	<b>UBJ</b> UBJ ETF	U-BJ ETF CHIMM	044 043 064	SB	Ur	U-Verde		Il minzione (PREFERIBILMENTE) RICHIEDERE CON ELETTROFORESI SIERICA	1 goccia di Na azide nelle urine	10	26,20 6,85	28,85 7,55	90.69.2 90.38.4	90.69.2_3 90.38.4_0	g/L
			Sr		2 rosa piccola										
PROTEINA S (coagulazione)	PROTS	TROMB	002	Legnago	PI	azzurra piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°	10	8,65	9,55	90.72.4	90.72.4_0	%
PROTEINA S 100	S100	MAGLU	346	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)	7	14,40	15,85	90.72.6	90.72.6_2	µg/L
PROTEINASI 3 Anticorpi Fa parte del gruppo ANCA	ANCA														
PROTEINE TOTALI	PROT	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	1,10	1,25	90.38.5	90.38.5_2	g/L
PROTEINE URINE	PROTU UPR24 DIU	ChUrine DIUcc	902 017	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO				2	1,10	1,25	90.38.5	90.38.5_4	g/24h
PROTEINURIA FRAZIONATA NOTTE	PRNT	U-NOTTE DIUcc	597 017	SB	Urine	2 U-ROSSO				2	1,10	1,25	90.38.5	90.38.5_8	
PROTEINURIA FRAZIONATA ORTOSTATISMO	PRTOR	U-ORTO DIUcc	598 017	SB	Urine	2 U-ROSSO				2	1,10	1,25	90.38.5	90.38.5_9	
PROTEINURIA FRAZIONATA CLINOSTATISMO	PRCL	U-CLINO DIUcc	596 017	SB	Urine	2 U-ROSSO				2	1,10	1,25	90.38.5	90.38.5_7	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
PROTEINURIA SPOT	PRCRU UPRO UCRE	UR11°	906	SB	Urine	U-ROSSO		1°MINZIONE		2	1,1 1,35	1,25 1,5	90.38.5 90.16.3	90.38.5_3 90.16.3_10	g/L mg/dL
<i>PROTOSSIDO DI AZOTO</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
PROTROMBINA MUTAZIONE (vedi <b>FATTORE II MUTAZIONE</b> )	<b>FIIM</b>										150	165	G1.91	G1.91_4	
<b>PSA REFLEX</b> (COMPRENDE PSA E PSAL) <b>impegnativa dal 30/12/2024</b>	<b>PSAR</b>	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande				2	3,95	4,5	90.56.9	90.56.9_0	µg/L
<b>PSA TOTALE</b> <b>impegnativa fino al 29/12/2024</b>	<b>PSA</b>	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	2	9,30	10,25	90.56.5	90.56.5_2	µg/L
<b>PSA LIBERO</b> richiedibile solo con <b>PSA TOTALE</b> <b>impegnativa fino al 29/12/2024</b>	<b>PSAL</b>	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	2	9,30	10,25	90.56.5	90.56.5_3	µg/L
PT (tempo di protrombina, di Quick)	<b>PT</b>	COAG	300	SB	PI	azzurra piccola				1	2,30	2,55	90.75.4	90.75.4_0	I.N.R.
PTH	<b>PTH</b>	PTH	711	Legnago	PI	VERDE			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 ( <b>CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata</b> )	10	18,50	20,35	90.35.5	90.35.5_2	ng/L
APTT (APTT – tempo di tromboplastina parziale attivata)	<b>PTT</b>	COAG	300	SB	PI	azzurra piccola				2	2,25	2,50	90.76.1	90.76.1_0	ratio
<b>QUANTIFERON</b> *indice mitogeno QUANT_INTERFERON.NIL *antigeni specifici CD4 *antigeni specifici CD4/CD8	<b>QUANT</b> QMIT QNIL QTB1 QTB2	TBNIL TBMIT TBNIL TBANT	345 343 344 353	SB	PI	Q-VIO Q-GRI Q-VER Q-GIA	Riempire le provette fino alla tacca indicata, non di più e non di meno. Prelevare tutte e quattro le provette.	<b>NO venerdì NO Sabato</b> <b>NO i gg precedenti le festività</b> <b>riempire correttamente le provette(rispettare la tacca)</b>	Mescolare delicatamente per inversione prima di mettere in termostato per 24 H. Poi centrifugare e conservare a +4°	15	55,7 55,7	61,3 61,3	90.99.1 90.99.1	90.99.1_1 90.99.1_2	
RAME	<b>CU</b>	CHIMM	989	Legnago	Sr	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	6	4,35	4,80	90.39.4	90.39.4_2	µg/dL
RAME urine	<b>CUU</b> UCU24 DIU	U-CU DIUcc	802 017	Synlab	Ur 24h	2 U-ROSSO			Campione frigorifero n°3	15	4,35	4,80	90.39.4	90.39.4_3	µg/L
<b>RAST</b> <b>(Vedi IgE specifiche)</b>															
RBP (proteina legante il retinolo)	<b>RBP</b>	RBP	347	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	9	5,05	5,60	90.37.8	90.37.8_0	g/L
Recettore solubile della Transferrina (vedi TRANSFERRINA Recettore Solubile)	<b>STFR</b>														
RENINA screening (vedi <b>ALDOSTERONE Screening</b> )	<b>SARR</b>														
RENINA + ALDOSTERONE ( Ortostatismo / clinostatismo) <b>(VEDI Renina + Aldosterone screening)</b>	<b>SARR</b>														
RENINA clinostatismo + ortostatismo <b>(VEDI Renina screening)</b>	<b>SARR</b>														
RETICOLOCITI	<b>RET</b>	EFVES	001	SB	Sg	lilla piccola				2	4,80	5,30	90.74.5	90.74.5_0	%
RETINOLO (vedi vit A proteina legante retinolo vedi RBP)	<b>RBP</b>														
RIARRANGIAMENTO JAK2 (vedi <b>JAK2</b> )	<b>JAK2</b>														

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di referenziazione (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura	
<b>RICKETTSIA CONORI Anticorpi IgG-IgM</b>	<b>RICKC</b>															
RICKETTSIA CONORI Anticorpi IgG	RICKG	ARICK	469	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 Se richiesta RICKETTSIA TYPHI cod 532 Se richiesta RICKETTSIA CONORI cod 5320	10	8,40	9,25	91.06.6	91.06.6_0	Titolo	
RICKETTSIA CONORI Anticorpi IgM	RICKM										8,40	9,25	91.06.6	91.06.7_0	Titolo	
RISTOCETINICO COFATTORE (vedi von willebrand)	<b>FVWIL</b>															
ROCHALIMAEA Anticorpi (vedi BARTONELLA Ab)	<b>BARTO</b>															
<b>ROSOLIA anticorpi</b>	<b>ROSO</b>															
ROSOLIA anticorpi IgG	ROSOG	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	11,45	12,6	91.26.D	91.26.D_0	UI/mL	
ROSOLIA anticorpi IgM	ROSOM										11,45	12,6	91.26.D	91.26.D_0		
ROSOLIA avidità IgG Esame di 2° Livello (inserito direttamente dal Laboratorio Analisi)	ROSOA	VIDAS	672	Legnago	Sr	OCRA grande		Esame di 2° livello - Test aggiunto dal laboratorio se IgM positive e IgG presenti.	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	8	11,45	12,6	91.26.D	91.26.D_0	%	
<b>ROSOLIA VIRUS RNA</b>	<b>ROSOL</b>															
ROSOLIA VIRUS RNA (sangue)	ROSOP		942		PI	VIOLA grande										
ROSOLIA VIRUS RNA (tampono orofaringeo)	ROSOT		944		tamp	Tampone rosso			Spedizione il Giovedì, congelare se inviato dopo le 72 ore	10	51	56,1	91.12.B	91.12.B_2		
ROSOLIA VIRUS RNA (urine)	ROSOU		943		Ur	U-ROSSO					51	56,1	91.12.B	91.12.B_2		
ROTAVIRUS Feci antigeni	<b>ROTAV</b>	VIRUS	392	SB	Feci	Vasetto sterile					3	5,55	6,15	91.26.9	91.26.9_0	
SALI BILIARI (acidi biliari)	<b>ACB</b>	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	8,10	8,95	90.01.5	90.01.5_0	µmol/L	
SALICILATI	<b>SALIC</b>	SALIC	421	BR	Sr	BLU grande			<b>Chiamare per avvisare invio campione al n.045/8127674.</b> Centrifugare, sierare provetta frigorifero n°3	5	12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_44	mg/dL	
<b>SANGUE OCCULTO nelle feci</b>	<b>SO</b>	S.OCC	302			contenitore apposito								90.21.4	90.21.4_2	ng Hb/mL
	<b>SOF2</b>	SOC2	349	Bussolengo	Feci	contenitore apposito					2	3,40	3,75	90.21.4	90.21.4_3	ng Hb/mL
	<b>SOF3</b>	SOC3	350			contenitore apposito								90.21.4	90.21.4_4	ng Hb/mL
SATURAZIONE DELLA TRANSFERRINA (vedi TIBC)	<b>TIBC</b>															
SCC Antigene TA 4	<b>SCC</b>	SCC	826	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	19,5	21,45	90.57.1	90.57.1_0	ug/L	
SCOTCH TEST (ricerca ossiuri) (feci)	<b>SCOTC</b>	SCOTCH	193	Legnago		VETRINO					3	2,7	3	90.93.2	90.93.2_2	
SCLERODERMIA anticorpi	<b>ABSCL</b>	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande					15	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_26	
SCHISTOSOMA ricerca diretta su feci (vedi PARASSITI Feci)	<b>PARI1</b>	PARA1	183	Legnago	Feci	Vasetto sterile	Scrivere "SCHISTOSOMA" su Etichetta	specificare su etichetta	Trasferire una noce di feci in barattolino apposito fornito da Legnago	10	2,4	2,65	91.05.4	91.05.4_2		
SCHISTOSOMA Anticorpi N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>			BTm	Sr				Centrifugare, provetta frigorifero n°3							
<b>SPESI (DIAGNOSTICA MOLECOLARE RICERCA GERMI PATOGENI IN EMOCOLTURA POSITIVA) (solo per interni)</b> LISTERIA MONOC. DNA STAPHILOCOCCUSDNA	<b>SEPSI</b>	SEPSI	852	MB Legnago	EMOC.	Emocoltura				7						
	SEP02										96,15	105,8	90.83.A	90.83.A_8		
	SEP03										96,15	105,8	90.83.A	90.83.A_8		

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
SEROTONINA (5-OH triptamina)	SEROT	SEROT	484	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°	8	20,20	22,25	90.03.6	90.03.6_10	
SHBG (globulina legante gli ormoni sessuali)	SHBG	SHBG	831	SYNLAB	SR	bianca piccola			Centrifugare e conservare a +4°	10	10,15	11,2	90.25.7	90.25.7_0	nmol/L
SYROLIMUS O RAPAMICINA	SIROL	SIROL	946	SYNLAB	Sg	bianca piccola				6	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_27	
<b>SLA (anti ag epatico solubile) compreso nei BLOT LIVER</b>	<b>LIVER</b>	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande				15	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_28	
Sm AB anticorpi Richiedere ENA	<b>EN</b>														
SODIO	NA	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				1	1,10	1,25	90.40.4	90.40.4_2	mmol/L
SODIO urine 24h	NAU UNA24 DIU	ChUrine DIUcc	902 017	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO				2	1,10	1,25	90.40.4	90.40.4_4	mmol/24h
SOMATOMEDINA C (IGF 1)	SOMAT	MAGLU	346	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)	4	16,90	18,60	90.40.7	90.40.7_2	ng/mL
SOMATOTROPINA ORMONE o GH	GH	GH	457	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare e congelare a -20°	4	9,35	10,30	90.35.1	90.35.1_2	µg/L
<i>SOLFOEMOGLOBINA Il paziente ESTERNO deve rivolgersi personalmente a BR</i>	<b>NO COD</b>			BR											
<i>SOLVENTI Xilene- Benzene -Acetone -ecc. I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma N.B. SOLO PER INTERNI</i>	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
SOMASTOSTATINA N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>			PD	PI	VIOLA grande	A freddo		Separare velocemente e congelare il plasma cong.n°5 NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914						
SPINK 1 N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>			BRap	Sg	VIOLA grande			NON aprire la provetta TELEFONARE Dott.ssa Montresor Dott. Scarpa tel 045 8124822 Campione frigorifero n° 3						
SPAZZOLATO ESOFAGEO	SPAES	SPAES	985	Legnago	MB	Vasetto sterile				5	5,9	6,5	90.93.3	90.93.3_3	
SPERMIOCOLTURA (ESAME CULTURALE LIQUIDO SEMINALE) - ESAME CULTURALE SECREZIONI PROSTATICHE	LSEM	LSEM	955	Legnago	MB	Vasetto sterile				5	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_19	
MST (LIQUIDO SEMINALE Malattie Sessualmente Trasmissibili : clamidia, micoplasma, gonococco.....) C. TRACHOMATIS DNA N. GONORRHOEAE DNA MYC. GENITALIUM DNA	SEM CLATS GONOS GENIS	SEM	811	Legnago	MB	Vasetto sterile				14	96,15	105,8	90.83.A	90.83.A_6	
										14	52,9	58,2	90.83.4	90.83.4_8	
										5	52,9	58,2	90.83.4	90.83.4_10	
										5	52,9	58,2	90.83.4	90.83.4_9	
STERILITA' PROVA	STERA	STERA	240	Legnago	MB	Vasetto sterile				2	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_13	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
STEROIDI URINARI	STERU STERO DIU	Uster DIUcc	151 017	BR	Ur 24h	2 U-ROSSO				40	9,45	10,40	90.01.3	90.01.3_0	
STAFILOLISINA ALFA Ab VEDI TAS  N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>														
STIRENE I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma  N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
STREPTO DNAasi B anticorpi	<b>ASDNA</b>	ASDNA	873	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	4,3	4,75	91.08.5	91.08.5_0	U/mL
STRONGYLOIDES STERCORALIS (Anticorpi)	<b>STRON</b>	STRON	814	BTm	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	13	28,1	30,95	91.08.C	91.08.C_0	U/mL
TACROLIMUS (vedi FK 506)	<b>FK506</b>										12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_26	
TALASSEMIA (biologia molecolare)  N.B. SOLO PER INTERNI	<b>NO COD</b>			BR	Sg			Esame di 2° livello da concordare con il laboratorio	Campione frigorifero n° 3 NON aprire la provetta						
TAMPONE ANORETTALE MST (malattie sessualmente trasmissibili : clamidia, micoplasma, C. TRACHOMATIS DNA N. GONORRHOEAE DNA MYC. GENITALIUM DNA	<b>ANOR</b> CLATA GONOA GENIA	ANOR	891	Legnago	Mb	Tampone rosso				14	96,15	105,8	90.83.A	90.83.A_2	
TAMPONE AURICOLARE DX	<b>TAUR</b>	TAUR	519	Legnago	Mb	Tampone rosa				5	13,05	14,4	90.93.8	90.93.8_2	
TAMPONE AURICOLARE SX	<b>TAURS</b>	TAURS	529	Legnago	Mb	Tampone rosa				5	13,05	14,4	90.93.8	90.93.8_3	
TAMPONE BALANO-PREPUZIALE	<b>TBAP</b>	TBAP	974	Legnago	Mb	Tampone rosa				5	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_20	
TAMPONE CERVICALE batteri(TCER) + CERVICALE MST(CER) richiedibili ANCHE semparatamente	<b>TCERM</b>														
TAMPONE CERVICALE o endocervicale (batteri e miceti)	<b>TCER</b>	TCERV	506	Legnago	Mb	Tampone rosa				5	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_21	
TAMPONE CERVICALE MST (malattie sessualmente trasmissibili : clamidia, micoplasma, gonococco.....) C. TRACHOMATIS DNA N. GONORRHOEAE DNA MYC. GENITALIUM DNA TRIC. VAGINALIS DNA	<b>CER</b> CLATC GONOC GENIC TRICC	CER	168	Legnago	Mb	Tampone rosso				14	96,15	105,8	90.83.A	90.83.A_5	
TAMPONE CUTE	<b>TCUT</b>	TCUT	975	Legnago	Mb	Tampone rosa		SPECIFICARE ZONA SU ETICHETTA		5	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_8	
RICERCA DERMATOFITI	<b>DERM</b>	DERMC	586	Legnago	Mb	Vasetto sterile				30	2,9	3,2	90.98.4	90.98.4_40	
RICERCA DERMATOFINITI (CAPELLI)	<b>DERMC</b>	DERMC	586	legnago	Mb	Vasetto sterile				30	2,9	3,2	90.98.4	90.98.4_39	
RICERCA DERMATOFITI (UNGHIE)	<b>DERMU</b>	DERMU	590	Legnago	Mb	Vasetto sterile				30	2,9	3,2	90.98.4	90.98.4_41	
TAMPONE FERITA	<b>FERIT</b>	TFER	976	Legnago	Mb	Tampone rosa				5	19,25	21,2	90.93.K	90.93.K_3	
TAMPONE GENERICO	<b>TGEN</b>	TCUT	975	Legnago	MB	Tampone rosa		SPECIFICARE ZONA SU ETICHETTA		5	19,25	21,2	90.93.K	90.93.K_9	
TAMPONE GRAVIDANZA SGB	<b>TGRAV</b>						<b>NON RICHIEDIBILE</b>	<b>IN QUALSIASI PERIODO DI GRAVIDANZA</b>	<b>NON RICHIEDIBILE</b>						
TAMPONE INSERZIONE CATETERE	<b>TICVC</b>	TICVC	976	Legnago	MB	Tampone rosa				5	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_4	
TAMPONE LINGUALE	<b>LING</b>	TLING	954	Legnago	Mb	Tampone rosa				5	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_17	
TAMPONE MST GENERICO (malattie sessualmente trasmissibili : clamidia, micoplasma, gonococco.....) C. TRACHOMATIS DNA N. GONORRHOEAE DNA MYC. GENITALIUM DNA	<b>MST</b> CLATG GONOG GENIG	MST	877	Legnago	Mb	Tampone rosso				14	96,15	105,8	90.83.A	90.83.A_8	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
TAMPONE <b>MST</b> OROFARINGEO (malattie sessualmente trasmissibili : clamidia, micoplasma, gonococco.....) C. TRACHOMATIS DNA N. GONORRHOEAE DNA MYC. GENITALIUM DNA	<b>FART</b>									14	96,15	105,8	90.83.A	90.83.A_7	
	CLATF GONOF GENIF	FART	890	Legnago	Mb	Tampone rosso									
TAMPONE <b>MST</b> OCULARE (TRACHOMATIS)	<b>OCLAT</b>	OCLAT	820	Legnago	Mb	Tampone rosso				7	23,6	26	90.90.3	90.90.3_5	
TAMPONE NASALE	<b>TNAS</b>	TNAS	521	Legnago	Mb	Tampone rosa				5	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_15	
TAMPONE NASALE MRSA	<b>MRSA</b>	MRSA	630	Legnago	Mb	Tampone rosa				3	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_11	
TAMPONE OCULARE DX	<b>TCON</b>	TCON	520	Legnago	Mb	Tampone rosa				3	10,1	11,15	90.93.A	90.93.A_2	
TAMPONE OCULARE SX	<b>TCONS</b>	TCONS	543	Legnago	Mb	Tampone rosa				3	10,1	11,15	90.93.A	90.93.A_3	
TAMPONE OROFARINGEO	<b>TFAR</b>	TFAR	507	Legnago	Mb	Tampone rosa				5	21,2	23,35	90.93.5	90.93.5_2	
TAMPONE OMBELICALE	<b>TOMB</b>	OMB	522	Legnago	Mb	Tampone rosa				5	19,25	21,2	90.93.K	90.93.K_6	
TAMPONE PIAGA DECUBITO	<b>DECU</b>	PIAGA	981	Legnago	Mb	Tampone rosa				5	19,25	21,2	90.93.K	90.93.K_5	
TAMPONE S.PYOG (GR.A)	<b>TSA</b>	SPYOG	547	Legnago	Mb	Tampone rosa				3	21,2	23,35	90.93.5	90.93.5_4	
TAMPONE RETTALE	<b>TARET</b>	TARET	376	Legnago	Mb	Tampone rosa				3	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_14	
TAMPONE RETTALE CITROBACTER	<b>CITRO</b>	KPC	475	Legnago	Mb	Tampone rosa				3	3,25	3,6	91.08.4	91.08.4_5	
TAMPONE RETTALE PER KPC (PER GRAM NEGATIVI RESISTENTI AI CARBAPENEMI /ENTEROCCHI GLICOPEPTIDI RESISTENTI)	<b>KPC</b>	KPC	475	Legnago	Mb	Tampone rosa				3	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_9	
TAMPONE RETTALE PER VRE (ENTEROCCHI GLICOPEPTIDI RESISTENTI)	<b>VRE</b>	KPC	475	legnago	Mb	Tampone rosa				3	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_10	
TAMPONE ULCERA	<b>ULCE</b>	TULC	982	Legnago	Mb	Tampone rosa				5	19,25	21,2	90.93.K	90.93.K_7	
TAMPONE URETRALE batter(TURE) +TAMPONE URETRALE MST(URE) richiedibili ANCHE separatamente	<b>TUREM</b>														
TAMPONE URETRALE (batteri e miceti)	<b>TURE</b>	TURE	505	Legnago	Mb	Tampone rosa		NON DEVE AVER URINATO DA ALMENO 3 ORE- per le donne si prenota a cup(ostetricia)		5	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_22	
TAMPONE URETRALE <b>MST</b> (malattie sessualmente trasmissibili : clamidia, micoplasma, gonococco.....) C. TRACHOMATIS DNA N. GONORRHOEAE DNA MYC. GENITALIUM DNA TRIC. VAGINALIS DNA	<b>URE</b>							NON DEVE AVER URINATO DA ALMENO 3 ORE- per le donne si prenota a cup(ostetricia)		14	96,15	105,8	90.83.A	90.83.A_4	
	CLATU GONOU GENIU TRICU	URE	815	Legnago	Mb	Tampone rosso									
<b>PATOGENI URINE MST</b> (malattie sessualmente trasmissibili : clamidia, micoplasma, gonococco.....) C. TRACHOMATIS DNA N. GONORRHOEAE DNA MYC. GENITALIUM DNA	<b>URIN</b>							1°MINIZIONE		14	96,15	105,8	90.83.A	90.83.A_3	
	CLAT GONO GENI	URIN	816	Legnago	Ur	U-BIANCO									
TAMPONE VAGINALE	<b>TVAG</b>	TVAG	215	Legnago	Mb	1 tampone rosa 1 vetrino 1 tampone blu lungo	<b>+ Modulo Accompagnamento</b>	Indicare sempre valore pH		5	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_23	
TAMPONE VAGINO-RETTALE	<b>TVGR</b>	TVGR	551	Legnago	Mb	Tampone azzurro		ESEGUIBILE DALLA 34°SETTIMANA DI GRAVIDANZA		5	3,25	3,6	91.08.4	91.08.4_3	
TAMPONE VULVARE	<b>TVUL</b>	TVULV	983	Legnago	Mb	Tampone rosa				5	21,95	24,15	90.93.3	90.93.3_24	
TAMPONE COVID-19 MOLECOLARE	<b>COR10</b>	COR10	893	SB	Mb	Tampone rosso				7	51	56,1	91.12.B	91.12.B_44	
TAMPONE COVID-19 4° GENERAZIONE	<b>AGCOV</b>	AGCOV	821	SB	Mb	Tampone bianco				7	22	24,2	91.12.6	91.12.6_6	
TAMPONE COVID-19 2° e 3° GENERAZIONE	<b>COVAG</b>	COR10	893	SB	Mb	Tampone rosso				7	22	24,2	91.12.6	91.12.6_6	pg/ml
TAMPONE MOLECOLARE VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE	<b>RSVMO</b>	COR10	893	SB	Mb	Tampone rosso		Viene eseguito SOLO RSV		7	51	56,1	91.12.B	91.12.B_2	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura				
<b>TAMPONE MOLECOLARE VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE + COVID + INFLUENZA A e INFLUENZA B</b>  INFLUENZA A (biologia molecolare) INFLUENZA B (biologia molecolare) TAMPONE MOLECOLARE VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE TAMPONE COVID-19 MOLECOLARE	ABCVR	COR10	893	SB	Mb	Tamponi rosso		Eseguito RSVMO + COR10 + INA e INB		7									
	INA			SB	Mb				51		56,1	91.12.B	91.12.B_2						
	INB			SB	Mb				51		56,1	91.12.B	91.12.B_2						
	RSVMO			SB	Mb			Viene eseguito SOLO RSV	51		56,1	91.12.B	91.12.B_2						
	COR10			SB	Mb				51		56,1	91.12.B	91.12.B_44						
TAO <b>(PT per pazienti in terapia anticoagulante orale)</b>	TAO	TAO	100	SB	PI	azzurra piccola				0	2,30	2,55	90.75.4	90.75.4_0	I.N.R.				
TAO POCT	TAOPC	TAOPC	924			azzurra piccola		Viene fatto nei POCT		1	2,30	2,55	90.75.4	90.75.4_0	I.N.R.				
<b>TBE VIRUS PADOVA</b>	<b>TBE</b>																		
ANTI TBE Virus IgG	TBEG	ARBPD	749	PD	Sg	BLU grande		AOPD PADOVA Microbiologia		10	4,65	5,15	91.13.1	91.13.1_25					
ANTI TBE Virus IgM	TBEM										4,65	5,15	91.13.1	91.13.1_26					
P- TBE Virus RNA	TBEP										ARBPD	888	Sg	lilla piccola	51	56,1	91.12.B	91.12.B_16	
U-ANTI TBE Virus RNA	TBEU										U-ARB	854	ur	U_ROSSO	51	56,1	91.12.B	91.12.B_16	
TEMPO DI TROMBINA	TT										COAG3	267	SB	PI	azzurra piccola				15
TNF ALFA (Fattore di necrosi tumorale)	TNFA	TNFA	176	PD	Sr	OCRA grande		Prima contattare la Segreteria del Laboratorio	Telefonare a Padova per info	35	17,35	19,10	90.70.2	90.70.2_11					
TAS	TAS	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	4,30	4,75	91.08.5	91.08.5_0	UI/mL				
TCR2 clonalità malattie Oncoematologiche	TCR	BIOLM	221	BR	PI	VIOLA grande	Entro h 7.30	prelievo h7.30 + Modulo	tel.045 8124266 / 4418	40	151,00	166,1	91.61.1	91.61.1_2					
TEOFILLINA	TEO	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				6	12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_33	mg/L				
TEST di LYME <b>(vedi BORRELIA Anticorpi)</b>	<b>BORRE</b>																		
TENIA ricerca Feci	PARI1	PARA1	183	Legnago	Feci	Vasetto sterile		Scrivere su etichetta : " TENIA"		10	2,4	2,65	91.04.6	91.04.6_2					
TESTOSTERONE LIBERO	FTES	MAGLU	346	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)	5	13,90	15,29	90.41.4	90.41.4_0	pg/mL				
TESTOSTERONE TOTALE	TESTO	CHIMM	003	Legnago	Sr	OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	11,50	12,65	90.41.3	90.41.3_0	ng/mL				
TETANO Anticorpi	TET	SIERL	294	Legnago	Sr	ROSSO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	10,50	11,55	91.08.B	91.08.B_0	UI/mL				
TIBC (capacità ferrolegante, saturazione transferrina) FERRO TRANSFERRINA FERRITINA	TIBC FE TRF FERRI	CHIMM	900	SB Legnago	PI Sr	verde piccola		ATTENZIONE CON ACCETTAZIONE SU IMPEGNATIVA ROSSA (TIBC-OCCUPA TRE POSTI)	Centrifugare, provetta VERDE frigorifero n°3		2,3	2,55	90.22.5	90.22.5_2	g/L				
CHIMM	989	VERDE grande	4,5			4,95					90.42.5	90.42.5_2							
CHIMM	989	VERDE grande	11,5			12,65					90.22.3	90.22.3_0							
TINE TEST <b>(vedi MANTOUX) no giovedì</b>	<b>INTRA</b>																		
<b>TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA SU BRONCO-LAVAGGIO ALVEOLARE O LINFOCITI SOTTOPOPOLAZIONE Broncolavaggio</b> <b>No Centri Prelievi periferici SOLO PER INTERNI</b>	<b>TLBAL</b>	TLBAL	485	SIT	Vster	Vasetto sterile		Entro h 7.30 No sabato + Modulo n.2		10	190,3	209,35	91.47.C	91.47.C_5					

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA DI BASE O LINFOCITI SOTTOPOPOLAZIONE(EX SLINF) No Centri Prelievi periferici	TLBAS	SLINF	474	BTct	Sg	viola piccola		Entro h 7.30 No sabato + Modulo n.2		10	190,3	209,35	91.47.C	91.47.C_4	
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA INFETTIVI (da utilizzare SOLO per Malattie Diffusive)	TLHIV	SLINF	474	BT	S	viola piccola		Entro h 7.30 No sabato + Modulo n.2		10	91.47.C	91.47.C_2	190,3	209,35	
TIREOGLOBULINA + TIREOGLOBULINA Anticorpi	TIREO														
TIREOGLOBULINA <u>richiedere sempre con ABTG</u>	TG	CTXTG	425	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)	10	13,8	15,2	90.41.5	90.41.5_0	ng/mL
TIREOGLOBULINA Anticorpi	ABTG	CHIMM	989	Legnago	Sr	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	5	11,20	12,35	90.54.4	90.54.4_0	UI/mL
TIREOPEROSSIDASI Anticorpi (Ab-TPO)	ABTPO	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	10,1	11,15	90.51.4	90.51.4_0	UI/mL
TIREOTROPINA (vedi TSH)	TSH										11,5	12,65	90.42.1	90.42.1_0	
TIROSINCHINASI ANTICORPI (vedi Anticorpi anti IA2)	IA2										19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_12	
<i>TOBRAMICINA</i> <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
TOPIRAMATO	TOPIR	TOPIR	102	Br	Sr	verde piccola (LiEpG)			Centrifugare, aliquotare e congelare a -20°	7	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_77	mg/L
TOTAL CD3 + (T cells) compreso in LINFOCITI SOTTOPOPOLAZIONE	TLBAS														
TOTAL LYMPHOCYTES % (T+B+NK) compreso in LINFOCITI SOTTOPOPOLAZIONI	TLBAS														
TOXOCARA CANIS Anticorpi IgG	TOXCA	TOXCA	813	BTm	Sr	bianca piccola		Vengono determinate solo le IgG	Centrifugare, provetta frigorifero n°3 Test di conferma IgG+IgM presso laboratorio Synlab Germania (esame non codificato)	17	14,1	15,55	91.09.3	91.09.3_0	
TOXOPLASMA GONDII Anticorpi	TOXO														
TOXOPLASMA GONDII Anticorpi IgM	TOXOM	CHIMM	003	Legnago	Sr	2 OCRA grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	3	10,45	11,5	91.09.D	91.09.D_0	
TOXOPLASMA GONDII Anticorpi IgG	TOXOG	VIDAS	672								10,45	11,5	91.09.D	91.09.D_0	UI/mL
TOXOPLASMA GONDII Avidità IgG	TOXOA										10,45	11,5	91.09.D	91.09.D_0	%
TOXOPLASMA GONDII avidità IgG Esame di 2° Livello (inserirlo direttamente dal Laboratorio Analisi)	TOXOA	VIDAS	672	Legnago	Sr	OCRA grande		Esame di 2° livello - Test aggiunto dal laboratorio se IgM positive e IgG presenti.	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	8	10,45	11,5	91.09.D	91.09.D_0	%
<i>TOXOPLASMA ricerca in PCR</i>  <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	NO COD							Specificare le settimane di gravidanza. Esame di 2° livello da concordare con il laboratorio							
TPHA Esame di 2° livello	TPHAR	SIERL	892	Legnago	Sr	CEDRO grande		Esame di 2° livello <b>ACCETTARE CODICE ABTP</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	7,2	7,95	91.10.B	91.10.B_2	
TRANSFERRINA	TRF	CHIMM	989	Legnago	Sr	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	2	4,5	4,95	90.42.5	90.42.5_2	g/L
TRANSFERRINA RECETTORE SOLUBILE	STFR	STFR	809	Synlab	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	12	8,4	9,25	90.39.6	90.39.6_0	mg/L
TRANSLUTAMINASI (TTG) IgA (Utilizzare solo per pazienti non esenti per celiachia accorpamento <b>CELAD</b> per adulto accorpamento <b>CELBAM</b> per bambini età < 2 aa)	TTG	IMMAU NEFEL	280 010	SB	Sr	OCRA grande TRASPARENTE grande		<b>CELAD</b> per adulti: <b>IMM52+TTG</b> <b>CELBAM</b> per bambini età <2 aa: <b>TTG+IMM+AGA</b>	Richiedere sempre immunoglobuline IgA - IMM52	5	9,7	10,7	90.53.D	90.53.D_2	CU

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
TRANSGLUTAMINASI monitoraggio <b>UTILIZZARE SOLO IN PZ CON ESENEZIONE PER CELIACHIA</b> (senza IMM52) profilo CELIE	TTGM (652)	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande	CELIE (652+TTGM)	solo per pazienti esenti per celiachia		5	9,7	10,7	90.53.D	90.53.D_4	CU
TRANSGLUTAMINASI (TTG) IgG - Esame di 2° livello	TTGG	IMMAU	280	SB	Sr	OCRA grande		<b>Esame di 2° livello</b> Si esegue solo se presente deficit IgA		15	9,7	10,7	90.53.D	90.53.D_3	CU
TRANSTIRETINA mutazione <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	NO COD			Brnp	PI		Entro h 7.30 + Modulo per consenso analisi genetiche	tel. 045 8124461	Se NON è possibile inviare il campione al mattino conservare a +4° e spedire il giorno successivo						
TRICLOROACETICO ACIDO <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
TRICLOROETILENE <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
TRYPANOSOMA Anticorpi <i>N.B. SOLO PER INTERNI</i>	NO COD			Negrar	Sr		Specificare se BRUCEI (Africa) o CRUZI (SudAmerica). Per ricerca T. Cruzi serve il modulo apposito	NO venerdì NO Sabato NO i gg precedenti le festività	Centrifugare, sierare, campione in frigo n°3. S può conservare per alcuni giorni.						
TREPONEMA PALLIDUM Ab IgM (EIA) Esame di 2° livello	ABMTP	SIERL	892	Legnago	Sr	CEDRO grande		Esame di 2° livello <b>ACCETTARE CODICE ABTP</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	29,30	32,25	90.84.8	90.84.8_7	index
TREPONEMA PALLIDUM Ab screening	ABTP	SIERL	892	Legnago	Sr	CEDRO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	7,2	7,9	91.10.B	91.10.B_2	
TRIGLICERIDI	TRIG	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	2,75	3,05	90.43.2	90.43.2_0	mg/dL
TRIPTAMINA 5 OH (vedi SEROTONINA)	SEROT										20,2	22,25	90.03.6	90.03.6_10	
TRIPTASI	TRIPT	ALLERG	265	Legnago	Sr	TRASPARENTE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	10	11	90.42.B	90.42.B_2	µg/L
TROPONINA I per Legnago	TNI	CHIMM	989	Legnago	PI	VERDE grande				2	14,45	15,9	90.82.3	90.82.3_0	ng/L
TROPONINA T per San Bonifacio	TNT	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	14,45	15,9	90.82.3	90.82.3_0	ng/L
TSH	TSH	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	11,5	12,65	90.42.1	90.42.1_0	mUI/L
TSH curva dopo stimolo con TRH								Non richiedibile		10	20,50	22,55	90.42.2	90.42.2_0	
TSH RECETTORE anticorpi anti (TBI, TRAb)	ACTBI	MAGLU	346	Legnago	Sr	ruggine piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 (CONGELARE A -20° se non va spedita in giornata)	10	22,30	24,55	90.53.5	90.53.5_0	UI/L
TSH REFLEX - con impegnativa dal 30/12/2024	TSHR	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	6,8	7,5	90.41.8	90.41.8_0	mUI/L
URATO (acido urico)	URIC	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	1,1	1,25	90.43.5	90.43.5_2	mg/dL
URATO (acido urico) urine	URICU URI24 DIUBA	URI24 DIUBA	902 849	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO				2	1,10	1,25	90.43.5	90.43.5_4	gr/24h
UREA	UREA	CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				2	1,35	1,50	90.44.1	90.44.1_6	mg/dL

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura	
UREA urine	UREAU	ChUrine	902017	SB	Ur 24h	2 U-ROSSO				2	1,35	1,50	90.44.1	90.44.1_3	mg/24h	
URINE esame standard	ESU	STANDARD	016	SB	Ur	U-GIALLA				2	2,05	2,30	90.44.3	90.44.3_0		
URINOCOLTURA	URO	UMI	279	SB	Ur	U-BIANCA				3	16,4	18,05	90.94.2	90.94.2_5		
ANTI USUT VIRUS	USUT			PD			AOPD PADOVA Microbiologia			10						
ANTI USUTU Virus IgG	USUTG	ARBPD	749		Sg	BLU grande					91.13.1	91.13.1_43	4,65	5,15		
ANTI USUTU Virus IgM	USUTM				Sg	lilla piccola					91.13.1	91.13.1_44	4,65	5,15		
P-USUTU Virus RNA	USUTP				ARBPD	888					ur	U_ROSSO	91.12.B	91.12.B_27	51	56,1
U-ANTI USUTU Virus RNA	USUTU				U-ARB	854							91.12.B	91.12.B_28	51	56,1
VALPROICO ACIDO (dipropilacetato)	VALPR			CHIMM	900	SB	PI	verde piccola				7	12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_2
VANCOMICINA	VAN	CHIMM	989	Legnago	Sr	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	5	12,05	13,3	90.17.C	90.17.C_23	mg/L	
VANILMANDELICO ACIDO (VMA)	VAMA	VAMA	316848	Br	Ur 24h	2 U-ROSSO			Campione frigorifero n°3	9	20,2	22,25	90.03.6	90.03.6_3	mg/24h	
VARICELLA-ZOSTER AB	VZV	SIERL	294	Legnago	Sr	ROSSO grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	10	6,85	7,55	91.26.C	91.26.C_3		
VARICELLA ZOSTER IgG	VZG															
VARICELLA ZOSTER IgM	VZM			Legnago	Sr						10	6,85	7,55	91.26.C	91.26.C_4	
VDRL Esame di 2° livello	RPR	SIERL	892	Legnago	Sr	CEDRO grande		Esame di 2° livello <b>ACCETTARE CODICE ABTP</b>	Centrifugare, provetta frigorifero n°3	7	7,2	7,95	91.10.B	91.10.B_2		
VES	VES	EFVES	001	SB	Sg	lilla piccola				2	1,6	1,8	90.82.5	90.82.5_0	mm/h	
VIP - POLIPEPTIDE VASOATTIVO INTESTINALE NON PER ESTERNI	VIP	*VIP	438	Padova	PI	lilla piccola	A freddo	<b>NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914</b>	Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°. Eseguito nel Lab centrale PD ospedale Giustiniano	15	5,5	6,05	90.36.5	90.36.5_2		
VIRUS INFLUENZAE (A e B) vedi Influenza A e Influenza B	INA-INB															
VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE anticorpi IgA+IgG VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE anticorpi IgA VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE anticorpi IgG	RSVAB	APNEU	706	BTm	Sr	bianca piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	5	4,65	5,05	91.13.1	91.13.1_17	NTU	
										5	4,65	5,05	91.13.1	91.13.1_17	NTU	
VITAMINA A NO Centri Prelievi periferici	VITA	VitA*	708	Br	PI	*VIOLA grande	Al Buio Al Freddo	Provetta a freddo e avvolta in stagnola. Non eseguibile nei centri prelievi periferici (necessita centrifugazione entro 30 min)	Centrifugare in centrifuga refrigerata, sierare, cong. n° 5 a -20° al buio.	10	9,25	10,20	90.45.2	90.45.2_2	µmol/L	
VITAMINA B1 NO Centri Prelievi periferici N.B. SOLO PER INTERNI	VITB1	ViB1*	884	Synlab	PI	*VIOLA grande	Al Buio A freddo	provetta avvolta in stagnola	<b>CONGELARE IL SANGUE INTERO</b>	10	9,25	10,2	90.45.1	90.45.1_2	µg/L	
VITAMINA B6 NO Centri Prelievi periferici	VITB6	VB6*	709	Synlab	Sr	*OCRA grande	Al Buio A freddo	Provetta a freddo e avvolta in stagnola. Non eseguibile nei centri prelievi periferici (necessita centrifugazione entro 30 min)	Centrifugare in centrifuga refrigerata, sierare, cong. n° 5 a -20° al buio.	10	9,25	10,20	90.45.1	90.45.1_5	µg/L	
VITAMINA B12	VB12	CHIMM	989	Legnago	Sr	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	2	8,05	8,90	90.13.5	90.13.5_2	ng/L	
VITAMINA D 1-25(OH)	VD125	VD125	829	Synlab	Sr	bianca piccola				10	14,35	15,80	90.44.5	90.44.5_2	pg/mL	
VITAMINA D 25-(OH)	VD	CHIMM	989	Legnago	Sr	VERDE grande			Centrifugare, provetta frigorifero n°3	4	14,35	15,80	90.44.6	90.44.6_2	nmol/L	

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
VITAMINA E NO Centri Prelievi periferici	VITE	VitE*	883	Br	PI	*VIOLA grande	Al Buio A freddo	Provetta a freddo e avvolta in stagnola. Non eseguibile nei centri prelievi periferici (necessita centrifugazione entro 30 min)	Centrifugare in centrifuga refrigerata, sierare, cong. n° 5 a -20° al buio.	20	9,25	10,2	90.45.2	90.45.2_3	mg/L
VANADIO <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
VIBRIO CHOLERAEE, ricerca N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD			BTm	Feci	vasetto sterile		Si consiglia invio immediato, eventualmente conservazione in frigo per un giorno al massimo.	Si consiglia invio immediato, eventualmente conservazione in frigo per un giorno al massimo.						
VORICONAZOLO	VORIC	VORIC	104	BR		verde scuro piccola			Centrifugare, sierare, cong. n° 5 a -20°	40	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_80	mg/L
WEIL FELIX (vedi RICKETTSIA Ab)	RICKC														
WEST NILE FEVER screening (IgG+IgM) WEST NILE FEVER IgG WEST NILE FEVER IgM	WNV WESTG WESTM	ARBOV	824	Legnago	Sr	ROSSO grande	Modulo per le Arbovirosi	Sono presenti anche esami DENGGS, ZIKAS, CHIKS E WNPS	Centrifugare provetta rossa e mandare a Legnago con copia del modulo di accompagnamento	2	4,65 4,65	5,15 5,15	91.13.1 91.13.1	91.13.1_29 91.13.1_30	
WEST NILE FEVER conferma NO centri periferici WEST NILE FEVER IgG – conferma WEST NILE FEVER IgM – conferma WEST NILE FEVER RNA su sangue – conferma WEST NILE FEVER RNA su urine – conferma	WNVC WNGC WNMC WNPC WNVC	ARBPD U-ARB	749 888 854	Padova	Sr Sg Ur	BLU grande 2 lilla piccola U-ROSSO	Indirizzare il pz in segreteria del Laboratorio San Bonifacio. Modulo per le Arbovirosi	Inviare a Padova con allegato il modulo dedicato per le arbovirosi	Congelare a -80°C e inviare a Padova con allegato il modulo dedicato per le arbovirosi Centrifugare, aliquotare e scrivere "siero" su provetta. Centrifugare, aliquotare e scrivere "plasma" su provetta	7	4,65 4,65 51 51	5,15 5,15 56,1 56,1	91.13.1 91.13.1 91.12.B 91.12.B	91.13.1_29 91.13.1_30 91.12.B_10 91.12.B_11	
WEST NILE FEVER – profilo completo (screening + conferma)	WEST						Modulo per le Arbovirosi								
WIDAL-WRIGHT	WW	SIERL	249	Legnago	Sr	OCRA grande				5	2,9	3,2	90.88.2	90.88.2_0	
X - FRAGILE (biologia molecolare) <i>Il paziente ESTRNO deve rivolgersi personalmente a BR</i> N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD														
XILENI <i>I pazienti ESTERNI devono rivolgersi personalmente alla Medicina del Lavoro B.Roma</i> N.B. SOLO PER INTERNI	NO COD							Medicina del Lavoro B.Roma tel.0458124295							
YERSINIA (feci)	YERS	YERS	490	Legnago	Feci	Tampone VERDE			Conservare a temp. Ambiente	5	1,85	2,05	91.27.5	91.27.5_0	
ZECCA Anticorpi (vedi BORRELIA Anticorpi)	BORRE														
ZIKA – profilo completo No centri periferici ZIKA – IgG ZIKA – IgM ZIKA – RNA (sangue) ZIKA – RNA (urine)	ZIKA ZIKAG ZIKAM ZIKAP ZIKAU	ARBPD U-ARB	749 888 854	Padova	Sr Sg Ur	BLU grande 2 lilla piccola U-ROSSO	Indirizzare il pz in segreteria del Laboratorio San Bonifacio. Compilare allegato per le ARBOVIROSI (Modulo) NB Prima di fare il prelievo contattare il Lab di Padova per info. Tel. 0498217914	Inviare a Padova con allegato il modulo dedicato per le arbovirosi	Congelare a -80°C e inviare a Padova con allegato il modulo dedicato per le arbovirosi Centrifugare, aliquotare e scrivere "siero" su provetta. Centrifugare, aliquotare e scrivere "plasma" su provetta	10	4,65 4,65 51 51	5,15 5,15 56,1 56,1	91.13.1 91.13.1 91.12.B 91.12.B	91.13.1_33 91.13.1_34 91.12.B_24 91.12.B_25	UR/mL

## LISTA ANALISI Laboratorio San Bonifacio Revisione del 19/03/2025

DESCRIZIONE ANALISI	COD_ACC	Codice Provetta	Codice Etichetta	Dest.	Materiale	Provetta/Contenitore nuovo	Modalità	NOTE	Solo per Laboratorio (spediz./conservaz.)	Tempo di refertazione e (esclusi sabato e festivi)	Ticket (€)	Libera professione (€)	NTR	CVP	Unità di misura
ZINCO	ZINCO	ZINCO	481	Synlab	Sr	BLU grande			Minimo 1 ml di siero Centrifugare, sierare, frigorifero n°3	2	5,50	6,05	90.45.4	90.45.4_2	µg/L
ZINCO Anticorpi anti trasportatore 8	ZNT8	ZNT8	113	Synlab	Sr	ocra piccola			Centrifugare, provetta frigorifero n°3 ( <b>CONGELARE A -20° se si superano i 3gg</b> )	4	19,85	21,85	90.52.5	90.52.5_14	U/mL
ZONISAMIDE	ZONI	ZONISAMIDE	841	sBR	Sr	verde piccola (LiEpG)			Centrifugare, aliquotare, congelare a -20°	7	12,05	13,3	90.17.B	90.17.B_12	mg/L

LEGENDA COLORI:	
	VECCHIO CODICE
	ESAMI NON CODIFICATI E PER INTERNI
	FECI
	MICROBIOLOGIA LEGNAGO
	ALLERGLOGIA
	CODICI DA UTILIZZARE
	ESAMI NON ESEGUIBILI

### LEGENDA LISTA ANALISI

(Lab. tel. 8462)

COLORE del tappo provetta da utilizzare è indicato sull'etichetta del prelievo.

\* sulla provetta entro il 1,50

modulo al buio 37°C  
U GIAL  
U BIAN  
U VER  
U ROS  
U BLU

\*nella lista esami

Gli esami inviati fuori ULSS, codificati e NON, necessitano di Documento Accompagnamento.

Informatico tramite accettazione del paziente (oppure con una foratura: - DUP - Documento Analisi - Inserire Codice Paziente- schift ?- F12.escono 2 copie, 1 accompagna il campione, 1 per la segreteria ).

Se l'esame NON è codificato, il documento è "RICHIESTA DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PRESSO ALTRA U.L.S.S." il REPARTO deve completarlo e farlo Protocollo in dirigenza Medica tel. 8004 FAX 8420, poi consegnarlo con il prelievo in laboratorio

### LEGENDA MATERIALE Biologico

Fc	Feci
Mb	materiale biologico (liquidi di cavità, essudati, liquor,
Pl	plasma
Sg	sangue intero
Sr	siero
Ur	urine
Ur/h	urine temporizzate
Ur24h	urine raccolta 24 h
Ur1minz.	urine prima minzione
Ur2minz.	urine seconda minzione
?	materiale vario

### LEGENDA DESTINAZIONE Campioni

SB	laboratorio San Bonifacio
SBct	centro trasfusionale San Bonifacio
SBm	microbiologia laboratorio San Bonifacio
SBap	Anatomia Patologica San Bonifacio
BT	laboratorio Borgo Trento
BRcs	chimica speciale Borgo Roma
BTm	microbiologia Borgo Trento
BTct	centro trasfusionale Borgo Trento
BR	laboratorio Borgo Roma
BRem	ematologia Borgo Roma
BRm	microbiologia Borgo Roma
BRct	centro trasfusionale Borgo Roma
BRip	immunopatologia Borgo Roma
BRlu	laboratori universitari Borgo Roma LURM
BRmle	medicina legale Borgo Roma
BRml	medicina del lavoro Borgo Roma
BRnp	neuropatologia Borgo Roma
BRpe	piastra ematologica Borgo Roma
SYNLAB	Synlab Brescia